



Programm 2024

Orthopädie



Med

Mitten im
gesunden
Leben



select®



Sport



Generation

BORT. Das Plus an Ihrer Seite.®

BORT ist Ihr leistungsstarker Partner

Überzeugend durch umfangreiche Auswahl, hohe Qualität und jahrzehntelange Erfahrung

Seit über 40 Jahren pflegen wir mit unseren Fachhandelskunden eine vertrauensvolle Partnerschaft und überzeugen durch Auswahl, Qualität und Erfahrung.

Ein Vollsortiment an Medizinprodukten aus den Bereichen Orthopädie, Phlebologie und Ödemtherapie mit nachweisbarem therapeutischem Nutzen und einem bekannt guten Preis-Leistungsverhältnis, macht BORT zu einem vielseitigen, leistungsstarken und zuverlässigen Partner.

ORTHOPÄDIE



Unser Sortiment an orthopädischen Hilfsmitteln gliedert sich in unterschiedliche Produktlinien und ist auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Zielgruppen abgestimmt.

Innovative Produktentwicklung und Produktion, modernste Logistik

Aus dem Wissen im eigenen Haus, dem intensiven fachlichen Austausch mit Ärzten, Therapeuten und unseren Fachhandelspartnern entstehen immer wieder neue und innovative Produktlösungen für eine kompetente Versorgung der Patienten.

BORT AktiVen®: Vertrauen Sie auch im Bereich der Kompressionstherapie auf bewährte BORT-Qualität

BORT AktiVen® Medizinische Kompressionstrümpfe für die Phlebologie werden im Rundstrickverfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards gefertigt und sind auch als Maßanfertigung erhältlich.

Die flachgestrickten BORT AktiVen® Intense Versorgungen ergänzen Ihr Sortiment in der Ödemtherapie – inklusive höchst individueller Lösungen.

Mit dem BORT AktiVen® Angebot in Rund- und Flachstrick bieten wir Ihnen ein starkes und variantenreiches Sortiments-Plus.



PHLEBOLOGIE



ÖDEMTERAPIE



Sie haben Interesse?

Ihr Ansprechpartner im Außendienst beantwortet Ihnen gerne alle Fragen.

Mit Vielfalt, Qualität und Kompetenz zum Therapieerfolg.



BORT select®:
Die erste Wahl für
Anspruchsvolle.

BREEZE



BORT Sport:
Die sportliche Seite
von BORT.

COOLMAX®

COOLMAX® ist eine Marke von The Lycra Company.



BORT Generation:
Für mehr Mobilität
im Alter.



BORT Med:
Mitten im
gesunden Leben.

FOR KIDS



Spitzenqualität heißt bei BORT **select**®. Qualitativ hochwertige Materialien und besondere Produkt- ausstattungen mit Mehrwert erfüllen höchste Anwenderansprüche. Exklusives Design verbindet sich dabei mit perfekter Funktionalität und therapeutischer Wirksamkeit zu Tragekomfort in seiner schönsten Form.



Stabilisierung und Entlastung für bewegte Momente: Die Produktlinie Sport verbindet spezifische Anforderungen an die Funktionalität mit modernem Sport-Design. Attraktive Ausstattungsmerkmale, der Einsatz von Hightech-Fasern und ein innovatives Verschluss-System machen die Bandagen zu den idealen Begleitern bei jeder körperlichen Aktivität.



Besonders einfach in der Handhabung, besonders komfortabel beim Tragen: Generation ist unser spezielles Angebot für Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfreiheit oder Greiffähigkeit. Die Produkte helfen die Selbständigkeit im Alltag zu erhalten und können die Lebensqualität deutlich verbessern.



Von jung bis alt, von Kopf bis Fuß - die Produktlinie Med umfasst unser vielseitigstes Sortiment an Bandagen und Orthesen. Das breite Lieferprogramm ermöglicht die therapiegerechte Versorgung nahezu jeder gelenkspezifischen Indikation.



Alles Neue auf einen Blick

Jahr für Jahr entwickeln wir aktiv neue Produktlösungen, die den aktuellen Versorgungsanforderungen entsprechen.



Gibt großen Halt, wenn's drauf ankommt

Kniebandage mit Haftband, auch in Plus- und Doppel-Plus-Größen für starke Oberschenkelumfänge.

Seite 15, 136



Einfach und sicher in der Handhabung

Zur Stabilisierung des Handgelenks, mit praktischer Schnürung.

Seite 18, 87



Führt und mobilisiert bei jedem Schritt

Zur Funktionssicherung und Mobilisierung des Hüftgelenks, mit einfacher Limitierung von Beugung und Streckung.

Seite 130



BORT ist Ihr Größenspezialist

Auch für dieses Jahr haben wir unser Größenangebot erweitert, z. B.:




Mehr erfahren



Einführung von Plus-Größen (xx-large plus und xxx-large plus) bei Sprunggelenkbandagen.

Seite 26, 162

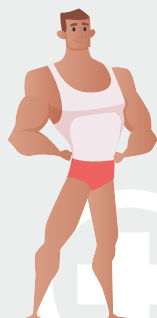



UNSER PROGRAMM

	Produktlinien	8
	KIDS	27
	Indikationsübersicht	37
	Hals	38
	Schulter	41
	Indikationsübersicht	51
	Ellenbogen	52
	Indikationsübersicht	63
	Finger	64
	Daumen	67
	Indikationsübersicht	81
	Hand	82
	Indikationsübersicht	101
	Brustwirbelsäule	102
	Rücken	103
	Indikationsübersicht	121
	Leib	122
	Leiste	129
	Hüfte	130
	Indikationsübersicht	133
	Knie	134
	Oberschenkel	142
	Indikationsübersicht	157
	Knöchel	158
	Fuß	171
	Schuhe	177
	Einlagen	181
	Rehaprodukte	184
	Hygiene	187
	Markenübersicht OTC-Produkte	188
	EasyLife®	189
	ActiveColor®	190
	CLIMACare® Wärmeprogramm	200
	PediSoft® Fußschutz	202
	StabiloColor® Elastische Binden und Kinesiotapes	209
	Ärztinformation	210





Die erste Wahl
für Anspruchsvolle.

select⁺

DAS SELECT-PLUS

- ⊕ SOFTflex Plus-Funktionsgestrick in Wohlfühlqualität, mit kühlender **BREEZE** Komfort-Faser
- ⊕ Modernste Stricktechnologie für hohen Tragekomfort und perfekten Sitz
- ⊕ Attraktives Produktdesign, hochwertig verpackt
- ⊕ Made in Germany

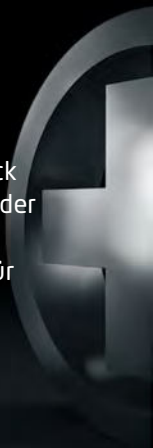

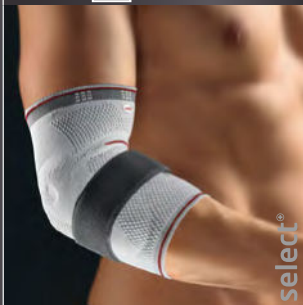**BORT select®
EpiPlus®****REF** 122 700

Pos.Nr. 05.08.01.1048

BREEZE**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

Siehe Seite 52

**BORT select®
ManuZip® volar****REF** 112 220

Pos.Nr. 05.07.02.0004

**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Siehe Seite 82

**BORT select®
StabiloGen®****REF** 114 420

Pos.Nr. 05.04.01.0001

BREEZE**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 134

**BORT select®
GenuZip®****REF** 114 390

Pos.Nr. 05.04.01.0080

BREEZE**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 135

**BORT select®
Rückenbandage mit Pelotte**
REF 104 650



Pos.Nr. 23.14.03.2086

**BORT select® Lady
Rückenbandage mit Pelotte**
REF 104 640



Pos.Nr. 23.14.03.2085

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie


Siehe Seite 104

**BORT select® Stabilo®
Rückenbandage mit Pelotte**
REF 104 710



Pos.Nr. 23.14.03.3051

**BORT select® Stabilo® Lady
Rückenbandage mit Pelotte**
REF 104 740

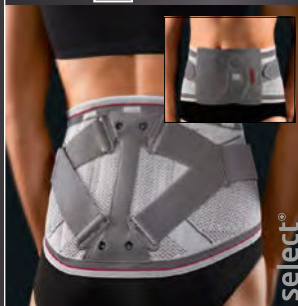

Pos.Nr. 23.14.03.3051

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

Siehe Seite 105

**BORT select® LWS-Orthese
zur Mobilisierung****REF** 104 700

Pos.Nr. 23.14.02.0019

INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps

Siehe Seite 103

BORT select® TaloStabil® Plus**REF** 054 100

Pos.Nr. 05.02.01.2005

BREEZE**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

Siehe Seite 159

BORT select® TaloStabil®**REF** 054 700

Pos.Nr. 05.02.01.0008

BREEZE**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

Siehe Seite 158

BORT select® AchilloStabil® Plus**REF** 053 100

Pos.Nr. 05.02.01.1016

BREEZE**INDIKATIONEN**

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

Siehe Seite 158



Die sportliche Seite von BORT.

Sport

DAS SPORT-PLUS

- ⊕ SOFTflex 3D-Gestrick mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- ⊕ Für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- ⊕ Hightechfaser **COOLMAX®**
- ⊕ Innovativ: Stabilo®-Band mit easyClick-System
- ⊕ Modernes Sportdesign mit reflektierendem Label
- ⊕ Made in Germany

BORT

EpiBasic Sport

REF 122 600 SP



Sport

Pos.Nr. 05.08.01.1054

COOLMAX®

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie

Siehe Seite 52

BORT

EpiContur® Sport

REF 022 500 SP



Sport

Pos.Nr. 23.08.04.0038

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathie, Überanstrengung als Folge von Arbeit und Sport, sog. Tennis-/Golfarm

Siehe Seite 57

BORT SellaFlex Sport Daumenstütze

REF 112 030 SP



Sport

Pos.Nr. 05.07.01.0034

COOLMAX®

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, beginnende Rhizarthrose

Siehe Seite 67

BORT ManuBasic® Sport

REF 112 920 SP



Sport

Pos.Nr. 05.07.02.0130

COOLMAX®

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z.B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Siehe Seite 82

BORT Daumenschiene Sport

REF 112 180 SP



Sport

Pos.Nr. 23.07.01.1062

INDIKATIONEN


Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

Siehe Seite 67

COOLMAX® ist eine Marke von The Lycra Company

BORT Geradehalter Sport

REF 104 660 SP

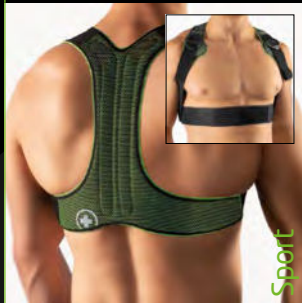

Sport

Pos.Nr. 23.13.01.0013

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehllhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)


Siehe Seite 103

**BORT StabiloBasic Sport
Rückenbandage mit Pelotte****[REF]** 104 690 SP

Sport

Pos.Nr. 23.14.03.2040

COOLMAX

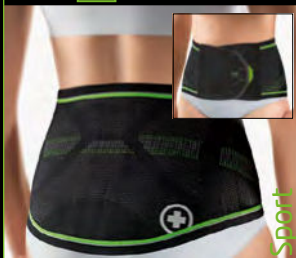**BORT StabiloBasic Lady Sport
Rückenbandage mit Pelotte****[REF]** 104 680 SP

Sport

Pos.Nr. 23.14.03.2040

COOLMAX

INDIKATIONEN


Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

Siehe Seite 106

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

Siehe Seite 106

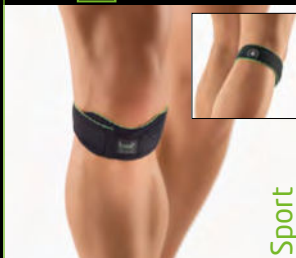**BORT
Patella-Sehnenband Sport****[REF]** 114 010 SP


Sport

Pos.Nr. 05.04.01.1022

INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, femoropatellare Arthrose, Patellaspitzensyndrom

Siehe Seite 143

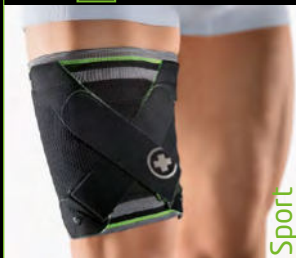**BORT MyoActive Sport
Oberschenkelstütze****[REF]** 116 600 SP

Sport

Pos.Nr. 05.06.01.1002

COOLMAX

INDIKATIONEN

Für stark beanspruchte Muskelpartien.
Akut: Prellung mit Schwellung und Hämatom, Muskelverletzungen.
Chronisch: Schutz vor erneuten Muskel-läsionen, Entlastung geschädigter Muskelstrukturen (z. B. Narbenbildung nach alten Verletzungen), nach Muskelverletzungen

Siehe Seite 142

BORT
StabiloGen® Sport
 [REF] 114 520 SP



Anatomisch und funktionell
 optimierte Pelottenform

Sport

Pos.Nr. 05.04.01.0098

COOLMAX

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 136

BORT
StabiloGen® Sport mit Haftband
 [REF] 114 520 SP-H

NEU



Anatomisch und funktionell
 optimierte Pelottenform

Sport

Pos.Nr. 05.04.01.0139

COOLMAX

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 136

BORT
AchilloStabil® Plus Sport
 [REF] 053 100 SP



Sport

Pos.Nr. 05.02.01.1018

COOLMAX

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, z. B. bei Haglundferse, Achillodynie, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

Siehe Seite 160

BORT
TaloStabil® Sport
 [REF] 054 600 SP



Sport

Pos.Nr. 05.02.01.0007

COOLMAX

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Arthrose

Siehe Seite 160

BORT
TaloStabil® Plus Sport
 [REF] 054 100 SP



Sport

Pos.Nr. 05.02.01.2012

COOLMAX

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

Siehe Seite 159



Generation

Für mehr Mobilität im Alter.

DAS GENERATION-PLUS

- ⊕ Einfache Handhabung für mehr Selbstständigkeit
- ⊕ Sichere Anwendung durch gute Kennzeichnung
- ⊕ Unterstützung ohne Einschränkung
- ⊕ Bequeme Trageigenschaften

BORT Generation Daumenschiene

REF 215 300



Generation



Pos.Nr. 23.07.01.1046

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, Rhizarthrose, degenerativ, entzündlich, z. B. Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens

Siehe Seite 72

BORT Generation Daumen-Handorthese

REF 215 200



Generation



Pos.Nr. 23.07.02.2033

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

Siehe Seite 76

BORT Generation Handgelenkbandage**REF** 215 000**NEU**

Generation



Pos.Nr. 05.07.02.3043

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, **Handwurzelarthrose**, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

Siehe Seite 87

BORT Generation Handgelenkorthese**REF** 215 100

Generation



Pos.Nr. 23.07.02.4054

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen**, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

Siehe Seite 88

BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung**REF** 215 150

Generation



Pos.Nr. 23.07.02.4067

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen**, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

Siehe Seite 88

BORT Generation Schulterorthese**REF** 215 700

Generation



Pos.Nr. 23.09.01.0100

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, sub-capitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen, entzündlich, degenerativ

Siehe Seite 41

BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese**REF** 215 880

Generation



Pos.Nr. 23.15.04.4035

INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

Siehe Seite 119

BORT Generation Osteoporose-Orthese**REF** 215 870

Generation



Pos.Nr. 23.15.04.4032

INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

Siehe Seite 118

**BORT Generation
Rückenbandage**

REF 215 850



Pos.Nr. 23.14.03.3077

INDIKATIONEN

Degenerative lumbale Veränderungen, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP

Siehe Seite 113

**BORT Generation
Rückenorthese**

REF 215 800



Pos.Nr. 23.14.04.1014

INDIKATIONEN

Facettensyndrom, Lumboischialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, **degenerative lumbale Veränderungen**, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

Siehe Seite 113

**BORT Generation
Kniebandage**

REF 215 420



Pos.Nr. 05.04.01.0129

INDIKATIONEN

Gonarthrose, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche

Siehe Seite 137

**BORT Generation
Kniebandage Plus**

REF 114 490 G



Pos.Nr. 05.04.01.2003

INDIKATIONEN

Gonarthrose, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche

Siehe Seite 137

**BORT Generation
Knieorthese**

REF 215 400



Generation



Pos.Nr. 23.04.03.1046

INDIKATIONEN

Degenerative Erkrankungen, z. B. leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen

Siehe Seite 149

**BORT Generation
Soft OA-Knieorthese**

REF 215 440



Generation



Pos.Nr. 23.04.04.1024

INDIKATIONEN

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II - III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur

Siehe Seite 150

**BORT Generation
Knöchelbandage**

REF 215 600

**NEUES
DESIGN**



Generation



Pos.Nr. 05.02.01.0084

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

Siehe Seite 161

**BORT Generation
Hallux-Valgus-Schiene**

REF 215 930



Generation



Pos.Nr. 23.01.01.0018

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

Siehe Seite 181



Mitten im
gesunden Leben.

Med

DAS MED-PLUS

- ⊕ Umfassende Indikationenabdeckung
- ⊕ Hohe Funktionalität
- ⊕ Hoher Tragekomfort
- ⊕ Einfache Handhabung

BORT Cervicalstütze Eco**REF** 127 460

Pos.Nr. 23.12.03.0027

BORT StabiloNec® Eco**REF** 127 570

Pos.Nr. 23.12.03.1016

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, postoperativ

Siehe Seite 39

INDIKATIONEN

Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, postoperativ

Siehe Seite 40

BORT Epi Basic**REF** 122 600

Pos.Nr. 05.08.01.1019

**BORT SOFT
Daumen-Schiene lang****REF** 112 720

Pos.Nr. 23.07.01.1011

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie

Siehe Seite 53

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, **Rhizarthrose**

Siehe Seite 69

BORT ManuBasic®**REF** 112 920

Med

Pos.Nr. 05.07.02.0130

BORT ManuStabil® kurz**REF** 112 730

Med

Pos.Nr. 23.07.02.4019

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

Siehe Seite 83

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Distorsion degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

Siehe Seite 91

BORT StabiloGen® Eco**REF** 114 520

Med

Pos.Nr. 05.04.01.0098

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

Siehe Seite 138

BORT Stabilo Basic
Rückenbandage mit Pelotte
REF 104 690


Pos.Nr. 23.14.03.2040

BORT Stabilo Basic Lady
Rückenbandage mit Pelotte
REF 104 680


Pos.Nr. 23.14.03.2040

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Siehe Seite 107

BORT Stabilo Basic
Rückenbandage spezialweit mit Pelotte
REF 104 670


Pos.Nr. 23.14.03.2098

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

Siehe Seite 108

BORT
TaloStabil® Eco
REF 054 600



Pos.Nr. 05.02.01.0007


Med

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose
 Siehe Seite 162

BORT
TaloStabil® Eco Plus
REF 054 650

NEU

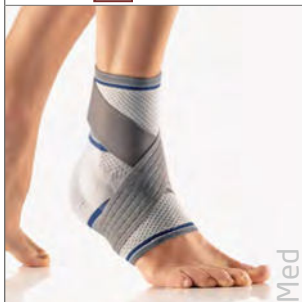

Pos.Nr. 05.02.01.2xxx

Med

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe
 Siehe Seite 163

BORT AchilloStabil® Eco
REF 054 900



Pos.Nr. 05.02.01.1005

Med

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillobdynamie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea
 Siehe Seite 163

BORT MalleoStabil®-Orthese
REF 100 500



Pos.Nr. 23.02.02.0024

Med

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von SPGL-Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, SPGL-Frakturen (Weber A), chronische Bandinstabilitäten, Abkürzung der Gipsphase, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibuläre Bandruptur
 Siehe Seite 169



Neue Spielräume: BORT orthopädische Hilfsmittel



DAS KIDS-SORTIMENT

- ⊕ **BORT Bandagen und Orthesen für Kids**
Funktioneller Schutz, damit kleine Gelenke
gesund wachsen können.

BORT Cervicalstütze

REF 127 260 KIDS




Pos.Nr. 23.12.03.0027
Zuzahlungsfrei für Kinder

BORT OmoBasic®

nach Gilchrist

REF 121 350 KIDS

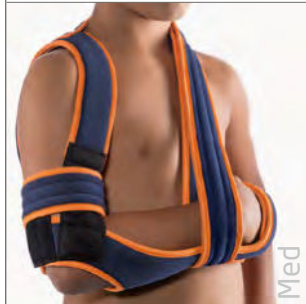

Pos.Nr. 23.09.01.0035
Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Weicher, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial

FARBE: ■ blau



DAS KIDS-PLUS

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSE

Halsumfang



Kinder (x-small) — bis 33 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 38

Kinnhöhen

5,0 cm / 6,0 cm

GRÖSSE


Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V



Kinder — 22 – 25 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 44

rechts und links gleich

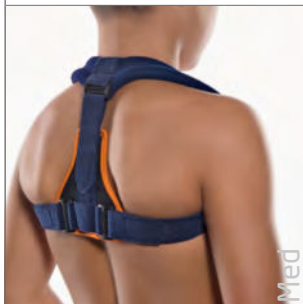BORT Clavicula-Bandage**REF** 121 700 KIDS

Pos.Nr. 05.09.02.0032
Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung


FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Guter Tragekomfort
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN

Behandlung von Claviculafrakturen

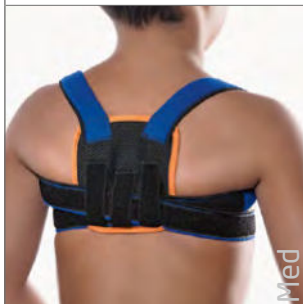BORT StabiloFix®**REF** 104 600 KIDS

Pos.Nr. 23.13.01.0008
Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- **Latexfrei**

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS

GRÖSSE

Unterbrustumfang



Kinder _____ bis 65 cm

Auch als Erwachsenengröße
auf Seite 40

GRÖSSE

Unterbrustumfang



Kinder _____ 50 – 70 cm

Auch als Erwachsenengröße
auf Seite 102

BORT DigiSoft®-Fingerorthese
[REF] 112 770 KIDS



Pos.Nr. 23.07.01.0002
 Zuzahlungsfrei für Kinder

BORT SellaTex® Classic
[REF] 112 050 KIDS



Pos.Nr. 23.07.02.2007
 Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung

FARBE: ■ grau

DAS KIDS-PLUS

- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Daumenelement anformbar
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

DAS KIDS-PLUS

- Schlupfhilfe
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen

GRÖSSE Länge Hand



Kinder _____ 11 – 14 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 66

rechts und links gleich

GRÖSSE Umfang Handgelenk



Kinder _____ 13 – 15 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 77

rechts oder links angeben

BORT
ManuStabil® kurz
[REF] 112 730 KIDS



Med

Pos.Nr. 23.07.02.4019
Zuzahlungsfrei für Kinder

BORT Osgood-Schlatter
Kniegelenkbandage
[REF] 114 510 KIDS



Med

Pos.Nr. 23.04.05.0016
Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 17 cm

FARBE: ■ grau

DAS KIDS-PLUS

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch z. B. Distorsion, periphere Nervenlähmung, Tendovaginitis

GRÖSSE Umfang Handgelenk



Kinder _____ 13 – 15 cm

Auch als Erwachsenengröße
auf Seite 91

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur, dadurch sehr angenehmes Tragegefühl
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer
- Einstellbare Entlastung durch V-förmige Zügelkorrektur

INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, **Morbus Osgood-Schlatter**, Ansatz-tendinose an Tuberositas tibiae, Gelenkerguss, Reizzustände

GRÖSSE d-Maß f-Maß



Kinder __ 23 – 26 cm 28 – 32 cm

Auch als Erwachsenengröße
auf Seite 141

rechts und links gleich

BORT
StabiloGen® Eco
REF 114 520 KIDS



Med

Pos.Nr. 05.04.01.0098

Zuzahlungsfrei für Kinder

BORT Stabilo®
Kniebandage mit Gelenk
REF 150 140 KIDS



Med

Pos.Nr. 23.04.03.0039

Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenkes
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Viskoelastische Pelotte
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Hochelastische Beugezone, schont die Kniekehle auch bei langer Tragedauer

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- Viskoelastische Pelotte
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS KIDS-PLUS

- Begrenzung der Extension bei 0°
- Gelenkschienen, individuell anformbar


INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

INDIKATIONEN


Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks

GRÖSSE d-Maß f-Maß

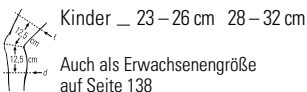

rechts und links gleich

GRÖSSE d-Maß f-Maß

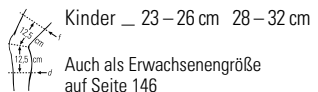

rechts und links gleich

**BORT Immob-Schiene
mit Patella-Aussparung****[REF]** 145 000 KIDS

Med

0°: Pos.Nr. 23.04.01.0036
 20°: Pos.Nr. 23.04.01.1024
 Zuzahlungsfrei für Kinder

**BORT Helix S Spiral-
dynamik® USG-Bandage****[REF]** 053 200 KIDS

Med

Pos.Nr. 05.02.01.2008
Spiraldynamik
intelligent movement
 Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- Länge: 38 cm

FARBE: ■ schwarz

DAS KIDS-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE	Körpergröße
Kinder (38 cm)	80 – 145 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 154

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes
- Dünne, elastische Bänder
- 3-D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz

DAS KIDS-PLUS

- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuß)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fußwurzel, z. B. bei Bandschwäche, fehlstatische Fußbeschwerden und der Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG

GRÖSSE	Fesselumfang
Kinder	17 – 19 cm



Kinder 17 – 19 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 166

rechts oder links angeben

BORT TaloStabil® Eco
REF 054 600 KIDS



Pos.Nr. 05.02.01.0007
 Zuzahlungsfrei für Kinder

BORT MalleoStabil®-Orthese
REF 100 500 KIDS



Pos.Nr. 23.02.02.0024
 Zuzahlungsfrei für Kinder

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ blau

DAS KIDS-PLUS


- Samtig weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen

GRÖSSE Fesselumfang

Kinder _____ 17 – 19 cm



Auch als Erwachsenengröße auf Seite 162

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und Supination

FARBE: ■ schwarz

BORT MalleoStabil® SOFT-Orthese **REF** 100 520

- Nur mit Memoryschaum-Polster

BORT MalleoStabil® Air/Gel-Orthese **REF** 100 540

- Nur mit Air/Gel-Polster

DAS KIDS-PLUS

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, Bandverletzungen, Supinations-/Pronations-trauma, fibuläre Bandruptur

GRÖSSE Körpergröße

Größe 1/Kinder _____ bis 155 cm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 169

rechts und links gleich

BORT TalofX®**REF** 054 800 KIDSPos.Nr. 23.02.02.1017
Zuzahlungsfrei für Kinder**BORT Verkürzungsausgleich
aus Silikon****REF** 930 200 KIDSPos.Nr. 08.03.06.1010
Zuzahlungsfrei für Kinder**PRODUKTMERKMALE**

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memoryschaum weich abgepolstert
- Kreuzzügelung mit Dynamic-Force-Control-Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material

FARBE: ■ schwarz


DAS KIDS-PLUS

- **Schlankes Design**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenks in Pronation und Supination

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSE Fesselumfang

Kinder _____ 17 – 19 cm

 Auch als Erwachsenengröße auf Seite 167

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Aus dauerhaftem Silikon
- Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- Verpackung: Stück

DAS KIDS-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

INDIKATIONEN

Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Achillessehnenbeschwerden (Achillo-dynie)

GRÖSSE Schuhgröße

Kinder _____ 33 – 35
 Höhen _ 3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm

Auch als Erwachsenengröße auf Seite 183

rechts und links gleich

In jeder Situation:
Stabilisierung und Entlastung von
Halswirbelsäule und Schulter.



BORT Stabilo® Cervicalstütze

REF 127 160



Pos.Nr. 23.12.03.0026

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Fester**, offenporiger Schaumstoff, zum Tragen bei Tag
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

BORT Cervicalstütze

REF 127 260/360/660



Pos.Nr. 23.12.03.0027

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Weicher**, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar
- **Auch für Kinder**, s. Seite 28

FARBEN: □ weiß (**REF** 127 260)

■ beige (**REF** 127 360)

■ blau/schwarz (**REF** 127 660)

DAS MED-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, Cervicalsyndrom, postoperativ

GRÖSSEN

Halsumfang



small _____ bis 38 cm
 medium _____ 38 – 43 cm
 large _____ 43 – 48 cm

GRÖSSEN

Halsumfang

Kinder (nur 127 260, blau) _____ bis 33 cm
 small _____ bis 38 cm
 medium _____ 38 – 43 cm
 large _____ 43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm **Kinder 5,0 cm / 6,0 cm**

**BORT StabiloNec®
mit Verstärkungsspange****REF** 127 560

Pos.Nr. 23.12.03.1016

BORT Cervicalstütze Eco**REF** 127 460

Pos.Nr. 23.12.03.0027

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Integrierte Verstärkungsspange**
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Kehlkopfaussparung
- Klettverschluss, verstellbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, Schiefhals (rheumatisch), Osteochondrose/Spondylarthrose der HWS, postoperativ

GRÖSSEN

Halsumfang



small	_____	bis 38 cm
medium	_____	38 – 43 cm
large	_____	43 – 48 cm

Kinnhöhen 5,5 cm / 7,5 cm / 9,0 cm / 11,0 cm

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- Kehlkopfaussparung
- **Weicher**, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau/schwarz

DAS ECO-PLUS

- Zum Tragen bei Tag und Nacht
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im HWS-Bereich, leichtes Schleudertrauma, Distorsion, postoperativ

GRÖSSEN

Kinnhöhe



Größe 0	_____	5,5 cm
Größe 1	_____	7,5 cm
Größe 2	_____	9,0 cm
Größe 3	_____	11,0 cm


Nur eine Länge (56 cm),
passend für Halsumfänge
von 32 bis 45 cm.

BORT StabiloNec® Eco
REF 127 570



Pos.Nr. 23.12.03.1016

BORT Clavicula-Bandage
REF 121 700

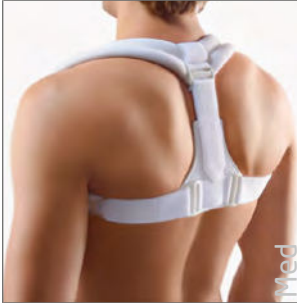

Pos.Nr. 05.09.02.0032

PRODUKTMERKMALE

- Anatomische Cervicalstütze zur Stabilisierung der HWS
- **Integrierte Verstärkungsspanne**
- Kehlkopfaussparung
- Fester, offenporiger Schaumstoff
- Klettverschluss, verstellbar
- Länge: 56 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau/schwarz

DAS ECO-PLUS

- Funktionelle Stabilisierung
- Extra abgerundete Kanten
- Hautfreundlicher Bezug aus 100 % Baumwolle

PRODUKTMERKMALE

- Rucksackverband
- Weiche Polstergurte
- Drei Klettverschlüsse, individuell einstellbar, ermöglichen eine ideale Fixierung
- **Auch für Kinder**, s. Seite 29

FARBEN: □ weiß (Erwachsene), ■ blau (Kinder)

DAS MED-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Hautfreundlich
- Einsatz bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN

Schwere Schmerzzustände, mittelschweres Schleudertrauma, Cervicalsyndrom, postoperativ

INDIKATIONEN

Behandlung von Claviculafrakturen

GRÖSSEN	Kinnhöhe
Größe 0	5,5 cm
Größe 1	7,5 cm
Größe 2	9,0 cm
Größe 3	11,0 cm

Nur eine Länge (56 cm), passend für Halsumfänge von 32 bis 45 cm.

GRÖSSEN	Unterbrustumumfang
Kinder (nur blau)	bis 65 cm
small	65 – 80 cm
medium	80 – 95 cm
large	95 – 110 cm
x-large	110 – 125 cm



BORT Generation Schulterorthese

REF 215 700



Generation



Pos.Nr. 23.09.01.0100

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit **Tragetasche** zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Taillen- und Schultergurt zur sicheren Fixierung von Schulter und Arm



FARBE: ■ blau

 ZUBEHÖR: REF 991 115 
 BORT Handauflage mit Ball

BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
 Produktsortiment mit besonderen
 Handlungsvorteilen
DAS GENERATION-PLUS

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Positionierhilfe am Rücken verhindert Verdrehen der Gurte
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

**INDIKATIONEN**
 Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, **subcapitale Humerusfraktur**, Lähmungserscheinungen, entzündlich, **degenerativ**
GRÖSSEN

Körpergröße

Größe 1 _____	bis 160 cm
Größe 2 _____	160 – 180 cm
Größe 3 _____	über 180 cm

rechts oder links angeben

BORT OmoSAT
REF 121 980

NEUES DESIGN



Pos.Nr. 23.09.01.0059

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese mit **Tragetasche** zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterarmmuskulatur

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Einfacher Anlegeprozess von Schulter- und Taillengurt
- Schnellverschluss zur einfachen und sicheren Fixierung der Armtasche am Gurtsystem

BORT OmoStabil®
Desault-Weste
REF 121 200



Pos.Nr. 23.09.01.0016

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese als sogenannte **Desault-Weste** zur Ruhigstellung des Schultergelenks in definierter Position
- Kappenförmige Ausformung im Schulterbereich
- Im Rumpfbereich zirkulär umfassend
- Perforierter Veloursverbundstoff

FARBE: ■ blau



DAS MED-PLUS

- Flächige Fixierung von Schulter und Arm bei freier Beweglichkeit der Hand

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, subcapitale Humerusfraktur, Lähmungserscheinungen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Kontusion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Rotatorenmanschettenläsion

GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1	bis 160 cm
Größe 2	160 – 180 cm
Größe 3	über 180 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 0	bis 75 cm
Größe 1	75 – 95 cm
Größe 2	95 – 125 cm
Größe 3	125 – 145 cm

rechts und links gleich



BORT OmoXpress**REF** 120 900

Pos.Nr. 23.09.01.0060

BORT OmoXpress light**REF** 120 920

Pos.Nr. 23.09.01.0081

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Handlasche komplett zu öffnen
- Einfache Handhabung durch drehbare Steckschnalle; dadurch einfache frühfunktionale Nachbehandlung möglich
- Hoher Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Stabile Fixierung von Schulter und Arm
- Offene Konstruktion zur einfachen Wundkontrolle
- Hautfreundliches Material

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Einfachste Anpassung und sichere Handhabung durch Klettverschluss
- Frei positionierbare Armschlaufen
- Leichte, optisch wenig auffallende Versorgung mit hohem Tragekomfort


INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Kontusion, Luxation, Humerusfraktur

GRÖSSEN Unterbrustumfang

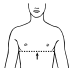	Größe 0	_____	bis 80 cm
	Größe 1	_____	80 – 120 cm
	Größe 2	_____	120 – 160 cm


rechts und links gleich

GRÖSSEN Unterbrustumfang

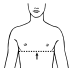	Größe 0	_____	bis 80 cm
	Größe 1	_____	80 – 120 cm
	Größe 2	_____	120 – 160 cm


rechts und links gleich

BORT OmoBasic®
nach Gilchrist
REF 121 350



Pos.Nr. 23.09.01.0035

BORT OmoBasic®
geschlossene Form
REF 121 500

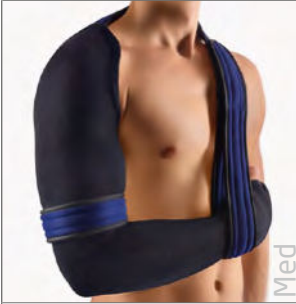

Pos.Nr. 23.09.01.0036

PRODUKTMERKMALE

- Offene Schulter-Arm-Adduktions-orthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung
- Weiches, zugstabiles Gurtmaterial
- Auch für Kinder, s. Seite 28

FARBEN: blau weiß



DAS BASIC-PLUS

- Flexible Einstellung an Hand und Oberarm
- Gute Erreichbarkeit des OP-Gebietes zur Wundversorgung
- Hautfreundlich

PRODUKTMERKMALE

- Geschlossene Schulter-Arm-Adduktionsorthese zur Ruhigstellung des Schultergelenks
- Hochelastisches Schlauchmaterial
- Elastisches Band in der Kommissur des Daumens
- Sicherer Sitz und Fixierung des Arms in Adduktionsstellung durch stabilisierende Gurtführung

FARBEN: blau weiß



DAS BASIC-PLUS

- Stabilisierung der Schulter bei freier Beweglichkeit des Daumens und der Langfinger
- Elastischer Abschlussrand im Schulterbereich
- Hautfreundlich

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Distorsion, Luxation, subcapitale Humerusfraktur, Scapulafraktur, Rotatorenmanschettenverletzung

GRÖSSEN	Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
Kinder (blau)	22 – 25 cm
Größe 0/S	25 – 28 cm
Größe 1/M	28 – 31 cm
Größe 2/L	31 – 34 cm
Größe 3/XL	34 – 38 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Arm-umfang	Arm-länge
Größe 0/S	26–32	48–52 cm
Größe 1/M	28–34	50–56 cm
Größe 2/L	32–40	54–60 cm
Größe 3/XL	38–48	58–68 cm

rechts und links gleich

BORT
OmoFX Vario
REF 121 020


Pos.Nr. 23.09.04.0062


BORT
OmoTwinAir
REF 121 800


Pos.Nr. 23.09.04.0026

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Abduktionsorthese zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Frei positionierbare Bänder zur Fixierung des Arms
- Ballförmige Handauflage zum Trainieren der Unterarmmuskulatur
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau

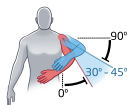

DAS MED-PLUS

- **Wendekissen:** Lagerung in 30° oder 45° Abduktion
- Therapiesicherheit, durch rutschsicheren, anatomischen Schnitt des Kissens
- Angenehme Trageigenschaften

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenverletzung, Endoprothesenimplantat

GRÖSSEN

Umfang Leib




small _____ bis 104 cm
 large _____ ab 104 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Aufblasbares Schulter-Arm-Abduktionskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Abduktion: ca. 50 - 60°
- Handauflage mit Ball zum Trainieren der Unterarmmuskulatur
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

FARBE: ■ grau

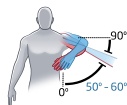

DAS MED-PLUS

- 2-geteiltes Luftkammer-System zur Vermeidung unerwünschter Anteversion des Oberarms beim Liegen
- Fixierung des Oberarms mit zusätzlichem Oberarmkeil
- Sehr geringes Gewicht


INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenverletzung, Endoprothesenimplantat

GRÖSSE


Nur eine Größe

rechts und links gleich

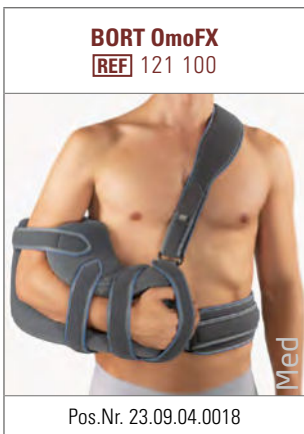

PRODUKTMERKMALE

- Schulter-Arm-Abduktionskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks
- Abduktion: ca. 30°
- Frei positionierbare Bänder für Ellenbogen und Unterarm
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

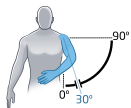

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS


- Einfache Handhabung
- Komfortable Lagerung des Armes

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei periartikulären Reizzuständen und Erkrankungen im Bereich des Glenohumeralgelenks, Schulter-eckgelenksprennung (Tossy I + II), Supraspinatussyndrom


GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1 _____	bis 165 cm
Größe 2 _____	über 165 cm

rechts oder links angeben

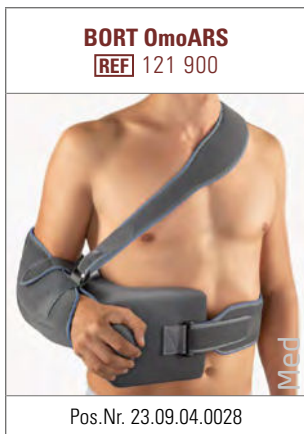

PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Außenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur

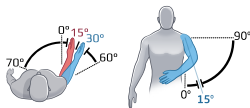

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

ZUBEHÖR: **REF** 121 960 Keil zur Lagerung in 30° Außenrotation

INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1 _____	bis 165 cm
Größe 2 _____	über 165 cm

rechts und links gleich

**BORT OmoARS
mit 3-Punkt-Gurt****REF** 121 970


Pos.Nr. 23.09.04.0028

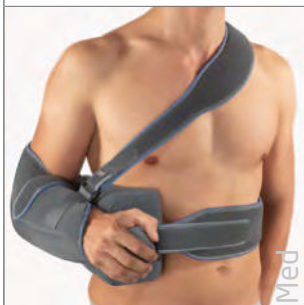BORT OmoARS kurz**REF** 121 030

Pos.Nr. 23.09.04.0028

PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° oder 30° Außenrotation und 15° Abduktion
- 3-Punkt-Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur

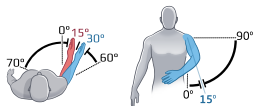

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Optimaler Sitz und Stabilität durch 3-Punkt-Gurt
- Einfache Handhabung
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

ZUBEHÖR: **REF** 121 960 Keil zur Lagerung in 30° Außenrotation

INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Impingementsyndrom, Rotatorenmanschettenruptur, Endoprothesenimplantat, subakromiale Defilée-Erweiterung (nach Neer), Bursitis subacromialis

GRÖSSEN	Körpergröße
Größe 1 _____	bis 165 cm
Größe 2 _____	über 165 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Armlagerungskissen zur Ruhigstellung und Entlastung des Schultergelenks in 15° Außenrotation und 15° Abduktion
- Gurtsystem mit Klettverschluss
- Handauflage mit Ball zum Training der Unterarmmuskulatur

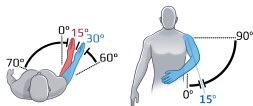

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stabilität und Lagerung durch anatomisches Kissen
- Hautfreundlicher Veloursüberzug

GRÖSSEN	Länge Olecranon bis Metacarpalknöchel V
Größe 1 _____	bis 34 cm
Größe 2 _____	35 – 39 cm
Größe 3 _____	über 39 cm

rechts und links gleich

NEU

BORT OmoControl

REF 120 700

BOA






SCHLAGANFALL

Med

Pos.Nr. 23.09.03.0009

PRODUKTMERKMALE

- Schultergelenkorthese zur physiologischen Führung und Stabilisierung des Schultergelenks
- Korrektur der Innenrotation und Rückführung des Humeruskopfes
- Entlastung der Kapsel, Sehnen, Muskeln und Nerven
- Ermöglicht freie Pendelbewegung des Armes

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Komfortable Materialien für maximalen Tragekomfort
- Konstruktion erlaubt ein einhändiges Anlegen
- Einfache Handhabung durch innovatives BOA® Fit System


Arm- und Schultermanschette auch einzeln in (S), (M) und (L) bestellbar

REF 120 500 Armmanschette

REF 120 600 Schultermanschette

INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Instabilität des Schultergelenks, konservativ bei habitueller Schulterluxation, entzündlich, degenerativ

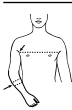	Armmanschette (Modul A) Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)		Schultermanschette (Modul B) Brustumfang (unter Achselhöhle in cm gemessen)	
	Größe 1	(S) 20 – 25 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Größe 2	(S) 20 – 25 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Größe 3	(S) 20 – 25 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Größe 4	(M) 25 – 30 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Größe 5	(M) 25 – 30 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Größe 6	(M) 25 – 30 cm	(L) 105 – 125 cm	
	Größe 7	(L) 30 – 35 cm	(S) 75 – 90 cm	
	Größe 8	(L) 30 – 35 cm	(M) 90 – 105 cm	
	Größe 9	(L) 30 – 35 cm	(L) 105 – 125 cm	

rechts oder links angeben

BORT OmoTex**REF** 121 600

Med

Pos.Nr. 05.09.01.3004

BORT OmoTex Traction**REF** 120 800

Med

Pos.Nr. 05.09.01.3005

PRODUKTMERKMALE

- Schultergelenk-Kompressions-bandage
- Zusätzlicher Klettzügel zur Begrenzung der Außenrotation
- Silikonpelotte, frei positionierbar
- Anatomisches, muskelaktivierendes Formgestrick

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Verbesserte Führung des Glenohumeralgelenks
- Gurtlängen individuell einstellbar
- Komfortables Tragen auch unter der Kleidung

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, z. B. bei Arthrose

PRODUKTMERKMALE

- **Modulare Schultergelenk-Bandage mit separat verwendbarer Gewichtsmanschette** zur subacromialen Dekompression
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Vier Gewichtselemente à 250 g zur individuellen Gewichtung der Traktion
- Verbesserte Anpassbarkeit durch flexibel einstellbare Gurtführungsplatte

FARBE: ■ schwarz



DAS MED-PLUS


- Verbesserte Gelenkführung und Druckentlastung im Bereich des Caput humeri
- Gewichtsmanschette entsprechend dem Therapieverlauf von der Bandage abnehmbar und durch Klettband einstellbar

INDIKATIONEN

Impingementsyndrom, chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Schultergelenkbereich, Periarthropathia humeroscapularis (PHS)

GRÖSSEN


Umfang Oberarm

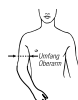

Größe 1	_____	24 – 28 cm
Größe 2	_____	28 – 32 cm
Größe 3	_____	32 – 36 cm
Größe 4	_____	36 – 40 cm

GRÖSSEN

Umfang Oberarm

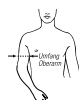

Größe 1	_____	24 – 28 cm
Größe 2	_____	28 – 32 cm
Größe 3	_____	32 – 36 cm
Größe 4	_____	36 – 40 cm


rechts und links gleich

rechts und links gleich

Mobil in den Tag: Entlastung und Stabilität für den Ellenbogen



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® EpiPlus® 122 700	EpiBasic Sport 122 600 SP	EpiBasic 122 600 EpiBasic kurz 122 600 K	Kubi Tal® 055 100	EpiContur® Sport 022 500 SP	Stabilo® Epi-Spange 122 580	Ellenbogen- bandage 104 200	KubiFX 055 300 KubiFX light 055 350	KubiFX lang 055 400 KubiFX lang light 055 450	Ellenbogen ROM-Orthese 055 500
Seite	S. 52	S. 52	S. 53	S. 54	S. 57	S. 59	S. 55	S. 60	S. 61	S. 59
Posttraumatisch			●					●	●	●
Postoperativ							●	●	●	●
Luxation										●
Sulcus ulnaris-Syndrom				●				●		
Tendopathien						●			●	
Epicondylitis	●	●	●		●	●			●	
Reizzustände	●	●		●	●					●
Tendomyopathie			●							
Distorsion							●			
Arthrose							●			

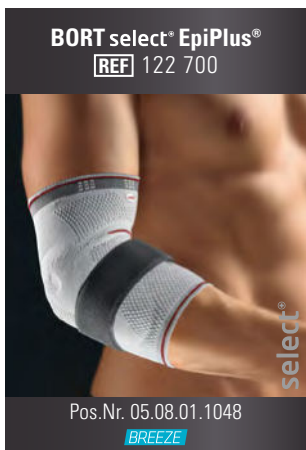

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge
- Längselastische Dehnungszone im Ellenbogenbereich sorgt für angenehmen Sitz in allen Beugewinkeln
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 20 cm

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS


- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra-weicher Abschlussrand
- Sehr guter Tragekomfort, ergonomisch und rutschfrei

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie


GRÖSSEN

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Maßanfertigung nur für REF 122 700 möglich.

rechts und links gleich

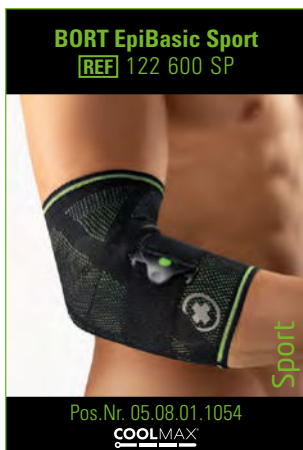

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Zwei strukturierte Silikonpelotten
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge
- Flexible Dehnungszone im Ellenbogenbereich
- Länge: 20 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®:** Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bandes mittels **easyClick-System**
- **Latexfreies Gestrick**
- Pelottendruck durch Stabilo®-Band individuell dosierbar

BORT Epi Basic**REF** 122 600

Pos.Nr. 05.08.01.1019

BORT Epi Basic kurz**REF** 122 600 K

Pos.Nr. 05.08.01.1019

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Positionierungshilfe in Ellenbogenbeuge

FARBE: ■ silber

DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Speziell elastische Beugezone, schont die Ellenbeuge auch bei langer Tragedauer
- **Reduzierte Länge am Oberarm**

*Längenangaben sind ca. Maße und können sich je nach Größe unterscheiden.

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, **Epicondylitis** (akut oder chronisch), Tendomyopathie

GRÖSSEN

Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)



xx-small	_____	20 – 22 cm
x-small	_____	22 – 24 cm
small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm
x-large	_____	30 – 32 cm
xx-large	_____	32 – 34 cm
*xxx-large (nur silber)	_____	34 – 36 cm

rechts und links gleich

*xxx-large nur für **REF** 122 600

BORT KubiTal®
Ellenbogen-Polster-Bandage
 [REF] 055 100



Pos.Nr. 05.08.01.1020

PRODUKTMERKMALE

- Großflächig gepolsterte Ellenbogenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Großflächige Silikonpelotte mit zusätzlicher Olecranon-Aussparung für Formstabilität bei Beugung
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: beige grau

DAS MED-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Großflächiger Schutz des gesamten Ellenbogenbereichs
- Nahtfreie Komfortzone in der Ellenbeuge

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Kompression des Nervus ulnaris am Ellenbogen (**Sulcus ulnaris-Syndrom/Kubitaltunnelsyndrom**), Bursitis

GRÖSSEN

Umfang Unterarm
(5 cm unter Ellenbogengelenk)

	xx-small	20 – 22 cm
	x-small	22 – 24 cm
	small	24 – 26 cm
	medium	26 – 28 cm
	large	28 – 30 cm
	x-large	30 – 32 cm
	xx-large	32 – 34 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts und links gleich

**BORT activemed
Ellenbogenbandage****[REF]** 220 200

Pos.Nr. 05.08.01.1051

**BORT
Ellenbogenbandage****[REF]** 104 200

Pos.Nr. 05.08.01.0007

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage
- Ulnare und radiale Silikonpelotten
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: beige mineralgrau
 graphit

DAS MED-PLUS

- Elastische Komfortzone in der Ellenbeuge für angenehmen Tragekomfort
- Weiche Oberflächenstruktur

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, Epicondylitis (akut oder chronisch), Tendomyopathie

GRÖSSEN Umfang Unterarm
 (5 cm unter Ellenbogengelenk)

	x-small	_____	22 – 24 cm
	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm
	x-large	_____	30 – 32 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenstütze
- Anatomisch formgestrickt, für optimale Passform
- Kompressions-Klasse II

FARBE: beige

DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Nicht aufragend

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkerguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

GRÖSSEN Umfang Ellenbogen

	small	_____	24 – 26 cm
	medium	_____	26 – 28 cm
	large	_____	28 – 30 cm

rechts und links gleich

**BORT Zweizug
Ellenbogenbandage****REF** 055 200

Pos.Nr. 05.08.01.0002

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Ellenbogenbandage mit **seitlichen Stäben**
- Rundgestrick, ohne Naht
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl
- Seitliche Stäbe für extra Stabilität

**BORT Zweizug
Ellenbogenstütze****REF** 054 200

Pos.Nr. 05.08.01.0006

PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl durch nahtloses Gestrick

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Ellenbogengelenks, z. B. bei Gelenkguss, Distorsion, Arthrose, Kontusion

GRÖSSEN Umfang Ellenbogen



small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm
x-large	_____	30 – 32 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Ellenbogen



x-small	_____	22 – 24 cm
small	_____	24 – 26 cm
medium	_____	26 – 28 cm
large	_____	28 – 30 cm
x-large	_____	30 – 32 cm

rechts und links gleich

BORT EpiContur® Sport

REF 022 500 SP



Pos.Nr. 23.08.04.0038

Ellenbogen

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- **Einheitsgröße durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar**

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien Sitz bei sportlichen Aktivitäten
- Spangendruck individuell dosierbar
- Speziell geformte Friktionspelotte, frei positionierbar
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

INDIKATIONEN

Epicondylitis, **chronische oder rezidivierende Epicondylopathie**, Tendopathie, Überanstrengung als Folge von Arbeit und Sport, sog. Tennis-/Golfarm

GRÖSSE


Umfang Unterarm (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Nur eine Größe _____ 21 – 35 cm


rechts und links gleich

**BORT EpiContur®
mit 1 Pelotte**
REF 022 500

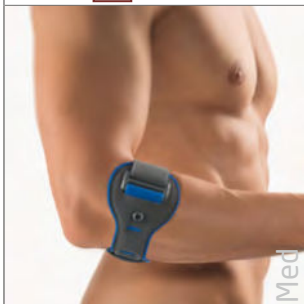

Pos.Nr. 23.08.04.0022

**BORT EpiContur®
mit 2 Pelotten**
REF 122 500

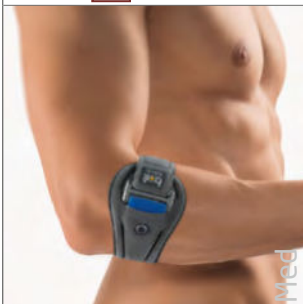

Pos.Nr. 23.08.04.0020

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung des radialen oder ulnaren Muskelursprungs
- Einheitsgröße durch Klettverschluss auf individuellen Umfang einstellbar
- Eine frei positionierbare Friktionspelotte

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell dosierbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Soft-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Je eine ulnare und radiale Friktionspelotte, frei positionierbar

FARBEN: ■ beige ■ grau

DAS MED-PLUS

- Spangendruck individuell einstellbar
- Tailliertes Spangendesign ermöglicht rutschfreien, sicheren Sitz

INDIKATIONEN

Epicondylitis, **chronische oder rezidivierende Epicondylopathie**, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennis-/Golfarm

Umfang Unterarm
GRÖSSE (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Nur eine Größe 21 – 35 cm

rechts und links gleich

Umfang Unterarm
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Größe 0 _____ 21 – 25 cm
Größe 1 _____ 25 – 30 cm
Größe 2 _____ 30 – 35 cm

rechts und links gleich

BORT Stabilo® Epicondylitis-Spange mit ulnarer Entlastung


REF 122 580



Pos.Nr. 23.08.04.0021

BORT Ellenbogen-ROM-Orthese

REF 055 500

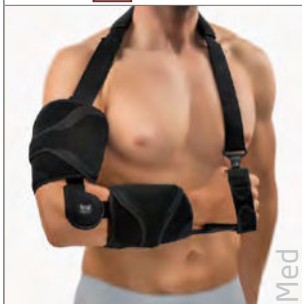

Pos.Nr. 23.08.02.1006

PRODUKTMERKMALE

- Epicondylitis-Spange zur Entlastung der Muskelursprünge am ulnaren und/oder radialen Epicondylus
- Spezielle anatomische Formgebung ermöglicht individuell dosierbaren Spangendruck

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Elastischer Klettverschluss, daher kein Druck auf die Elle
- Flaches Design
- Innenseite gepolstert

INDIKATIONEN

Epicondylitis, chronische oder rezidivierende Epicondylopathie, Tendopathien, Überanstrengung, sog. Tennisarm, Golfarm

Umfang Unterarm
GRÖSSEN (5 cm unter Ellenbogengelenk)



Größe 1	22 – 24 cm
Größe 2	24 – 26 cm
Größe 3	26 – 28 cm
Größe 4	28 – 31 cm
Größe 5	31 – 34 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Ellenbogenorthese zur Mobilisierung, bei gleichzeitiger Immobilisierung des proximalen Radio-Ulnar-Gelenks
- Begrenzung der Extension von 0° - 90°
- Begrenzung der Flexion von 0° - 120°
- Fixation des Gelenks in 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Vermeidung von Supination und Pronation im Unterarm durch Handauflage

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Hoher Tragekomfort durch großflächige Auflagen an Ober- und Unterarm
- Individuelle Längeneinstellung
- Extra leichte Orthesenkonstruktion

INDIKATIONEN

Frühfunktionelle postoperative oder posttraumatische Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Ellenbogengelenks und Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks, z. B. konservative/postoperative Versorgungen von Radiusköpfchenfrakturen, Ellenbogenluxationen, distalen Humerusfrakturen, nach Prothesenimplantation

GRÖSSEN Umfang Oberarm




Größe 1	25 – 34 cm
Größe 2	34 – 43 cm

rechts oder links angeben

**BORT KubiFX light
Ellenbogen-Orthese**

REF 055 350

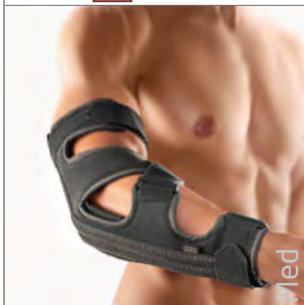

Pos.Nr. 23.08.01.0005

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Länge: ca. 39 cm


FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- **Extra leichte und offene Rahmenbauweise**

**BORT KubiFX
Ellenbogen-Orthese**

REF 055 300

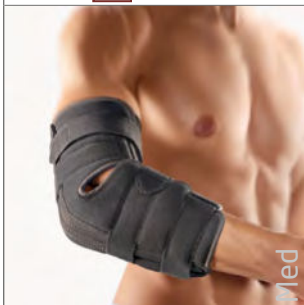

Pos.Nr. 23.08.01.0003

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Vier Umkehrzügel
- Länge: ca. 37 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, nach Bursektomie

GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts und links gleich

GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts und links gleich

**BORT KubiFX lang
Ellenbogen-Orthese**

REF 055 400



Pos.Nr. 23.08.01.2003

**BORT KubiFX lang light
Ellenbogen-Orthese**

REF 055 450



Pos.Nr. 23.08.01.2005

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- **Volare Schiene bis in den Palmarbereich der Hand**
- Zwei Alu-Schienen, herausnehmbar
- Unelastisches Material
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Fünf Umkehrzüge
- Länge: ca. 53 cm

FARBE: ■ grau 

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Ellenbogengelenks und des proximalen Radioulnargelenks
- Innenseite mit Frottee kaschiert
- Beidseits verwendbare Handauflage
- Ellenbogenpolster, frei positionierbar
- Einheitsgröße durch stufenlose Einstellung der Unterarmlänge (Olecranon bis Metacarpalknöchel V)
- von 28 cm bis 38 cm

FARBE: ■ grau 

DAS MED-PLUS

- Sichere Stabilisierung
- Von 0° - 90° individuell anformbar
- **Extra leichte und offene Rahmenbauweise**

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei proximalem Sulcus ulnaris Syndrom, deszendierender Tendopathie, Epicondylitis, nach Bursektomie

GRÖSSEN Länge Olecranon
bis Metacarpalknöchel V



Größe 1 _____ 28 – 31 cm
Größe 2 _____ 31 – 34 cm
Größe 3 _____ 34 – 38 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts und links gleich

Fit für den Alltag: funktionelle Hilfe für Finger und Daumen.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	MobiDig® Flexion 112 560	MobiDig® Extension 112 510	DigiSoft® Finger- orthese 112 770	SOFT Daumen- Schiene lang 112 720	SOFT Daumen- Schiene plus 112 780	Generation- Daumen- schiene 215 300	Rhizo- Flex® 105 100	Sella- Xpress kurz 112 840	Sella- Xpress plus 112 860	Daumen- schiene Sport 112 180 SP	SellaFlex Sport 112 030 SP	SellaTex® Classic 112 050 C SellaTex® 112 050	Generation Daumen- Hand- orthese 215 200
Seite	S. 65	S. 65	S. 66	S. 69	S. 70	S. 72	S. 73	S. 70	S. 71	S. 67	S. 67	S. 77	S. 76
Ruhigstellung Daumengrundgelenk				●	●	●		●	●		●	●	●
Sattelgelenk				●	●	●		●	●		●	●	●
Daumenendgelenk					●				●				
Flexion DIP-/PIP-Gelenke	●												
Extension PIP-Gelenke		●											
Lagerung													
Ulnare/radiale Bandläsion				●	●	●					●	●	●
Rhizarthrose				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tendopathie					●				●			●	●
Arthrose						●	●			●		●	●
Zusätzliche Fixierung Handgelenk												●	●



PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Hyperextension des verletzten Fingerendgliedes

FARBEN: ■ beige ■ transparent

DAS MED-PLUS

- Konservative Behandlung
- Farbe beige: Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

Vom Leistungserbringer als Sprechstundenbedarf abrechenbar



PRODUKTMERKMALE

- Kunststoff-Fingerschiene zur Behandlung von Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity) an den Langfingern der Hand
- Immobilisierung des PIP-Gelenks

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS


- Konservative Behandlung
- Thermoplastisch nachformbar
- Spanende Bearbeitung möglich

INDIKATIONEN


Fraktur, Luxation, Bandverletzungen, Strecksehnenabriss

INDIKATIONEN

Knopflochdeformität (Boutonnière Deformity), Immobilisierung der PIP-Gelenke

GRÖSSEN	Fingerbreite am DIP-Gelenk
 Größe 1	1,4 – 1,6 cm
Größe 2	1,5 – 1,8 cm
Größe 3	1,7 – 2,1 cm
Größe 4	1,8 – 2,2 cm
Größe 5	1,9 – 2,3 cm
Größe 5,5	2,3 – 2,6 cm
Größe 6	2,0 – 2,8 cm
Größe 7	2,6 – 2,9 cm

rechts und links gleich

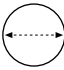GRÖSSEN	Schiennen-Innendurchmesser
 Größe 1	1,9 cm
Größe 2	2,1 cm
Größe 3	2,3 cm
Größe 4	2,4 cm
Größe 5	2,5 cm
Größe 6	2,6 cm
Größe 7	2,8 cm

rechts und links gleich

BORT MobiDig® Flexion**REF** 112 560

Med

Pos.Nr. 23.07.03.0011

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Ergonomische, strapazierfähige Polster

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich

INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Flexion der PIP- oder DIP-Gelenke

GRÖSSEN

Länge



small	3,5 – 5,0 cm
medium	5,0 – 5,8 cm
large	5,8 – 6,5 cm
x-large	über 6,5 cm

L₁ = Einsatz als PIP-Quengel oder
L₂ = Einsatz als DIP-Quengel

rechts und links gleich

BORT MobiDig® Extension**REF** 112 510

Med

Pos.Nr. 23.07.03.0010

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Proximales Polster liegt im Bereich der Handfläche
- Ergonomische, strapazierfähige Polster

FARBE: grau

DAS MED-PLUS

- Lineare Federkraft
- Verstärkung oder Reduzierung der Spannung durch vorsichtiges Biegen der Feder möglich
- Plus-Größen

INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke

GRÖSSEN

Länge¹⁾ Fingerbreite²⁾

x-small	5,0 – 6,3	1,3 – 1,5
x-small plus	5,0 – 6,3	1,5 – 1,7
small	6,3 – 7,6	1,5 – 1,7
small plus	6,3 – 7,6	1,7 – 1,9
medium	7,6 – 8,9	1,7 – 1,9
medium plus	7,6 – 8,9	1,9 – 2,1
large	8,9 – 10,2	1,9 – 2,1
large plus	8,9 – 10,2	2,1 – 2,3

¹⁾ Handflächenfalte bis distale Fingerfalte
²⁾ am PIP-Gelenk

rechts und links gleich

BORT Capener Schiene Extension
REF 112 520



Pos.Nr. 23.07.03.0012

Med

BORT DigiSoft®-Fingerorthese
REF 112 770



Pos.Nr. 23.07.01.0002

Med

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische Quengelschiene zur Mobilisierung der Interphalangealgelenke
- Zwei seitliche Spiralfedern

PRODUKTMERKMALE

- Fingerorthese zur Ruhigstellung der Interphalangealgelenke
- Alu-Schiene, anformbar mit weicher Polsterung
- **Auch für Kinder**, s. Seite 30

FARBE: weiß

FARBE: grau

DAS MED-PLUS

- Klettband zur besseren Fixierung
- Weiche Abpolsterung
- Progressive Federkraft

DAS MED-PLUS


- Fixierung von wahlweise einem oder zwei Fingern
- Dorsale Anlage nach Umformung möglich
- Klettverschlüsse, an Mittelhand und Fingern variabel positionierbar

INDIKATIONEN

Postoperative, posttraumatische Extension der PIP-Gelenke


INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. zur Redression, Lagerung, Ruhigstellung der Interphalangealgelenke

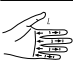GRÖSSEN	Länge ¹⁾
 small	6,3 – 7,0 cm
medium	7,0 – 7,6 cm
large	7,6 – 8,0 cm

¹⁾ Länge (L) = Handflächenfalte bis distale Fingerfalte

rechts und links gleich

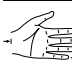GRÖSSEN	Länge Hand
 Kinder	11 – 14 cm
Größe 1	13 – 16 cm
Größe 2	16 – 19 cm
Größe 3	19 – 22 cm

rechts und links gleich

**BORT SellaFlex Sport
Daumenstütze****[REF]** 112 030 SP

Sport

Pos.Nr. 05.07.01.0034

COOLMAX®**PRODUKTMERKMALE**

- Flexible Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk durch integrierte Verstärkungselemente und zusätzlichem Stabilo®-Band
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- **Latexfreies Gestrick**
- Einfache Fixierung mittels **easyClick-System**

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, **beginnende Rhizarthrose**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 13 cm
	small	_____	13 – 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links geben

**BORT
Daumenschiene Sport****[REF]** 112 180 SP

Sport

Pos.Nr. 23.07.01.1062

PRODUKTMERKMALE

- Daumenorthese zur Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Unterstützend bei Belastungssituationen

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Kompletz zu öffnen
- Auch nachts zu tragen
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	13 – 15 cm
	small	_____	15 – 17 cm
	medium	_____	17 – 19 cm
	large	_____	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaFlex
Daumenstütze**
REF 112 030



Pos.Nr. 05.07.01.0033

**BORT
Daumen-Hand-Bandage**
REF 112 420



Pos.Nr. 05.07.01.0004

PRODUKTMERKMALE

- Flexible Handgelenkbandage zur Stützung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Anatomisch formgestrickt
- Zusätzliche Stabilisierungselemente am Daumen

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Abgekettelter, weicher Abschlussrand
- Flache Bauweise, trägt nicht auf
- Sehr angenehme Trageeigenschaft

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit Daumeneinschluss zur Stützung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks und Stabilisierung des Handgelenks
- Schlankes Stabilisierungselement aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Besonders leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, **beginnende Rhizarthrose**

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. nach Frakturen im Spätstadium, Arthritis, ulnare und radiale Bandläsionen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	_____	bis 13 cm
	small	_____	13 – 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	_____	bis 15 cm
	medium	_____	15 – 17 cm
	large	_____	17 – 19 cm
	x-large	_____	19 – 21 cm

rechts und links gleich

BORT SOFT
Daumen-Schiene kurz
[REF] 112 710



Pos.Nr. 23.07.01.1010

Med

BORT SOFT
Daumen-Schiene lang
[REF] 112 720



Pos.Nr. 23.07.01.1011

Med

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 11 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm

FARBEN: ■ beige ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, **Rhizarthrose**

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, entzündlich, wie z. B. bei Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, **Rhizarthrose**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts und links gleich

BORT SOFT
Daumen-Schiene plus
REF 112 780



Pos.Nr. 23.07.01.2004

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks, Daumensattelgelenks und Daumenendgelenks
- Weiches Innenpolster
- Langes integriertes Stabilisierungselement bis zum Handgelenkbereich, anatomisch vorgeformt

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Verlängertes Daumenteil mit Klettverschluss
- Freie Beweglichkeit der Finger
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain, **Rhizarthrose**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts und links gleich

BORT
SellaXpress kurz
REF 112 840



Pos.Nr. 23.07.01.1034

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandläsionen, Distorsion, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen wie z. B. **Rhizarthrose**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	13 – 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT
SellaXpress lang
REF 112 880



Pos.Nr. 23.07.01.1045

BORT
SellaXpress plus
REF 112 860



Pos.Nr. 23.07.01.2006

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumensattel- und Daumengrundgelenks
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Spezielle Führung am Daumenrohr
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Handgelenksübergreifende lange Schiene
- Individuell formschlüssige Anlage, kalt verformbar
- Hautfreundlicher Velours mit angenehmem Tragegefühl

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z.B. nach Daumenfraktur, Arthritis, Arthrose des Sattel- und/oder Grundgelenks, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens, Spätstadium nach Sehnenrekonstruktion, Tendopathie, zur kontrollierten Mobilisierung bei **Rhizarthrose**, Skidaumen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks plus Endgelenk
- Integriertes Stabilisierungselement aus Aluminium
- Extra dünne Bauweise
- Weiche Polsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stabilisierung einschließlich des Daumengelenks
- Individuell anpassbar, kalt verformbar
- Angenehmes Tragegefühl durch extra weiche Polsterung
- Hautfreundlicher Velours

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Sehnenrekonstruktion, Ruhigstellung bei degenerativen Prozessen wie Morbus de Quervain und bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, wie z. B. **Rhizarthrose**, Tendopathie

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT Generation Daumenschiene

REF 215 300



Pos.Nr. 23.07.01.1046

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Entnehmbare Stabilisierungselemente bis zum Handgelenk, anatomisch vorgeformt
- Länge: ca. 14 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschleufe für extra sicheren Halt
- Zur Verwendung in Kombination mit Gehhilfe/Rollator geeignet
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, **Rhizarthrose, degenerativ, entzündlich**, z. B. Arthritis, ulnare/radiale Bandverletzung des Daumens

GRÖSSEN



Größe	Umfang Handgelenk
small	13 – 16 cm
medium	16 – 19 cm
large	19 – 22 cm

rechts oder links angeben

BORT RhizoFlex® Daumen-Ringorthese**REF** 105 100

Pos.Nr. 23.07.01.1050

Daumen

PRODUKTMERKMALE

- Daumen-Ringorthese zur Stabilisierung und Entlastung des Daumensattelgelenks
- Positionierung des Daumens in Funktionsstellung
- Integriertes, kalt anformbares Stabilisierungselement
- Austauschbares Verschlussband
- Optimaler Tragekomfort
- Einfaches Anlegen

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Extrem schlankes und funktionelles Orthesendesign
- Freie Beweglichkeit der Finger und des Handgelenks
- **Abwaschbar, besonders strapazierfähig**

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch oder degenerative Reizzustände im Bereich des Daumensattelgelenks, z. B. Arthrose am CMC-I-Gelenk (Daumensattelgelenk), postoperativ nach Arthroplastik des CMC-I-Gelenks, Instabilität des CMC-I-Gelenks

GRÖSSEN

Umfang Mittelhand



Größe 0	_____	15 – 17 cm
Größe 1	_____	17 – 19 cm
Größe 2	_____	19 – 22 cm
Größe 3	_____	22 – 26 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaFix® K

REF 112 080



Pos.Nr. 23.07.01.1018

PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Großflächige Perforation

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Freie Beweglichkeit des Handgelenks (kurze Ausführung)
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® N
Mittelhand-Daumenschiene**

REF 112 040



Pos.Nr. 23.07.01.1019

PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Klettverschluss, verstellbar
- Großflächige Perforation

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Individuelle Anpassung
- Angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-Daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen (Rhizarthrose)

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT SellaFix® N
Black Edition****REF** 112 040 B

Med

Pos.Nr. 23.07.01.1019

BORT SellaDur®**REF** 105 400

Med

Pos.Nr. 23.07.01.1016

PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastische Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Innovatives Verschluss-System zur optimalen Anpassung an die Gegebenheiten des Patienten
- Schlanke Bauweise

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Hoher Tragekomfort durch den Einsatz innovativer Materialien
- Abwaschbar

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung des Daumengrundgelenks und Daumensattelgelenks
- Speziell hochgezogener Rand im kritischen Bereich Daumen-Zeigefinger
- Elastischer Unterziehstrumpf

FARBE: ■ anthrazit

DAS MED-PLUS

- Extrem strapazierfähige Orthese
- Großflächige Perforation für angenehmen Tragekomfort
- Abwaschbar

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen wie z. B. Rhizarthrose, Bandläsion (Ski-Daumen)

INDIKATIONEN

Posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Distorsion, Kontusion, Bandläsion (Ski-Daumen), Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose

GRÖSSEN Umfang Mittelhand



x-small	18 – 20 cm
small	20 – 22 cm
medium	22 – 24 cm
large	24 – 26 cm
x-large	26 – 28 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT Generation Daumen-Handorthese

REF 215 200



Generation



Pos.Nr. 23.07.02.2033

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Weiches Innenpolster
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Variabel einstellbares Daumenband mit Umkehrschlaufe für sicheren Halt
- Ansprechendes, funktionelles Design

**BORT Generation:**
Für mehr Mobilität im Alter

Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, z. B. Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT
SellaTex® Classic
[REF] 112 050 C


Med

Pos.Nr. 23.07.02.2007

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schiene zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Dorsale Daumenschiene zur zusätzlichen Stabilisierung des Daumens
- Länge: ca. 20 cm
- **Auch für Kinder**, s. Seite 30

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Extra flache Bauweise
- Atmungsaktives Material
- Angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, degenerativen Erkrankungen, z. B. Morbus de Quervain, CTS

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	Kinder	___	13 – 15 cm
	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT
SellaTex®
[REF] 112 050


Med

Pos.Nr. 23.07.02.2007

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit zusätzlicher Immobilisierung des Daumengrund- und Daumensattelgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Komplett zu öffnen
- Länge: ca. 19 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- **Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar**
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. CTS

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT SellaTex® Plus**REF** 112 160

Med

Pos.Nr. 23.07.02.2039

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur Stabilisierung des Daumengrund-, Daumensattel- und Daumenendgelenks
- Volare und dorsale Schienen zur Stabilisierung des Handgelenks und der Mittelhand
- Kompletz zu öffnen
- Länge: ca. 19 cm

DAS MED-PLUS

- **Langes Daumenelement individuell positionierbar, anformbar, komplett abnehmbar**
- Angenehmes Tragegefühl
- Stabilo®-Band

FARBE: ■ grau

INDIKATIONEN

Präoperativ, posttraumatisch, postoperativ, z. B. nach Bandrekonstruktion am Daumen, Ruhigstellung bei rheumatisch-entzündlichen Prozessen, Rhizarthrose, bei degenerativen Erkrankungen, z. B. Morbus de Quervain, CTS

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT Daumen-Handorthese**REF** 103 500

Pos.Nr. 23.07.02.5007

Daumen

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese zur sicheren Immobilisierung von Hand-, Daumen- grund- und Daumensattelgelenk
- Ulnarseitige Orthesenlängen: x-small: 17 cm, small: 19 cm, medium: 22 cm, large: 26 cm
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Perforiertes thermoplastisches Material zur einfachen Anformung
- Inkl. Unterziehstrumpf

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- **Komplett zu öffnen**
- Röntgentransparent
- Angenehmes Tragegefühl
- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Abwaschbar

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. bei Karpaltunnelsyndrom (CTS), stabile Kahnbeinfraktur, stabile Radiusfraktur, ulnare Bandläsion (Skidaumen), Tendopathie, Kapselzerrungen

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk

Größe	Umfang Handgelenk
x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 22 cm

rechts oder links angeben

Alles im Griff:
mehr funktionelle Stabilität
für das Handgelenk.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select* ManuZip® volar 112 220	ManuBasic® Sport 112 920 SP	ManuBasic® 112 920 ManuBasic® Plus 112 940	Handgelenk- stütze mit Alu-Schiene 103 300 Generation Handgelenk- bandage 215 000	ManuStabil® 102 200 ManuStabil® Classic 102 200 C ManuStabil® kurz 112 730	SOFT Volare CTS- Schiene 112 750	Generation Handgelenk- orthese 215 100 Generation Handgelenk- orthese mit Schnürung 215 150	ManuCarpal® Combi 102 400	Dorsale Intrinsic Plus Schiene (D.I.P.S.) 102 500	ManuDisc® 102 300	Unterarm- Hand- orthese 103 600
Seite	S. 82	S. 83	S. 83/84	S. 86/87	S. 90/91	S. 92	S. 88	S. 94	S. 95	S. 93	S. 95
Reizzustände	●	●		●							
entzündlich-rheumatisch				●			●				
degenerativ				●			●				
Distorsion	●	●	●	●		●					●
Arthrose der Handwurzel	●	●	●	●			●			●	
Karpaltunnelsyndrom (CTS)				●	●	●	●	●		●	●
Tendovaginitis	●	●	●	●	●		●	●			
Discusverletzung										●	●
(Postoperative) Ruhigstellung					●	●		●		●	●
Periphere Nervenlähmung					●			●			
Mittelhand-/Fingergrundglied- frakturen									●		
Bandverletzungen d. Langfinger									●		



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, anatomisch vorgeformt
- Stabilo®-Band, frei positionierbar
- Viscoelastische Silikonpelotte zur intermittierenden Massage
- Anatomisch formgestrickt

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- Reißverschluss im Handrückenbereich, dadurch sehr komfortables An- und Ablegen
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Integrierte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit zusätzlichem Stabilo®-Band
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Anatomisch formgestrickt
- Volare Kunststoff-Schiene, thermoplastisch, anatomisch vorgeformt
- Viscoelastische Silikonpelotte

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und Unterarms, dadurch sehr leichtes Anlegen
- Einfache Fixierung und Längeneinstellung des Stabilo®-Bandes mittels **easyClick-System**

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 13 cm
small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT ManuBasic®**REF** 112 920

Pos.Nr. 05.07.02.0130

PRODUKTMERKMALE


- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- **Stabilo®-Band**, frei positionierbar
- **Silikonpelotte** mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

DAS BASIC-PLUS

- Extra elastisch im Bereich des Handgelenks und des Unterarms, dadurch besonders leichtes Anlegen
- Besonders weicher Abschlussrand im Unterarmbereich
- **Plus-Größen-System**, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: beige silber schwarz**INDIKATIONEN**

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

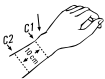GRÖSSEN	c1-Maß	c2-Maß		c1-Maß	c2-Maß
 x-small	_ bis 13	14 – 16 cm	large plus	_ 17 – 19	22 – 24 cm
small	_ 13 – 15	16 – 18 cm	x-large	_ 19 – 21	22 – 24 cm
small plus	_ 13 – 15	18 – 20 cm	x-large plus	_ 19 – 21	24 – 26 cm
medium	_ 15 – 17	18 – 20 cm	xx-large	_ 21 – 23	24 – 26 cm
medium plus	_ 15 – 17	20 – 22 cm	xx-large plus	_ 21 – 23	26 – 28 cm
large	_ 17 – 19	20 – 22 cm			

rechts oder links angeben

**BORT ManuBasic® Plus
mit Daumeneinschluss**
REF 112 940



Pos.Nr. 05.07.02.0150

BORT ManuZip® Eco
REF 112 620



Pos.Nr. 05.07.02.0138

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage mit zusätzlicher Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- SOFTflex-Gestrick für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anformbar
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris


FARBE: ■ schwarz

DAS BASIC-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks und des Daumensattelgelenks, Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis, bei ulnarer und radialer Bandinstabilität, **beginnende Rhizarthrose**

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte
- Anatomisch formgestrickt


FARBEN: ■ beige ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- **Verlängerter Reißverschluss** bis zum Daumen, dadurch sehr komfortables Anlegen

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 small	13 – 15 cm
medium	15 – 17 cm
large	17 – 19 cm
x-large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT activemed
Handgelenkbandage****REF** 220 100

Med

Pos.Nr. 05.07.02.0145

**BORT
Ganglion-Bandage****REF** 112 820

Med

Pos.Nr. 05.07.02.0151

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBEN: beige mineralgrau
 graphit

DAS MED-PLUS

- Nahtfreie Dehnzone im Kommissurbereich, fasst den Daumenansatz ein und passt sich den anatomischen Gegebenheiten an

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch
- Stabilo®-Band zur zusätzlichen Stabilisierung des Handgelenks
- Silikonpelotte mit Aussparung am Processus styloideus ulnaris

FARBE: beige

DAS MED-PLUS

- **Ganglion-Pelotte, frei positionierbar**

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, intracapsuläres Ganglion

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



small	___	13 – 15 cm
medium	___	15 – 17 cm
large	___	17 – 19 cm
x-large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

**BORT Handgelenkstütze mit Alu-Schiene
(Medianus-Schiene)****REF** 103 300

Med

Pos.Nr. 05.07.02.3013

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenkbandage
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Länge: 16 cm

DAS MED-PLUS

- Leichtes Anlegen/Abnehmen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse



FARBEN:  beige  grau
 schwarz

BORT Handgelenkstütze mit Alu-Schiene und Band**REF** 103 301

Pos.Nr. 05.07.02.3032

- Ausführung wie **REF** 103 300

- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band

FARBEN:  beige  grau

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT Generation Handgelenkbandage

REF 215 000

NEU



Generation



Pos.Nr. 05.07.02.3043

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkbandage mit volarer Verstärkung
- Elastisches Basismaterial
- Volare Schiene, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/ Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen


Hand

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, **Handwurzelarthrose**, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Rheuma, Tendovaginitis

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk

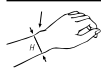

small	_____	13 – 16 cm
medium	_____	16 – 19 cm
large	_____	19 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT Generation Handgelenkorthese mit Schnürung
REF 215 150



Generation

Pos.Nr. 23.07.02.4067

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Weiches Innenpolster

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Praktische Schnürung ermöglicht einfache und sichere Handhabung
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen

BORT Generation Handgelenkorthese
REF 215 100



Generation

Pos.Nr. 23.07.02.4054

PRODUKTMERKMALE

- Gepolsterte Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkung
- Schienen individuell anformbar und entnehmbar
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material


FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS


- Innovativer Verschlusszügel ermöglicht das Anlegen mit einer Hand
- Speziell abgepolsterte Zone im palmaren Bereich ermöglicht Verwendung in Kombination mit Gehhilfen/Rollator
- Ansprechendes, funktionelles Design
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, **Handwurzelarthrosen, entzündlich-rheumatische, degenerative Erkrankungen**, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	___ bis 15 cm
small	___ 15 – 17 cm
medium	___ 17 – 19 cm
large	___ 19 – 21 cm
x-large	___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT Arm- und Handgelenkstütze**REF** 103 360

Pos.Nr. 05.07.02.3014

BORT Arm- und Handgelenkschiene**REF** 103 580

Pos.Nr. 05.07.02.3015

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenk-Unterarm-bandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN: beige grau

DAS MED-PLUS

- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichte An-/Ablage, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Handgelenk-Unterarm-bandage zur Stützung des Handgelenks
- Volare Alu-Schiene, individuell anformbar, in strapazierfähiger Tasche
- Klettverschlussstreifen auf dem Handrücken
- Länge: 22 cm

FARBEN: beige grau


DAS MED-PLUS

- **Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band**
- Verlängerte Alu-Schiene, dadurch bessere Stabilisierung
- Leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit durch integrierte Schlupfhilfe und dorsale Klettverschlüsse

INDIKATIONEN


Chronische, posttraumatische oder postoperative Reizzustände im Bereich des Handgelenks, z. B. Distorsion, Handwurzelarthrose, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

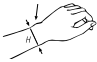GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	_____ bis 15 cm
small	_____ 15 – 17 cm
medium	_____ 17 – 19 cm
large	_____ 19 – 21 cm
x-large	_____ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	_____ bis 15 cm
small	_____ 15 – 17 cm
medium	_____ 17 – 19 cm
large	_____ 19 – 21 cm
x-large	_____ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- Rechte und linke Ausführung
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Sehr gute Stabilisierung des Handgelenks durch verlängerte Ausführung und spezielle Verschluss technik
- Auch nachts zu tragen

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives Material
- **Komplett zu öffnen**
- Rechts und links anwendbar
- Lange Ausführung
- Länge: ca. 22 cm

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Individuell anformbar
- Zirkuläres Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

GRÖSSEN Umfang Handgelenk



x-small	___	bis 15 cm
small	___	15 – 17 cm
medium	___	17 – 19 cm
large	___	19 – 21 cm
x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

rechts und links gleich

**BORT
ManuStabil® kurz**
[REF] 112 730


Med

Pos.Nr. 23.07.02.4019

PRODUKTMERKMALE

- Feste Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene, individuell anformbar
- Kurze Ausführung
- Länge: ca. 18 cm
- Auch für Kinder, s. Seite 31

FARBEN: ■ beige ■ grau ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch z. B. Distorsion, degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	Kinder (nur grau) ___ 13 – 15 cm
	x-small ___ bis 15 cm
	small ___ 15 – 17 cm
	medium ___ 17 – 19 cm
	large ___ 19 – 21 cm
	x-large ___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

**BORT ManuStabilPro
offene Form**
[REF] 182 500


Med

Pos.Nr. 23.07.02.0014

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit volarer und dorsaler Verstärkungsschiene
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- **Komplett zu öffnen**
- Extra lange Ausführung
- Länge: ca. 25 cm

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Individuell leicht anformbar
- Stabilisierung des Handgelenks und Unterarms
- Leichte Anlage, auch postoperativ
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small ___ bis 16 cm
	small ___ 16 – 18 cm
	medium ___ 18 – 20 cm
	large ___ 20 – 22 cm
	x-large ___ 22 – 24 cm

rechts oder links angeben

**BORT SOFT Volare
CTS-Schiene****REF** 112 750

Pos.Nr. 23.07.02.0012

PRODUKTMERKMALE

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

**BORT SOFT Dorsale
CTS-Schiene****REF** 112 760

Pos.Nr. 23.07.02.0013

PRODUKTMERKMALE

- Weiche, dorsale Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks
- Palmarbügel
- Schiene und Verschlussbänder, extra soft gepolstert
- Fixierung mit drei Klettverschlüssen
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Erhaltung der Greiffähigkeit
- Leicht nachformbar
- Leichtes und angenehmes Tragegefühl
- Auch nachts zu tragen

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z.B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion

GRÖSSEN Umfang Handgelenk


	x-small	13 – 15 cm
	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm
	x-large	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	15 – 17 cm
	medium	17 – 19 cm
	large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

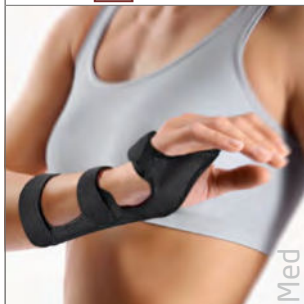**BORT
ManuCarpal®-Orthese**
REF 103 200


Pos.Nr. 23.07.02.4018

Med

BORT ManuDisc®

nach Dr. Schütz

REF 102 300


Pos.Nr. 23.07.02.4017

Med

PRODUKTMERKMALE

- Thermoplastisch anformbare volare Handorthese
- Vollflächige Polsterung
- Großflächige Auflage mit bilateraler Umgreifung des Unterarms
- Extra leichte Bauweise
- Abwaschbar

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Thermoplastisch nachformbar (Warmluft)
- Einfache Handhabung und Positionierung durch den Patienten
- Komplett zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. **Karpaltunnelsyndrom (CTS)**, Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	___ 15 – 17 cm
	medium	___ 17 – 19 cm
	large	___ 19 – 21 cm
	x-large	___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkorthese mit multidirektionaler Stabilisierung des Handgelenks
- Ulnare Umgreifung und bilaterale Abstützung am Unterarm
- Individuell anformbar
- Vollflächige und weiche Polsterung auf der Innenseite

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Dünnwandige Konstruktion mit volarer T-Schiene
- Komplett zu öffnen
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Discusverletzung, Handwurzelarthrose

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	___ 15 – 17 cm
	medium	___ 17 – 19 cm
	large	___ 19 – 21 cm
	x-large	___ 21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT ManuCarpal® Combi

REF 102 400



Med

Pos.Nr. 23.07.02.1012

PRODUKTMERKMALE

- Handorthese mit abnehmbarer Fingerauflage
- Fingerauflage, individuell anformbar
- Kompletzt zu öffnen
- Rechts und links anwendbar

DAS MED-PLUS

- **Modulares Orthesen-System**
- Zusätzliche Entlastung des Karpaltunnels bei Einsatz der Fingerauflage
- Zirkuläres Band zur effektiven Stabilisierung des Handgelenks

FARBE: ■ grau



- Funktionell geformtes Entlastungspolster aus Memory-Schaum
- Entlastung des Karpaltunnels und des empfindlichen Narbenbereichs (Z. n. OP)
- Angenehmes Tragegefühl

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis, periphere Nervenlähmung

GRÖSSEN

Umfang Handgelenk



x-small	_____	bis 15 cm
small	_____	15 – 17 cm
medium	_____	17 – 19 cm
large	_____	19 – 21 cm
x-large	_____	21 – 23 cm

rechts und links gleich

BORT Unterarm-Handorthese

REF 103 600




Med

Pos.Nr. 23.07.02.5009

BORT Dorsale Intrinsic Plus Schiene (D.I.P.S.)

REF 102 500

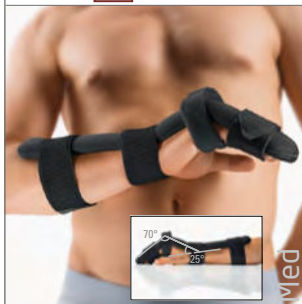

Med

Pos.Nr. 23.07.02.1016

PRODUKTMERKMALE

- Stabile, zirkulär umgreifende Unterarm-Handorthese zur kompletten Ruhigstellung des Handgelenks bei freier Fingerbeweglichkeit
- Perforiertes thermoplastisches nachformbares Material (Warmluft)
- Innenseite vollflächig mit weichem Schaum kaschiert
- Unterziehstrumpf für angenehmen Tragekomfort
- Orthesenlänge: x-small 17 cm, small 23 cm, medium 25 cm und large 28 cm

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung
- Röntgentransparent
- Kompletz zu öffnen
- Angenehmes Tragegefühl, abwaschbar

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Distorsion, Discusverletzung, nach Frakturen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 22 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkschiene zur Immobilisierung mit Fingerfixierung
- Optimale Vorformung der Schiene in Intrinsic Plus-Stellung
 - 25° Streckung im Handgelenk
 - 70° Beugung Fingergrundgelenke
- Zwei elastische Klettverschlüsse im Unterarmbereich, jeweils ein unelastischer Klettverschluss im Grundgelenkbereich der Hand sowie im Bereich der Fingerglieder
- Einfache postoperative Anwendung durch anatomische Vorformung

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Immobilisierende Anlage von dorsal
- Vermeidung von Kontrakturen der Langfinger
- Frühzeitige Mobilisierung der Langfinger durch Faustschluss möglich

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Mittelhand- und Fingergrundgliedfrakturen im Bereich der Langfinger (z. B. Boxer-Fraktur), Bandverletzungen der Langfinger im Bereich der Grundgelenke, Verletzungen und Erkrankungen die eine Ruhigstellung der Langfinger notwendig machen (z. B. Infektionen)

GRÖSSEN Länge Hand

	Größe 1	___	14 – 17 cm
	Größe 2	___	17 – 22 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Fingerfixierung
- Alu-Schiene lang, einteilig, individuell anformbar
- Integrierte Schlupfhilfe
- Angenehmes Tragegefühl durch atmungsaktives Material

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Leichtes Anlegen, auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Auch nachts zu tragen

PRODUKTMERKMALE

- Weiche, volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Breite Fingerauflage, Daumeneinfassung, individuell anformbar
- Vier Klettverschlüsse zur großflächigen Fixierung der Schiene
- Extra weiche Abpolsterung
- Latexfrei

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS


- Einfache Fixierung des Daumens
- Sichere und bequeme Lagerung bei Tag und Nacht

INDIKATIONEN


Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), Tendovaginitis

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	bis 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm
x-large	21 – 23 cm


rechts oder links angeben

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	13 – 15 cm
small	15 – 17 cm
medium	17 – 19 cm
large	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

BORT Volare Lagerungsschiene**REF** 103 100

Pos.Nr. 23.07.02.3016

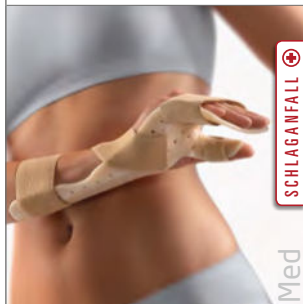BORT Pareseschiene**REF** 103 700

SCHLAGANFALL

Pos.Nr. 23.07.02.3019

PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Stabilisierungselement, anformbar
- Polsterung aus weichem Schaum

FARBE: ■ anthrazit

DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung ohne Werkzeug
- Extra leichte Bauweise
- Unterarm-Handauflage mit hautfreundlichem Textilbezug

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, degenerativ, z. B. Karpaltunnelsyndrom (CTS), bei Lähmungen, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen, Distorsion

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Volare Lagerungsschiene zur Ruhigstellung des Handgelenks mit Finger- und Daumenfixierung
- Thermoplastisches Material
- Innenseite vollflächig mit Textil beflocht
- Abwaschbar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Einfache, individuelle Anpassung mittels Heißluftfön bei 60 °C
- Vom Patienten selbst leicht anzulegen

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Karpaltunnelsyndrom (CTS), **Handparesen**, bei entzündlichen und rheumatischen Erkrankungen

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	x-small	___	bis 15 cm
	small	___	15 – 17 cm
	medium	___	17 – 19 cm
	large	___	19 – 21 cm
	x-large	___	21 – 23 cm

rechts oder links angeben

BORT Handgelenkstütze mit eingefasster Daumenaussparung [REF] 112 020



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung des Handgelenks
- Optimierte Passform im Palmarbereich
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenaussparung

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS

- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

BORT Handgelenkstütze mit Daumenaussparung [REF] 112 120



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur Stabilisierung von Handgelenk und Mittelhand
- Zusätzlich: Stabilo®-Band, abnehmbar und frei positionierbar


FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS


- Einfache Anwendung
- Rechts und links einsetzbar

INDIKATIONEN

Leichte Distorsionen, Zerrung, nach Gipsverband, Tendovaginitis

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	_____ bis 13 cm
small	_____ 13 – 15 cm
medium	_____ 15 – 17 cm
large	_____ 17 – 19 cm
x-large	_____ 19 – 21 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Handgelenk
 x-small	_____ bis 13 cm
small	_____ 13 – 15 cm
medium	_____ 15 – 17 cm
large	_____ 17 – 19 cm
x-large	_____ 19 – 21 cm

rechts und links gleich

BORT Handgelenkbandage mit Klettverschluss**REF** 112 110

Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

FARBEN: beige schwarz bunt

DAS MED-PLUS

- Einfaches Anlegen

BORT Stabilo® Handgelenkbandage**REF** 112 010

Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Handgelenkbandage mit Stabilo®-Band
- Klettverschluss
- Breite: 8 cm

FARBEN: beige schwarz weiß mit blauem Band


DAS MED-PLUS

- Zusätzliche Stabilisierung durch Stabilo®-Band
- Einfaches Anlegen

ANWENDUNG

Leichte Unterstützung des Handgelenks

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

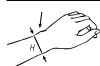

Größe 1 ____ bis 17 cm
 Größe 2 ____ 17 – 19 cm
 Größe 3 ____ 19 – 22 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Handgelenk




Größe 1 ____ bis 17 cm
 Größe 2 ____ 17 – 19 cm
 Größe 3 ____ 19 – 22 cm

rechts und links gleich

Für einen starken Rücken:
korrigieren, stabilisieren,
entlasten.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	Gerade- halter Sport 104 660 SP	select® Stabilo® 104 710 104 740	Stabilo- Basic Sport 104 690 SP 104 680 SP	Generation Rücken- bandage 215 850	Stabilo® ISG- Orthese 104 750	VarioPlus spezialweit 112 690	Lumbo Xpress Rücken- bandage 112 600	select® LWS- Orthese 104 700	Generation Rücken- orthese 215 800	Stabilo® FA Rücken- orthese 180 500	Stabilo® Rücken- orthese lumbal 180 100	Stabilo- Plus Rücken- bandage 104 730	Stabilo® Überbrü- ckungs- orthese 104 760	Generation Osteoporose- Orthese 215 870 Generation Dynamische Osteoporose- Orthese 215 880
Seite	S. 103	S. 105	S. 106/108	S. 113	S. 112	S. 109	S. 111	S. 103	S. 113	S. 117	S. 116	S. 114	S. 115	S. 118/119
Haltungskorrektur BWS	●				●									
ISG-Syndrom					●									
Lumbago		●	●	●		●	●							
Spondylolysen		●				●	●		●					
LWS-Syndrom		●				●	●							
Lumbalgie			●	●			●		●					
Ischialgie			●						●					
Facettengelenkarthrose									●					
Prolaps (konservativ/Post-OP)								●				●	●	●
Osteoporose								●	●			●		●
Wirbelfrakturen LWS											●		●	
Degenerative, lumbale Veränderungen				●					●					

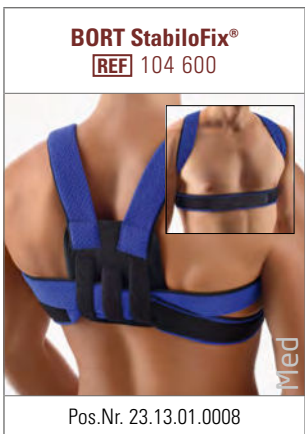

PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Haltungskorrektur der Brustwirbelsäule
- Weiches, unelastisches Gurtmaterial
- Auch für Kinder, s. Seite 29


FARBEN: ■ blau □ weiß

DAS MED-PLUS

- Verschluss im Brustbereich ermöglicht selbstständiges An- und Ablegen
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Einfaches Kürzen des Gurtes durch vorhandene Abnäher
- Latexfrei

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS

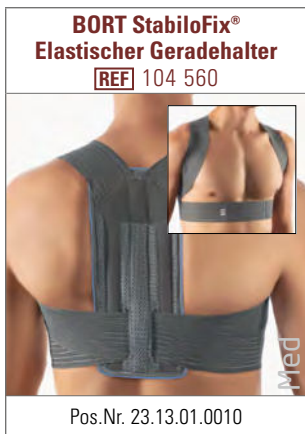

PRODUKTMERKMALE

- Elastischer Geradehalter zur aktiven Aufrichtung der Brustwirbelsäule
- Atmungsaktives, hautfreundliches Material
- Schlankes Design, trägt nicht auf

FARBEN: □ weiß ■ grau


DAS MED-PLUS

- Individuelle Anpassung dank einstellbarer elastischer Gurte
- Einfaches Anlegen nach dem Rucksackprinzip


INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

GRÖSSEN Unterbrustumfang

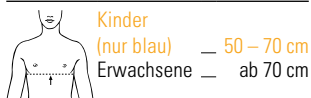


GRÖSSEN Unterbrustumfang

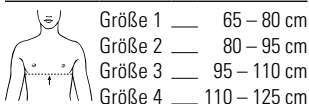

BORT Geradehalter Sport

REF 104 660 SP

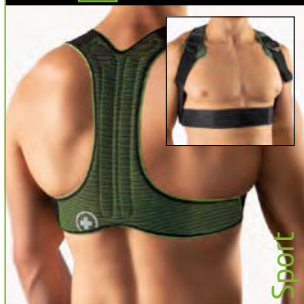

Pos.Nr. 23.13.01.0013

Sport

PRODUKTMERKMALE

- Geradehalter zur Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule
- **Aufrichtung über Rucksackprinzip**
- Besonders einfaches An- und Ablegen

FARBE: ■ schwarz/grün


DAS SPORT-PLUS

- Freie Beweglichkeit der Schulterblätter durch schlankes Design
- Körperformschlüssige Anlage, insbesondere im kritischen Achselbereich
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

INDIKATIONEN

Aufrichtung und Entlastung der Brustwirbelsäule, z. B. Fehlhaltung der BWS, Dorsalgien (Schmerzen im Bereich der Brustwirbelsäule)

GRÖSSEN

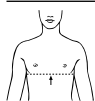

Größe	Unterbrustumumfang
Größe 1	65 – 80 cm
Größe 2	80 – 95 cm
Größe 3	95 – 110 cm
Größe 4	110 – 125 cm

BORT select* LWS-Orthese zur Mobilisierung

REF 104 700



Pos.Nr. 23.14.02.0019

select*

PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur funktionellen Mobilisierung der LWS
- Zwei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Dosierbarer Stütz- und Entlastungseffekt durch unelastische Zuggurtung
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber


DAS SELECT-PLUS

- **Abnehmbare Zügelung** zur Anpassung an den Therapieverlauf
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgien, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf), Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps

GRÖSSEN

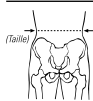


Größe	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm



PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: ■ silber
 ■ schwarz

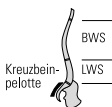


DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Hochwertige viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBEN: ■ silber
 ■ schwarz

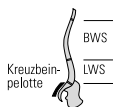

DAS SELECT-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

GRÖSSEN Umfang Taille




Größe 0	60 – 70 cm
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm

**BORT select® Stabilo®
Rückenbandage mit Pelotte**
REF 104 710


Pos.Nr. 23.14.03.3051

PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

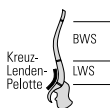FARBEN: ■ silber
 ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN
Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

**BORT select® Stabilo® Lady
Rückenbandage mit Pelotte**
REF 104 740


Pos.Nr. 23.14.03.3051

PRODUKTMERKMALE

- Rückenorthese zur Stabilisierung der LWS
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Drei anatomisch vorgeformte Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuz-Lenden-Pelotte
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

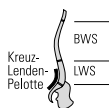FARBEN: ■ silber
 ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS


- Kreuzzügelsystem mit Umlenkösen erleichtert kräftigen Zug zur Stabilisierung und Entlastung
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte



PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

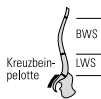


DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- **Latexfreies Gestrick**
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

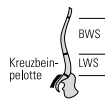

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- **Latexfreies Gestrick**
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Ischialgie, Dorsalgie

GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm




GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 0	60 – 70 cm
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm



BORT Stabilo Basic
Rückenbandage mit Pelotte

REF 104 690

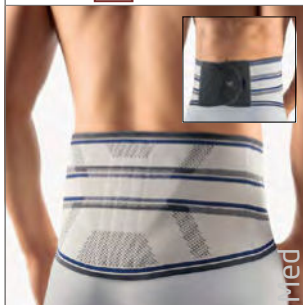

Pos.Nr. 23.14.03.2040

BORT Stabilo Basic Lady
Rückenbandage mit Pelotte

REF 104 680



Pos.Nr. 23.14.03.2040

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm


 FARBEN: beige silber
 schwarz


DAS BASIC-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Aktivbandage, anatomisch formgestrickt
- Taillierter Schnitt: speziell für Damen
- Vier Verstärkungsstäbe
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 24 cm

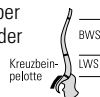 FARBEN: beige silber
 schwarz/flieder


DAS BASIC-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 0	60 – 70 cm
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm

BORT Stabilo **Basic** Rückenbandage spezialweit mit Pelotte

REF 104 670




SPEZIALWEIT

Med

Pos.Nr. 23.14.03.2098

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Anatomisch formgestrickt
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

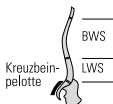

FARBE: ■ silber

DAS BASIC-PLUS

- Zusätzliche elastische Bauchhebel-Zügel zur Entlastung der LWS für **kräftige Leibformen**
- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen
- Atmungsaktives Gestrick




INDIKATIONEN

Schmerzzustände im LWS-Bereich, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), Dorsalgie

GRÖSSEN

Umfang Leib

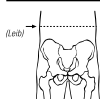

Größe 1	110 – 120 cm
Größe 2	120 – 130 cm
Größe 3	130 – 140 cm
Größe 4	140 – 150 cm
Größe 5	150 – 160 cm

BORT VarioPlus Rückenbandage spezialweit


REF 112 690



Pos.Nr. 23.14.03.3064

BORT Vario Rücken- bandage mit Pelotte

REF 112 610

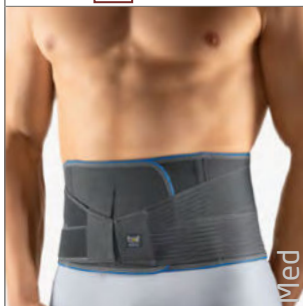


Pos.Nr. 23.14.03.3034

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Rückenbandage für **kräftige Leibformen**
- Teilelastisches Leibteil mit seitlichem Klettverschluss
- Taillierter Schnitt im LWS-Bereich
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Drei Stützstäbe dorsal
- Höhe: Gr. 1 + 2 ventral 24 cm, dorsal 30 cm; Gr. 3 + 4 ventral 28 cm, dorsal 33 cm

FARBE: ■ schwarz

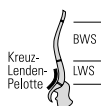


DAS MED-PLUS

- Optimierte Trageeigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Zusätzliche elastische Bauchhebe-Zügel zur Entlastung der LWS
- Robuste Konstruktion

PRODUKTMERKMALE

- Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Unelastischer Lumbalbereich aus atmungsaktivem Textil
- Lumbosacrale Friktionspelotte
- Zwei Verstärkungsstäbe, dorsal
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ grau

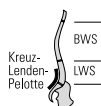

DAS MED-PLUS

- **Verbesserte Passform durch taillierten Schnitt**
- Zusätzliche elastische Zuggurte von dorsal nach ventral

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN

Umfang Leib

	Größe 1	105 – 120 cm
	Größe 2	120 – 135 cm
	Größe 3	135 – 150 cm
	Größe 4	150 – 165 cm

GRÖSSEN

Umfang Taille

	small	bis 89 cm
	medium	89 – 104 cm
	large	104 – 119 cm
	x-large	119 – 134 cm

BORT activemed Rückenbandage
REF 220 800



Pos.Nr. 23.14.03.2079

BORT VarioBasic Rückenbandage mit Pelotte
REF 112 670




Pos.Nr. 23.14.03.2060

PRODUKTMERKMALE

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Viscoelastische Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 23 cm

FARBEN: beige
 mineralgrau
 graphit

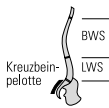


DAS MED-PLUS

- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Hoher Tragekomfort

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Kreuzbein-Pelotte, variabel positionierbar
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt
- Elastische Kreuzzüge
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 26 cm

FARBEN: weiß schwarz

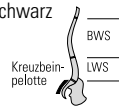

DAS BASIC-PLUS


- Leichte An-/Ablage durch Griffaschen
- Hoher Tragekomfort

BORT VarioBasic Rückenbandage ohne Pelotte
REF 112 650
 Pos.Nr. 23.14.03.0042


INDIKATIONEN

Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich, Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten)

GRÖSSEN	Umfang Taille
Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

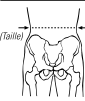

GRÖSSEN	Umfang Taille
small	75 – 89 cm
medium	90 – 105 cm
large	106 – 120 cm
x-large	121 – 140 cm
xx-large	141 – 160 cm

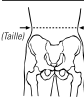

BORT LumboXpress Rückenbandage mit Doppelverschluss


REF 112 600



Pos.Nr. 23.14.03.1043

BORT Rückenbandage für Schwangere

REF 104 580

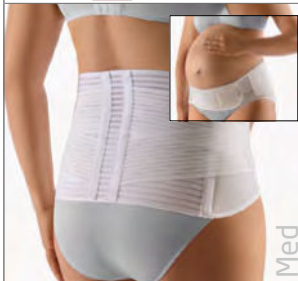Pos.Nr. 23.14.03.1037
Zuzahlungsfrei für Schwangere

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Stabilisierung der LWS
- Vier Verstärkungsstäbe dorsal, anatomisch vorgeformt
- Zwei Klettgurte zur sicheren Stabilisierung
- Zwei zusätzliche, elastische Zuggurte von dorsal nach ventral ermöglichen individuelle Dosierung des Drucks
- Höhe: ventral 16 cm, dorsal 26 cm

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Speziell konstruiertes Verschluss-System erleichtert das Anlegen
- Sehr flache Konstruktion, dadurch unter der Kleidung kaum sichtbar

INDIKATIONEN

Behandlung von stärkeren Schmerzzuständen im LWS-Bereich, schwere Lumbalgie, rezidivierende Lumbalgie, Osteochondrose, Spondylarthrose, leichte Lumboischialgie, leichtes radikuläres Syndrom, Spondylolysen ohne Wirbelgleiten, leichte bis mittelgradige lumbale Deformität (degeneratives Wirbelgleiten), nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	—	70 – 80 cm
Größe 2	—	80 – 90 cm
Größe 3	—	90 – 100 cm
Größe 4	—	100 – 110 cm
Größe 5	—	110 – 120 cm
Größe 6	—	120 – 130 cm
Größe 7	—	130 – 140 cm
Größe 8	—	140 – 150 cm

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Rückenbandage zur Entlastung der Lendenwirbelsäule und Unterstützung des Bauches
- Individuelle Regulierung der Weite durch flexibel verstellbare Bänder
- Dünne Federstäbe zur Stabilisierung des Lendenwirbelbereichs
- Höhe dorsal: 21 cm

FARBE: □ weiß

DAS MED-PLUS

- Anpassbar an variierende Bauchumfänge

INDIKATIONEN

Zur Stabilisierung der LWS mit dosierbarem Druck während der Schwangerschaft, zur Behandlung von Schmerzzuständen im LWS-Bereich

GRÖSSEN

Umfang Hüfte



Größe 0	—	75 – 91 cm
Größe 1	—	91 – 105 cm
Größe 2	—	105 – 119 cm
Größe 3	—	119 – 140 cm

BORT
Symphysen-Gürtel
REF 102 700



Pos.Nr. 23.11.01.0006

BORT Stabilo®
ISG-Orthese
REF 104 750



Pos.Nr. 23.11.01.1003

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur Stabilisierung des Beckens
- Individuell einstellbarer Druck auf die Symphyse
- Anatomischer Schnitt
- Gepolsterte Innenseite
- Höhe: ventral 8,5 cm, dorsal 15 cm

FARBE: ■ silber


DAS MED-PLUS

- Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlussstück ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

INDIKATIONEN

Symphyseninsuffizienz, Symphysensprengung, Gefügelockerung des ISG/Symphysis pubica, nach Geburt, stabile Beckenringfraktur

GRÖSSEN Umfang Hüfte

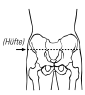	small	___	85 – 95 cm
	medium	___	95 – 105 cm
	large	___	105 – 115 cm
	x-large	___	115 – 125 cm
	xx-large	___	125 – 135 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich.

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenkes
- Spezielles Funktionsgestrick in Kombination von elastischen und unelastischen Zugrichtungen
- Zweigeteilte ISG-Pelotte zur Förderung der Durchblutung und Beschleunigung des Heilungsprozesses
- Zirkuläre Spannung über zusätzliche Zuggurte einstellbar

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Zirkuläre Stabilisierung und Entlastung von Becken und Symphyse
- Schmales Verschlussstück ermöglicht hohen Tragekomfort (z. B. im Sitzen)

INDIKATIONEN

ISG-Arthrose, ISG-Instabilität, ISG-Blockierung, Myalgien und Tendopathien in der Beckenregion, Gefügestörungen nach Spondylodesen an der LWS

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

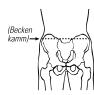	Größe 1	___	70 – 85 cm
	Größe 2	___	85 – 100 cm
	Größe 3	___	100 – 115 cm
	Größe 4	___	115 – 130 cm
	Größe 5	___	130 – 145 cm

**BORT Generation
Rückenbandage**

REF 215 850



Pos.Nr. 23.14.03.3077

**BORT Generation
Rückenorthese**

REF 215 800




Pos.Nr. 23.14.04.1014

PRODUKTMERKMALE

- Rücken-Orthese zur Stabilisierung der LWS
- Integrierte Stabilisierungselemente
- Elastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Viscoelastische Pelotten, variabel positionierbar
- Höhe ventral 17 cm, dorsal 21 cm

FARBE: ■ blau

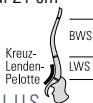

DAS GENERATION-PLUS

- Breite Griffflaschen auf Verschlussplatte
- Innovative leichte Orthesenkonstruktion
- **Kraftsparendes Seilzugsystem**
- Einfach und leicht anzulegen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Degenerative lumbale Veränderungen, leichte bis mittelschwere Lumboischialgie, Bandscheibenvorfall mit leichten Ausfällen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose, radikuläres Reizsyndrom, Zustand nach Bandscheiben-OP

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

PRODUKTMERKMALE

- Wirbelsäulen-Orthese zur Entlastung und Stabilisierung der LWS
- Integrierter Beckenkorb aus Kunststoff
- Elastisches, atmungsaktives Trägermaterial
- Höhen Rückenplatte: 22 cm, 28 cm

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Breite Griffflaschen auf Verschlussplatte
- Innovative Spangenform unterstützt Eigenfixierung der Orthese beim Anlegen
- **Kraftsparendes Seilzugsystem**
- Einfach und leicht anzulegen
- Erleichtertes Anlegen durch ergonomische Verschlussplatte

INDIKATIONEN

Facettensyndrom, Lumboischialgie, Bandscheibenprotrusion/Prolaps, radikuläres Reizsyndrom, **degenerative lumbale Veränderungen**, Zustand nach Bandscheiben-OP, stabile Frakturen, Spondylose, Spondylolisthese, Spinalkanalstenose

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

Höhe 22 cm oder 28 cm angeben

BORT StabiloPlus Rückenbandage**REF** 104 730

Pos.Nr. 23.14.04.0007


PRODUKTMERKMALE

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Aktivierung der Bauchmuskulatur sowie Aufrichtung des Beckens
- Teilelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

DAS MED-PLUS

- Anatomischer Schnitt für passgenauen Sitz, flexible Zone im Hüftbeugebereich
- Stabilisierungsgrad an Therapieverlauf anpassbar
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen

FARBE: ■ ■ ■ silber

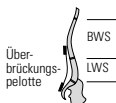**INDIKATIONEN**

Mittelschwere Lumboischialgie mit leichten Ausfällen bei Bandscheibenprotrusionen/ Prolaps, mittelschweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom, Spondylolisthese Grad I mit Lumbalgie, mittelgradige lumbale Deformität (rezidivierende Behandlung, komplizierter Verlauf) Z. n. Bandscheiben-OP mit kleinem bis mittelgroßem Prolaps, Spinalkanalstenose, Instabilitätssyndrom

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

BORT StabiloPlus Überbrückungsorthese**REF** 104 760

Pos.Nr. 23.14.02.1012

PRODUKTMERKMALE

- Lendenwirbelsäule-Orthese zur Überbrückung und Entlastung der LWS
- Stabiler Überbrückungsrahmen in klassischer Spangensform aus Kunststoff, anatomisch vorgeformt, thermoplastisch anpassbar
- Unelastische Stabilisierungszügel, individuell einstellbar
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 32 cm

FARBE: ■ grau **DAS MED-PLUS**

- Hoher Stabilisierungsgrad, an **Therapieverlauf graduell anpassbar (Mobilitätsfunktion)**
- Zusätzliche abdominale Verstärkungsplatte ventral
- Basisbandage mit anatomischem Schnitt für optimale Passform
- Leichtes Anlegen durch Handschlaufen

Rücken

INDIKATIONEN

Schwere Lumboischialgie mit muskulären Ausfällen bei erheblicher Bandscheibenprotrusion/Prolaps, ohne absolute OP-Indikation, schweres radikuläres, pseudo-radikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese Grad II mit rezidivierenden Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität bei Facettensyndrom/Arthrose, Zustand nach BS-OP ohne verbliebene Parese bei ausgeräumter BS, Spinalkanaldekompensation, einetägig, ohne Deformität, BS-OP einetägig, Spinalkanalstenose mit kurzer Gehstrecke ohne wesentliche Paresen, Wirbelfrakturen post-traumatisch geringen Ausmaßes, Deckenplatteneinbrüche der LWS

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

BORT Stabilo® Rückenorthese lumbal**REF** 180 100

BOA



Pos.Nr. 23.14.02.2004

PRODUKTMERKMALE

- Lumbalorthese mit integriertem Beckenkorb aus Kunststoff zur Sicherung der Segmente LWK 1 – LWK 5
- Dosierte Einstellung der Stabilisierung mit BOA® Fit System
- Integrierte Lumbalbandage mit abdominaler Verschlussplatte

DAS MED-PLUS

- Effektive Einschränkung der Rotation der LWS
- Modulare Konstruktion: dem Therapieverlauf nach abrüstbar
- Einfache Anpassung: Einstellung der Lendenlordose durch Kaltverformung möglich

FARBE: ■ grau

INDIKATIONEN

Schwerste Lumboischialgie ohne absolute OP-Indikation, OP-Kontraindikation, bei OP-Ablehnung, schwerstes radikuläres und pseudoradikuläres Lumbalsyndrom (konservativ therapieresistent), Spondylolisthese mit schweren Lumboischialgien, schwere lumbale Deformität mit Hypermobilität bei Facettensyndrom/Arthrose, Z. n. WS-OP, z. B. Fusion dorso-ventral/dorso-lateral, Spinalkanaldekompensation (einetagig mit Deformität und mehretagig), BS-OP mit großem Prolaps/lumbaler Instabilität, Spinalkanalstenosen mit Paresen, Wirbelfrakturen posttraumatisch mit erheblichem Wirbelkörperschaden

GRÖSSEN

Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

BORT Stabilo® FA Rückenorthese**REF** 180 500

Med

Pos.Nr. 23.14.04.0037

PRODUKTMERKMALE

- Lumbal-Orthese zur Teilentlastung der LWS und der **Facettengelenke**
- Zwei seitliche Verstärkungsstäbe
- Höhe ventral 15,5 cm, dorsal 30 cm

DAS MED-PLUS

- Elastisches Gurtsystem zur Entlordosierung der LWS
- Kraftsparendes, komfortables Anlegen durch Handschlaufen
- Regulierbare Weite mittels ergonomischer Verschlussplatten

FARBE: ■ grau

Rücken

INDIKATIONEN

Facettengelenkarthrose, Bandscheibenprotusionen/Prolaps, schwere Lumbalgie, Lumboischialgien, Lumbago, Lumbago mit ISG-Beteiligung, chronische Schmerzen im lumbosakralen Bereich, Spondylolisthese, muskuläre Dysbalance, Segmentinstabilität, lumbale Spinalkanalstenosen

GRÖSSEN


Umfang Taille



Größe 1	70 – 80 cm
Größe 2	80 – 90 cm
Größe 3	90 – 100 cm
Größe 4	100 – 110 cm
Größe 5	110 – 120 cm
Größe 6	120 – 130 cm
Größe 7	130 – 140 cm

BORT Generation Osteoporose-Orthese

REF 215 870

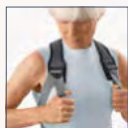

Generation



Pos.Nr. 23.15.04.4032

PRODUKTMERKMALE

- Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese
- Stabile Aluminium-Rückenschiene, anatomisch vorgeformt und individuell, ohne Werkzeug, anformbar
- Entlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Aktive Aufrichtung durch Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Steigerung der Mobilität

DAS GENERATION-PLUS

- Gurtsystem nach Rucksackprinzip
- Umlenkschlaufen im Brustbereich für leichte und stufenlose Aufrichtung des Oberkörpers
- Leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort
- Einfache Handhabung
- Verschluss mit großem Fingerringriff und Handschlaufen für kraftsparendes Anlegen

FARBE: ■ blau




BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

GRÖSSEN

Rückenlänge

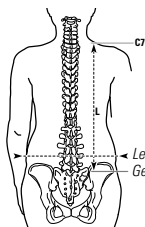

x-small	_____	bis 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

BORT Generation Dynamische Osteoporose-Orthese

REF 215 880



Generation



Pos.Nr. 23.15.04.4035

PRODUKTMERKMALE

- Aktivierende und wirbelsäulenaufrichtende Rückenorthese
- **Rückenschiene und Begrenzungszügel stabil und dynamisch einstellbar**
- Zweiteilige, stabile Aluminium-Rückenschienen, anatomisch vorgeformt und individuell, ohne Werkzeug, anformbar
- Entlastung und Stabilisierung der Wirbelsäule
- Aktive Aufrichtung durch Aktivierung der Rückenmuskulatur
- Steigerung der Mobilität

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- **Gurtsystem nach Rucksackprinzip**
- Umlenkschlaufen im Brustbereich für leichte und stufenlose Aufrichtung des Oberkörpers
- Leichte und schlanke Bauweise für guten Tragekomfort
- Verschluss mit großem Fingerringriff und Handschlaufen für kraftsparendes Anlegen



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen


Rücken

INDIKATIONEN

Aktive Aufrichtung zur Entlastung und Korrektur der LWS/BWS mit Bewegungseinschränkung in Sagittalebene, Schädigung im BWS- und LWS-Bereich, z. B. bei stabilen, osteoporotischen Wirbelkörperfrakturen, Osteoporose

GRÖSSEN

Rückenlänge

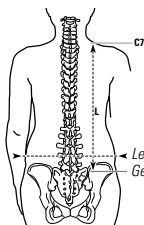

x-small	_____	bis 43 cm
small	_____	44 – 49 cm
medium	_____	50 – 55 cm
large	_____	56 – 61 cm
x-large	_____	62 – 67 cm

Gurtlängen sind individuell anpassbar für einen Leibumfang von 70 – 165 cm

Aktiv und sicher im Alltag:
aufrichten, komprimieren,
stabilisieren.



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	Rippengürtel für Herren 102 800	Rippengürtel für Damen 102 900	Narbenbruch- Bandage 104 050	Nabelbruch- Bandage 104 070	Stoma-Bandage 104 090	Vario Stoma-Bandage 104 010	PostOban® 104 150 PostOban® spezialweit 104 180	PostOban® SOFT Thorax- Abdominal- Stütze 104 100	Abdominalstütze für Schwangere 104 620	CoxaPro Hüftorthese 201 400
Seite	S. 123/122	S. 124	S. 124	S. 124	S. 125	S. 125	S. 126/127	S. 126	S. 127	S. 130
Rippenfraktur/-prellung	●									
Narbenbruch		●								
Nabelbruch				●						
Bindegewebsschwäche							●			
Bauchwandlähmung					●	●				
Z. n. Ileostomie/Kolostomie					●	●				
Entlastung des Abdomens									●	
Senkleib								●		
Postoperativ										
Tractus-iliotibialis-Syndrom		●								●
Coxarthrose										●
Piriformis-Syndrom										●

BORT Rippengürtel für Damen

REF 102 900



Pos.Nr. 05.11.01.0003

BORT Elastischer Rippengürtel für Damen

REF 102 950



Pos.Nr. 05.11.01.0059

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Unelastisches** Seiten- und Vorder- teil mit Klettverschluss, Rückenein- satz elastisch
- Luftdurchlässiges Gewebe mit Klett- verschluss
- Taillierter Schnitt für Damen
- Höhe: dorsal 16 cm, ventral 12 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort durch Baumwoll- satin und Feinfrottee

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Elastisches**, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Taillierter Schnitt für Damen
- Höhe: dorsal 16 cm, ventral 12 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Rippenfraktur, Traumafolgen im Rippenbereich (z. B. Prellung, Zerrung)

GRÖSSEN Unterbrustumfang

	small	—	bis 66 cm
	medium	—	66 – 76 cm
	large	—	76 – 89 cm
	x-large	—	89 – 102 cm
	xx-large	—	102 – 125 cm

GRÖSSEN Unterbrustumfang

	small	—	65 – 78 cm
	medium	—	78 – 91 cm
	large	—	91 – 106 cm
	x-large	—	106 – 125 cm

**BORT Rippengürtel
für Herren****REF** 102 800

Pos.Nr. 05.11.01.0003

**BORT Elastischer Rippengürtel
für Herren****REF** 102 850

Pos.Nr. 05.11.01.0060

PRODUKTMERKMALE

- Unelastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Unelastisches** Seiten- und Vorder- teil, elastischer Rückeneinsatz
- Luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Gerader Schnitt
- Höhe: 16 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort durch Baumwoll-satin und Feinfrottee

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des Thorax
- **Elastisches**, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Gerader Schnitt
- Höhe: 16 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Trägt kaum auf, unter der Kleidung nicht sichtbar
- Hoher Tragekomfort

INDIKATIONEN

Rippenfraktur, Traumafolgen im Rippenbereich (z. B. Prellung, Zerrung)

GRÖSSEN

Brustumfang



small	—	bis 82 cm
medium	—	82 – 96 cm
large	—	96 – 112 cm
x-large	—	112 – 128 cm
xx-large	—	128 – 144 cm

GRÖSSEN

Brustumfang



small	—	65 – 78 cm
medium	—	78 – 91 cm
large	—	91 – 106 cm
x-large	—	106 – 125 cm
xx-large	—	125 – 145 cm

BORT
Narbenbruch-Bandage
REF 104 050



Pos.Nr. 23.16.02.0009

BORT
Nabelbruch-Bandage
REF 104 070



Pos.Nr. 23.16.02.0009

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Narbenbruch-kompression
- Kunststoffverstärkte, abgerundete Silikonpelotte, individuell positionierbar
- Zwei Verstärkungsstäbe
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Höhen: 13 cm, 21 cm, 26 cm

FARBE: weiß



Pelotte schematisch dargestellt

DAS MED-PLUS

- Abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff
- Höhe 13 cm: runde Pelotte mit 10 cm Durchmesser
- Höhe 21 cm: Pelotte L x B: 18 x 10 cm, oval
- Höhe 26 cm: Pelotte L x B: 22 x 10 cm, oval

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Nabelbruch-kompression
- Anatomisch gewölbte Nabelbruch-pelotte mit Haftauflage, individuell positionierbar
- Zwei Verstärkungsstäbe
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe mit Klettverschluss
- Höhe: 13 cm

FARBE: weiß



Pelotte schematisch dargestellt

DAS MED-PLUS

- Abnehmbarer Pelottenbezug aus weichem Frottee-Stoff
- Runde Pelotte mit 10 cm Durchmesser

INDIKATIONEN

Narbenbruch, Narbeninsuffizienz, Bauchmuskelschwäche/-lähmung

INDIKATIONEN

Nabelbruch, reponierbare Nabelbrüche

GRÖSSEN

Umfang Taille



- Größe 1 ___ 60 – 95 cm
- Größe 2 ___ 95 – 125 cm
- Größe 3 ___ 125 – 150 cm

Weitere Umfangmaße als Maßanfertigung möglich.

GRÖSSEN

Umfang Taille

- Größe 1 _____ 60 – 95 cm
- Größe 2 _____ 95 – 125 cm
- Größe 3 _____ 125 – 150 cm

Höhe 13 cm, 21 cm oder 26 cm angeben

BORT Stoma-Bandage**REF** 104 090Zubehör
Stoma-Protector

Pos.Nr. 05.11.03.2017

**BORT Vario
Stoma-Bandage****REF** 104 010

inkl. Schablone



Pos.Nr. 05.11.03.2022

PRODUKTMERKMALE

- Zirkuläre Abdominalbandage mit variabler Stoma-Durchtrittsöffnung
- Unelastischer Veloursverbundstoff, elastischer Einsatz im Rückenteil
- Zwei Stützstäbe
- Einklettbare Verstärkungsplatte aus Kunststoff
- Höhen: 15 cm, 22 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Variable Stoma-Durchtrittsöffnung durch Klettverschluss in der Weite regulierbar
- Großflächige hautfreundliche Auflage um den Stomabereich
- Einfaches Anlegen und Positionieren der Stoma-Durchtrittsöffnung durch Klettverschluss rechts und links im Abdominalbereich
- Waschbar bei 60 °C

ZUBEHÖR:


REF 104 099 | BORT Stoma-Protector

INDIKATIONEN

Bauchwandlähmung, Bauchwandbruch, postoperativ, Zustand nach Ileostomie und Kolostomie mit begleitender Bindegewebeinsuffizienz

GRÖSSEN

Umfang Taille

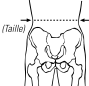	small	___	70 – 90 cm
	medium	___	90 – 115 cm
	large	___	115 – 150 cm

Höhe 15 cm oder 22 cm angeben

PRODUKTMERKMALE

- Zirkuläre Abdominalbandage mit variabler Stoma-Durchtrittsöffnung
- Unelastischer Veloursverbundstoff, elastischer Einsatz im Rückenteil
- Zwei Stützstäbe
- **Größe, Form und Positionierung der Öffnung für den Stomadurchtritt sind individuell bestimmbar**
- Höhen: 15 cm, 22 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Beiliegende Schablone für einfache, individuelle Größenbestimmung der Stoma-Durchtrittsöffnung
- Großflächige hautfreundliche Auflage um den Stomabereich
- Waschbar bei 60 °C

ZUBEHÖR:


REF 104 099 | BORT Stoma-Protector

INDIKATIONEN

Bauchwandlähmung, Bauchwandbruch, postoperativ, Zustand nach Ileostomie und Kolostomie mit begleitender Bindegewebeinsuffizienz

GRÖSSEN

Umfang Taille

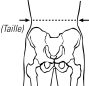	small	___	70 – 90 cm
	medium	___	90 – 115 cm
	large	___	115 – 150 cm

Höhe 15 cm oder 22 cm angeben

BORT PostOban® SOFT
Thorax-Abdominal-Stütze
REF 104 100



Pos.Nr. 05.11.01.0054

BORT PostOban®
Thorax-Abdominal-Stütze
REF 104 150



Pos.Nr. 05.11.01.0041

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, weiches Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE: beige

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Angenehme Trageigenschaften

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Breiter, zweigeteilter Klettverschluss
- Höhen: 21 cm, 26 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Individuell einstellbar
- Einfaches Anlegen und guter Sitz durch zweiteiligen Verschluss


INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib


INDIKATIONEN

Nach abdominalen/thorakalen operativen Eingriffen, Bindegewebsschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

GRÖSSEN Umfang Taille

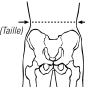	small	—	bis 87 cm
	medium	—	87 – 102 cm
	large	—	102 – 117 cm
	x-large	—	117 – 132 cm

GRÖSSEN Umfang Taille

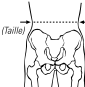	Größe 1	—	75 – 85 cm
	Größe 2	—	85 – 95 cm
	Größe 3	—	95 – 105 cm
	Größe 4	—	105 – 115 cm
	Größe 5	—	115 – 125 cm
	Größe 6	—	125 – 135 cm
	Größe 7	—	135 – 145 cm

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

BORT PostOban® spezialweit Thorax-Abdominal-Stütze

REF 104 180



Pos.Nr. 05.11.01.0055

BORT Abdominalstütze für Schwangere

REF 104 620



Pos.Nr. 05.11.03.5007
Zuzahlungsfrei für Schwangere

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur zirkulären Stabilisierung des thorakalen und abdominalen Bereichs für kräftige Leibformen
- Zweigeteilter, elastischer Verschlussgurt
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Höhe: 21 cm, 26 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Optimierte Trageeigenschaften auch bei kräftigem Leib
- Individuell einstellbar
- Integrierte Anziehilfen
- Einfaches Anlegen

INDIKATIONEN

Nach abdominalen operativen Eingriffen, Bindegewebschwäche im Abdominalbereich, Senkleib

GRÖSSEN Umfang Leib

Größe	Umfang Leib
Größe 0	90 – 105 cm
Größe 1	105 – 120 cm
Größe 2	120 – 135 cm
Größe 3	135 – 150 cm
Größe 4	150 – 165 cm
Größe 5	165 – 180 cm



PRODUKTMERKMALE

- Elastische Bandage zur Unterstützung des Bauches
- Elastisches, luftdurchlässiges Gewebe
- Vier Stützstäbe, bei Bedarf entnehmbar
- Höhe dorsal: 24 cm

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Entlastung des Rückens durch zusätzlichen elastischen Zügel
- Anpassbar an variierende Bauchumfänge

INDIKATIONEN

Lumbale Rückenbeschwerden bei Schwangerschaft, Adipositas, Mehrlingschwangerschaft

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

Größe	Umfang Beckenkamm
Größe 0	75 – 90 cm
Größe 1	90 – 105 cm
Größe 2	105 – 120 cm
Größe 3	120 – 135 cm



Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich.

Höhe 21 cm oder 26 cm angeben

BORT HerniaFix® Federbruchband mit runder Pelotte

REF 109 100



Med

Pos.Nr. 23.16.01.0017

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl

FARBE: beige

BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit runder Pelotte, kurze Feder

REF 109 400

Pos.Nr. 23.16.01.0019

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, runde Druckpelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl

FARBE: beige

BORT HerniaFix® Federbruchband mit anatomischer Pelotte

REF 109 200



Med

Pos.Nr. 23.16.01.0018

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, anatomische Pelotte
- Unelastischer Hüftgurt mit ca. 50 cm langer Feder aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE: beige

BORT HerniaFix® Elastisches Federbruchband mit anat. Pelotte, kurze Feder

REF 109 700

Pos.Nr. 23.16.01.0020

PRODUKTMERKMALE

- Einseitige, anatomische Pelotte
- Elastischer Hüftgurt mit kurzer Feder (20 cm) aus Federstahl
- Schenkelriemen, verhindert Rutschen der Pelotte

FARBE: beige

INDIKATIONEN

Reponierbarer Leistenbruch

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	85	_____	83 – 88 cm
	90	_____	88 – 93 cm
	95	_____	93 – 98 cm
	100	_____	98 – 103 cm
	105	_____	103 – 108 cm

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	85	_____	83 – 88 cm
	90	_____	88 – 93 cm
	95	_____	93 – 98 cm
	100	_____	98 – 103 cm
	105	_____	103 – 108 cm

Weitere Umfangmaße als Sonderanfertigung möglich, außer **REF** 109 400.

rechts oder links angeben

rechts oder links angeben

**BORT HerniaFix®
Elastisches Federbruchband
doppelseitig** [REF] 109 500



Med

Pos.Nr. 23.16.01.1017

PRODUKTMERKMALE

- Doppelseitig, runde Druckpelotten
- Elastischer Hüftgurt mit ca. 20 cm langen Federn aus Federstahl

FARBE: beige

**BORT HerniaFix® Spezial-
bruchband mit einstellbarer
anat. Pelotte** [REF] 110 300



Med

Pos.Nr. 23.16.01.0022

PRODUKTMERKMALE

- Spezialbruchband, druck- und federfrei, einseitig
- Anatomische Pelotte, einstellbar
- Elastischer Hüftgurt
- Schenkelriemen

FARBE: beige

INDIKATIONEN

Reponierbarer Leistenbruch

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	85	_____	83 – 88 cm
	90	_____	88 – 93 cm
	95	_____	93 – 98 cm
	100	_____	98 – 103 cm
	105	_____	103 – 108 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	_____	85 – 94 cm
	_____	95 – 105 cm
	_____	106 – 115 cm

rechts oder links angeben

BORT CoxaPro Hüftorthese

REF 201 400

NEU



Pos.Nr. 23.05.01.0xxx

Med

PRODUKTMERKMALE

- Hüftgelenksorthese zur Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks
- Einfache Bewegungslimitierung von Beugung und Streckung
- Werkzeugfreie Einstellung von Extension/Flexion: 0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Trochanter-Pelotte zur intermittierenden Massage
- Gelenkschiene am Hüftbereich und Oberschenkel durch Kaltverformung anpassbar (Aluminiumschiene)

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Gute Funktionssicherung des Hüftgelenks durch zwei breite, gegenläufige Zügel am Oberschenkel
- Leichte und schlanke Bauweise für hohen Tragekomfort
- Hochwertiges Funktionsgestrick aus Baumwolle, besonders klettresistent



ZUBEHÖR:

- REF** 991 126 Piriformis-Pelotte
- Zur Triggerpunktmassage des Piriformis-Muskels

INDIKATIONEN

Alle Indikationen, bei denen eine Funktionssicherung und/oder Mobilisierung des Hüftgelenks notwendig ist, wie z. B. Zustand nach Hüftgelenksluxation, Lockerung von Hüftendoprothesen, mittelschwere bis schwere Coxarthrose, muskulären Dysbalancen Lenden-Becken-Hüft-Region, z. B. Tractus-iliotibialis-Syndrom, Piriformis-Syndrom

GRÖSSEN

Umfang Beckenkamm



small	_____	85 – 100 cm
medium	_____	100 – 115 cm
large	_____	115 – 130 cm
x-large	_____	130 – 145 cm

rechts oder links angeben

**BORT Generation
Hüftprotector**

REF 215 900



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorgurt mit stoßabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectors aus viscoelastischem Weichschaum
- Komplett zu öffnender Gurt mit anatomischem Schnitt

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch Klettverschluss
- Breite Griffaschen frontal
- Sichere Handhabung und hoher Tragekomfort
- Geeignet für temporäre Anwendung während Aktivitätsphasen
- Ansprechendes, funktionelles Design

ZUBEHÖR:

- Protectors-Set (REF 201 120)

INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese, Sturzgefährdung

**BORT StabiloHip
Hüftprotector**

REF 201 100



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Hüft-Protectorhose mit stoßabsorbierender Wirkung
- Entnehmbare Protectors aus viscoelastischem Weichschaum

FARBE: □ weiß

DAS MED-PLUS

- Hochelastischer Bund und Beinabschluss
- Protectors einfach entnehmbar
- Hochwertige Funktionshose aus Baumwolle und Lycra

ZUBEHÖR:

- Protectors-Set (REF 201 120)
- Hose (REF 201 200)

INDIKATIONEN

Sturzneigung unterschiedlicher Genese

GRÖSSEN Umfang Beckenkamm

	small	—	80 – 90 cm
	medium	—	90 – 100 cm
	large	—	100 – 110 cm
	x-large	—	110 – 120 cm
	xx-large	—	120 – 130 cm

GRÖSSEN Konfektionsgröße
Damen Herren

small	—	38	—	46
medium	—	40	—	48
large	—	42	—	50
x-large	—	44	—	52
xx-large	—	46/48	—	54/56
xxx-large	—	50/52	—	58/60

Damit es vorwärtsgeht: funktionelle Stabilisierung bei maximaler Mobilität



Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select® Stabilo- Gen® 114 420	StabiloGen® Sport 114 520 SP	StabiloGen® Sport mit Haftband 114 520 SP-H	Patella- Sehnen- band Sport 114 010 SP	Stabilo Gen®Eco 114 520	Generation Kniebandage 215 420	Asymme- tric® 114 700	Osgood- Schlatter Knie- gelenk- bandage 114 510	Stabilo® Knieban- dage mit Gelenk 150 140	Immob- Schiene 145 000	Generation Knie- orthese 215 400	Generation Soft OA- Knie- orthese 215 440	OA- Xpress 101 600	Genu- Xpress 100 700	StabiloPro® 182 150
Seite	S. 134/135	S. 136	S. 143	S. 138	S. 137	S. 145	S. 141	S. 146	S. 154/155	S. 149	S. 150	S. 151	S. 152	S. 148/147	
Reizzustände	●	●		●	●		●								
Patellalateralisation						●									
Patella(sub)luxation						●									
Chondropathia patellae			●												
Femoropatellare Arthrose			●												
Meniskopathie	●	●			●					●					●
Kniebandinstabilität	●	●			●			●		●				●	●
Gonarthrose	●	●			●					●					●
Varus/Valgus Gonarthrose												●			
Vollständige Ruhigstellung										●					
Morbus Osgood-Schlatter							●								
ACL/PCL Ruptur														●	



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressions-Klasse II

DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform zur sicheren Führung der Patella
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

BORT INNOVATION

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		

rechts und links gleich

Maßanfertigung möglich.



BORT select® GenuZip®

REF 114 390



Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform

select®

Pos.Nr. 05.04.01.0080

BREEZE



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit seitlichem Reißverschluss**
- Längselastische Dehnungszone oberhalb der viskoelastischen Pelotte sorgt für optimalen Sitz in allen Beugewinkeln
- **Mit hoch elastischem Kniekehlenpolster für bestmöglichen Tragekomfort**
- Je ein Spiral-Feder-Stab zur seitlichen Stabilisierung
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

BORT INNOVATION

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels

DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Komfort-Faser mit kühlendem Effekt
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Leichtes An- und Ausziehen durch seitlichen Reißverschluss
- Abgekettelter, extra weicher Abschlussrand
- **Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella
- Sehr guter Tragekomfort
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

Knie

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, Gonarthrose, Arthritis, z. B. bei Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		

rechts oder links angeben

Maßanfertigung möglich.





PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- **Latexfreies Gestrick**
- **Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Doppel-Plus-Größen-System**, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- **Latexfreies Gestrick**
- **Anatomisch und funktionell optimierte Pelottenform** zur sicheren Führung der Patella
- Bandagenlänge in Größe 3: 35 cm

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß		d-Maß	f-Maß
	Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
	Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	*Größe 5++	41 – 45 60 – 64 cm
	Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
	Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
	Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	*Größe 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm	*Größe 7	49 – 53 68 – 72 cm	
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm	*Größe 7+	49 – 53 72 – 76 cm	
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm			

rechts und links gleich

*Gr. 5++, 6++, 7, 7+ nur für REF 114 520 SP-H

**BORT Generation
Kniebandage**

REF 215 420



Generation



Pos.Nr. 05.04.01.0129

**BORT Generation
Kniebandage Plus**

REF 114 490 G



Generation



Pos.Nr. 05.04.01.2003

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskoelastische Pelotte
- **Integriertes Plus-Größen-System**

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- **Einfaches An- und Ablegen** durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

INDIKATIONEN

Gonarthrose, rezidivierender Gelenkerguss, Arthritis, leichte Bandschwäche

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks mit regulierbarer Oberschenkelweite
- Zirkuläres Verschlussband zur verbesserten Stabilisierung am Oberschenkel
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Anatomische, viskoelastische Pelotte
- **Integriertes Plus-Größen-System**

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- **Einfaches An- und Ablegen** durch geschlossene Form am Unterschenkel und geöffnete Bauweise am Oberschenkel
- Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Ansprechendes, funktionelles Design

GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß



Größe 1	26–29	32–36 cm
Größe 2	29–33	36–40 cm
Größe 3	33–37	40–48 cm
Größe 4	37–41	44–52 cm
Größe 5	41–45	52–60 cm
Größe 6	45–49	60–68 cm
Größe 7	49–53	68–76 cm

rechts und links gleich

BORT StabiloGen® Eco

REF 114 520



Pos.Nr. 05.04.01.0098

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Kompressions-Klasse II
- **Auch für Kinder**, s. Seite 32


FARBEN: beige silber
 schwarz jeans

DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle**
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Angenehmer Tragekomfort
- Silikonhafrand ab Größe 5
- Länge der Bandage in Größe 3, 32 cm

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

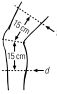
GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
 Kinder (blau)	23 – 26	28 – 32 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm		
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm		Weitere Plus-Größen, bzw.
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		Doppel-Plus-Größen finden Sie
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm		bei REF 114 520 H und HK.

rechts und links gleich

BORT StabiloGen® Eco

mit Haftband

REF 114 520 H

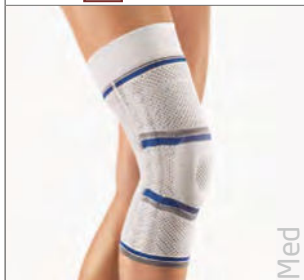


Med

Pos.Nr. 05.04.01.0137

BORT StabiloGen® Eco

mit Haftband kurz

REF 114 520 HK

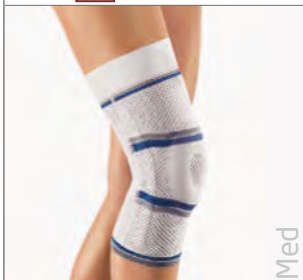

Med

Pos.Nr. 05.04.01.0138

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Doppel-Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: ■■ silber

DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle**
- Optimale Haftung und Druckverteilung am Oberschenkel-Abschlussrand
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Angenehmer Tragekomfort
- Länge der Bandage in Größe 3, 37 cm

PRODUKTMERKMALE

- Klassische Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband in allen Größen**
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Doppel-Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform**

FARBE: ■■ silber

DAS ECO-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle**
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- **Kurze Ausführung** im Oberschenkelbereich, keine Verlängerung durch Silikonhaftband
- Angenehmer Tragekomfort
- Länge der Bandage in Größe 3, 32 cm

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Gonarthrose, Arthritis, Bandinstabilität, Meniskopathie

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5++	41 – 45 60 – 64 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6++	45 – 49 68 – 72 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm	Größe 7	49 – 53 68 – 72 cm
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm	Größe 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm		



rechts und links gleich

**BORT StabiloGen®
latexfrei**
[REF] 114 250



Pos.Nr. 05.04.01.0017

**BORT activemed
Kniebandage**
[REF] 220 400



Pos.Nr. 05.04.01.0115

PRODUKTMERKMALE

- Latexfreie Kniebandage zur Weichteilkompression
- Stabilisiert und entlastet das Kniegelenk
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Hochelastischer, weicher Beugebereich in der Kniekehle
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- **Latexfreies Gestrick**
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Silikonhaftrand ab Größe 5

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit viskoelastischer Pelotte zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Anatomisch formgestrickt
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau
■ graphit

DAS MED-PLUS

- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Weiche Oberflächenstruktur

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Arthritis, Gonarthrose, Bandinstabilität

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkerguss, z. B. bei Arthritis, Gonarthrose, Bandinstabilität

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		

rechts und links gleich



BORT Kniebandage mit Patella-Aussparung**REF** 114 150

Pos.Nr. 05.04.01.0016

BORT Osgood-Schlatter Kniegelenkbandage**REF** 114 510

Pos.Nr. 23.04.05.0016

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit Patellaaussparung zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viskoelastische Pelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Silikonhaftrand ab Größe 5

FARBE: ■■ silber

DAS MED-PLUS

- **Atmungsaktive Funktions-Komfortzone in der Kniekehle**
- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Vollständige Druckentlastung der Patella
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, Meniskopathie, Arthritis, Bursitis

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur lokalen Druckentlastung der Tuberositas tibiae
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Anatomisch formgestrickt
- Mehrzonensilikonpelotte
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- **Auch für Kinder**, s. Seite 31

FARBE: ■■ silber

DAS MED-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- Einstellbare Entlastung durch V-förmigen Korrekturzügel

INDIKATIONEN

Beeinflussung des Patellagleitweges, Morbus Osgood-Schlatter, Ansatz tendinose an Tuberositas tibiae, Gonarthrose, Arthritis, Gelenkerguss, Reizzustände


GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß

d-Maß

f-Maß

	*Kinder (blau)	23 – 26	28 – 32 cm	Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm
	Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm
	Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm
	Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm
	Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	**Größe 6	45 – 49	60 – 64 cm
	Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	**Größe 6+	45 – 49	64 – 68 cm

rechts und links gleich *Kindergröße nur für **REF** 114 510 **Gr. 6, 6+ nur für **REF** 114 150



PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Weichteilkompression mit V-förmigen Stabilisierungsbändern zur Stabilisierung und Entlastung des Kniegelenks
- Viskoelastische Pelotte
- Silikonhafrand proximal und distal
- Langes Oberschenkelteil (22 cm)
- Länge: 37 cm

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Keine seitlichen Stäbe, komplett druckfrei in diesem Bereich
- Relax-Zone in der Kniebeuge
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände des Kniegelenks, rezidivierender Gelenkguss, Arthritis, Arthrose



PRODUKTMERKMALE

- Oberschenkel-Aktivbandage mit zirkulären Gurten und Kreuzzügeln
- Anwendung anterior/posterior möglich
- Anatomisch formgestrickt
- Entlastungszonen im Verletzungsbe- reich
- Länge: 23 cm

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- COOLMAX®: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Wirkprinzip aus Kompression, konventionellem Tape und Kinesio-Tape
- Propriozeptive Wirkung (Detonisierung der Muskulatur)
- Modernes Sport-Design

INDIKATIONEN

Für stark beanspruchte Muskelpartien.
Akut: Prellung mit Schwellung und Hämatom, Muskelverletzungen.
Chronisch: Schutz vor erneuten Muskel-läsionen, Entlastung geschädigter Muskelstrukturen (z. B. Narbenbildung nach alten Verletzungen), nach Muskelverletzungen

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26-29	32-36 cm
Größe 2	29-33	36-40 cm
Größe 2+	29-33	40-44 cm
Größe 3	33-37	40-44 cm
Größe 3+	33-37	44-48 cm
Größe 4	37-41	44-48 cm
Größe 4+	37-41	48-52 cm
Größe 5	41-45	52-56 cm
Größe 5+	41-45	56-60 cm
Größe 6	45-49	60-64 cm
Größe 6+	45-49	64-68 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Umfang Oberschenkelmitte
small	bis 43 cm
medium	43 - 50 cm
large	50 - 56 cm
x-large	56 - 61 cm
xx-large	61 - 66 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellarsehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Sport-Variante ohne Umlenkschleife
- Optimierte Konstruktion für hohe Aktivität
- Weiches, elastisches Bandmaterial

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- Auch geeignet für Kontaktsportarten
- Hoher Tragekomfort bei aktiver Bewegung
- Individuell dosierbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Modernes Sport-Design

PRODUKTMERKMALE

- Sogenannte Kasseler Patellarsehnenbandage zur gezielten Entlastung der Patellasehne
- Elastisches Kurzzug-Material
- Anatomische Propriozeptionspelotte aus Silikon
- Weiches Einfassband
- Umkehrzügel mit Klettverschluss

FARBE: ■ grau



DAS MED-PLUS

- Stufenlos anpassbarer Pelottendruck
- Verbesserte Gelenkkoordination und Schmerzlinderung
- Druckfreie Kniekehle

INDIKATIONEN

Chondropathia patellae, femoropatellare Arthrose, Patellaspitzensyndrom

Oberschenkel
Knie

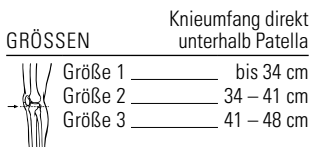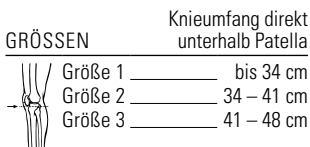

rechts und links gleich

rechts und links gleich

**BORT Stabilo®
Kniebandage offene Form**
REF 114 480



Pos.Nr. 23.04.03.0038

Med

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen, komplett zu öffnen
- Vier Klettverschlüsse
- Ideal bei Bewegungseinschränkungen und Verletzungen, die kein Schlüpfen zulassen
- Rutschsicherer Halt

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Durch Klettverschlüsse vollständig zu öffnen
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage (ideal für den Einsatz in der Geriatrie)

**BORT Stabilo®
Kniebandage spezialweit**
REF 114 490



Pos.Nr. 05.04.01.2003

SPEZIALWEIT

Med

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit regulierbarer Oberschenkelweite zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Mit je zwei seitlichen Spiral-Federstäben und seitlichen Silikonpolstern
- Patellaausparung
- Zwei Klettverschluss-Zügel zur optionalen Einstellung der Oberschenkelweite

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS


- Besonders geeignet für Patienten mit kräftigen Oberschenkeln
- Einfaches An- und Ablegen der Bandage möglich
- Rutschsicherer Halt

INDIKATIONEN


Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Arthrose, Arthritis

INDIKATIONEN

Rezidivierender Gelenkerguss, Arthrose, Arthritis, Bandschwäche

GRÖSSEN	Knieumfang
 Größe 1	_____ bis 34 cm
Größe 2	_____ 34 – 37 cm
Größe 3	_____ 37 – 40 cm
Größe 4	_____ 40 – 43 cm
Größe 5	_____ 43 – 46 cm
Größe 6	_____ 46 – 49 cm
Größe 7	_____ 49 – 52 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Knieumfang
 Größe 1	_____ 34 – 37 cm
Größe 2	_____ 37 – 40 cm
Größe 3	_____ 40 – 43 cm
Größe 4	_____ 43 – 46 cm
Größe 5	_____ 46 – 49 cm
Größe 6	_____ 49 – 52 cm
Größe 7	_____ 52 – 55 cm
Größe 8	_____ 55 – 58 cm

rechts und links gleich

BORT Asymmetric®

REF 114 700



Pos.Nr. 23.04.05.0005

BORT Asymmetric® Plus

REF 114 900



Pos.Nr. 23.04.05.1005

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Je ein seitlicher Spiral-Feder-Stab
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Pelottendruck durch zwei Klettgurte individuell, direkt einstellbar
- Eingestrickte Silikon-Haftzone im Bereich des Oberschenkels
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patellahochstand, Patellalateralisation, Zustand nach lateraler Release-OP, rezidivierende oder habituelle Patella Instabilität, Meniskopathie

PRODUKTMERKMALE

- Textile Softorthese mit Gelenken zur Beeinflussung des Patellagleitweges
- Lateraler Silikonhalbring
- Seitliche Gelenkschienen
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Vektor-Korrektur-Filamente: Innovatives Zügelssystem mit im Gestrick verlaufenden Korrekturfäden zur individuell dosierbaren Führung der Patella
- Gelenkschienen, individuell anformbar
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

INDIKATIONEN

Patellahochstand, Patellalateralisation, Femoropatellares Schmerzsyndrom, Patella-Luxation oder -Subluxation in Kombination mit Seitenbandinstabilität, postoperativ

GRÖSSEN

d-Maß

f-Maß

d-Maß

f-Maß



Größe 1	___ 26 – 29	32 – 36 cm
Größe 2	___ 29 – 33	36 – 40 cm
Größe 2+	___ 29 – 33	40 – 44 cm
Größe 3	___ 33 – 37	40 – 44 cm
Größe 3+	___ 33 – 37	44 – 48 cm
Größe 4	___ 37 – 41	44 – 48 cm
Größe 4+	___ 37 – 41	48 – 52 cm
Größe 5	___ 41 – 45	52 – 56 cm

Größe 5+	___ 41 – 45	56 – 60 cm
Größe 6	___ 45 – 49	60 – 64 cm
Größe 6+	___ 45 – 49	64 – 68 cm

rechts oder links angeben

REF 114 700 Maßanfertigung möglich.

**BORT Kniebandage
mit einstellbarem Gelenk**
REF 114 460



Med

Pos.Nr. 23.04.03.1047

**BORT Stabilo®
Kniebandage mit Gelenk**
REF 150 140



Med

Pos.Nr. 23.04.03.0039

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- **Extensionsbegrenzung bei 0° und 10°**
- **Flexionsbegrenzung bei 30°, 60° und 90°**
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS

- Einstellbares Gelenk zur Begrenzung der Extension und Flexion
- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- **Schlankes Gelenkschienenendesign**

PRODUKTMERKMALE

- Kniebandage mit seitlichen Gelenkschienen zur Führung des Kniegelenks
- **Extensionsbegrenzung bei 0°**
- Zirkuläre Fixiergurte an Ober- und Unterschenkel
- Druckverminderte Zonen im Rand- und Kniekehlenbereich
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- **Auch für Kinder**, s. Seite 32

FARBE: ■ silber

DAS MED-PLUS


- Einfach anatomisch anpassbare Gelenkschienen mit effektiver seitlicher Stabilisierung
- **Schlankes Gelenkschienenendesign**

INDIKATIONEN

Meniskusverletzungen, leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis, Bursitis

INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Arthritis

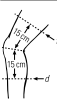GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß		d-Maß	f-Maß
	*Kinder	23 – 26	28 – 32 cm	Größe 4	37 – 41 44 – 48 cm
	Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
	Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
	Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
	Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
	Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm

rechts oder links angeben

*Kindergröße nur für REF 150 140 verfügbar

BORT StabiloPro® Knieorthese offene Form

REF 182 300

NEUES
DESIGN

Med

Pos.Nr. 23.04.03.2013

PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Stabilisierung nach medial und lateral
- Einstellbare Extension: 0°, 10°, 15°, 20°
- Einstellbare Flexion: 0°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Vier zirkuläre Klettbinden zur besonders sicheren Stabilisierung
- **Komplett zu öffnen**, daher sehr leicht anzulegen
- Plus-Größen-System, dadurch sehr gute Passform
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**



BORT INNOVATION:

- Einstellbares Polkurvengelenk, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks



Knie

INDIKATIONEN

Mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Nachsorge bei arthroskopischen Eingriffen am Knie, chronische, postoperative und posttraumatische Reizzustände

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 4+	37 – 41 48 – 52 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 5	41 – 45 52 – 56 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 5+	41 – 45 56 – 60 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		



rechts und links gleich

**BORT StabiloPro®
Knieorthese**
REF 182 150



Pos.Nr. 23.04.03.1029

BORT ROM Knieorthese
REF 100 900



Pos.Nr. 23.04.02.0041

PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Mit offener Patella
- Einstellbare Extension: 0°, 10°, 15°, 20°
- Einstellbare Flexion: 0°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- Zwei zirkuläre Klettbänder zur zusätzlichen Stabilisierung
- Plus-Größen-System
- **Einstellbares Polkurvengelenk**, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

INDIKATIONEN

Leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Gonarthrose

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26-29	32-36 cm
Größe 2	29-33	36-40 cm
Größe 2+	29-33	40-44 cm
Größe 3	33-37	40-44 cm
Größe 3+	33-37	44-48 cm
Größe 4	37-41	44-48 cm
Größe 4+	37-41	48-52 cm
Größe 5	41-45	52-56 cm
Größe 5+	41-45	56-60 cm
Größe 6	45-49	60-64 cm
Größe 6+	45-49	64-68 cm



rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Mobilisierung
- Orthesenlänge durch seitliche Teleskopschienen einstellbar
- Begrenzung der Flexion: 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°, 100°, 110° und 120°
- Begrenzung der Extension: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80° und 90°
- Immobilisierung: -10°, 0°, 10°, 20°, 30°

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Werkzeuglose Einstellung der Gelenksanschlüsse und Orthesenlänge
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort
- easyClick-Verschlüsse für leichtes An- und Ablegen

INDIKATIONEN

Zur postoperativen/posttraumatischen, frühfunktionellen Mobilisierung mit Bewegungsbegrenzung des Kniegelenks, Z.n. Schädigungen von Knochen-/Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks

GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts und links gleich

BORT Generation Knieorthese

REF 215 400



Generation



Pos.Nr. 23.04.03.1046

PRODUKTMERKMALE

- Softorthese mit Bewegungslimitierung zur Führung und Entlastung des Kniegelenks
- Einstellbare Extension: 0°, 10°, 15°, 20°
- Einstellbare Flexion: 0°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°
- Gelenkschienen kalt verformbar
- Atmungsaktives, elastisches Material für optimalen Tragekomfort

FARBE: ■ blau



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

DAS GENERATION-PLUS

- Kompletzt zu öffnen
- Einfachste Handhabung und Anlage der Orthese
- Breite Griffaschen erlauben eine sichere und kraftsparende Handhabung auch bei eingeschränkter Greiffähigkeit
- Kniekehlenöffnung erleichtert Beugung im Sitzen
- **Einstellbares Polkurvengelenk**, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Extra breite Umlenkschlaufen
- Ansprechendes, funktionelles Design
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

INDIKATIONEN

Degenerative Erkrankungen, z. B. leichte bis mittlere Bandinstabilität des Kniegelenks, Gonarthrose, Meniskusverletzungen

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß	d-Maß	f-Maß
Größe 1	26 – 29	32 – 36 cm	Größe 6	45 – 49 60 – 64 cm
Größe 2	29 – 33	36 – 40 cm	Größe 6+	45 – 49 64 – 68 cm
Größe 2+	29 – 33	40 – 44 cm	Größe 7	49 – 53 68 – 72 cm
Größe 3	33 – 37	40 – 44 cm	Größe 7+	49 – 53 72 – 76 cm
Größe 3+	33 – 37	44 – 48 cm		
Größe 4	37 – 41	44 – 48 cm		
Größe 4+	37 – 41	48 – 52 cm		
Größe 5	41 – 45	52 – 56 cm		
Größe 5+	41 – 45	56 – 60 cm		



rechts und links gleich

BORT Generation Soft OA-Knieorthese

REF 215 440



Generation



Pos.Nr. 23.04.04.1024

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Entlastungsorthese bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 39 cm

FARBE: ■ blau

Anwendung Modell A

- Rechtes Bein lateral: Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein medial: Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)

DAS GENERATION-PLUS

- Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Material
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartiments
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen Handlungsvorteilen

Anwendung Modell B

- Rechtes Bein medial: Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein lateral: Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)

INDIKATIONEN

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II - III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur

GRÖSSEN	d-Maß	f-Maß
Größe 1	32 – 36 cm	38 – 44 cm
Größe 2	36 – 42 cm	44 – 50 cm
Größe 3	42 – 48 cm	50 – 56 cm
Größe 4	48 – 54 cm	56 – 62 cm
Größe 5	54 – 60 cm	62 – 68 cm
Modell A	rechts varus/links valgus	
Modell B	rechts valgus/links varus	



Modell A oder B angeben

BORT OA-Xpress**REF** 101 600

easyClick-System



Med

Pos.Nr. 23.04.04.1018

PRODUKTMERKMALE

- Knie-Entlastungsschlinge bei isolierter medialer/lateraler Gonarthrose bis 5° Achsabweichung
- Varus-Valgus-Korrektur frei justierbar
- Einstellbares, polyzentrisches Gelenk
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°
- Orthesenlänge: 40 cm

FARBE: ■ grau

Anwendung Modell A

- Rechtes Bein lateral:
Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)
- Linkes Bein medial:
Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)

DAS MED-PLUS

- Teilelastische Schalen für gute Anpassung an unterschiedliche Beinumfang
- Gezielte Entlastung des medialen/lateralen Kompartments
- Leichte und schlanke Bauweise für optimalen Tragekomfort

Anwendung Modell B

- Rechtes Bein medial:
Valgus-Gonarthrose (zur Varisierung bei X-Beinstellung)
- Linkes Bein lateral:
Varus-Gonarthrose (zur Valgisierung bei O-Beinstellung)



INDIKATIONEN

Partielle Entlastung des medialen oder lateralen Kompartiments bei Gonarthrose Grad II-III, Bone Bruise (posttraumatisches Knochenmarködem), mediale/laterale Gonarthrose in Folge einer Tibiakopffraktur

AUSFÜHRUNG

Modell A _____ rechts varus/links valgus
 Modell B _____ rechts valgus/links varus

Nur eine Größe

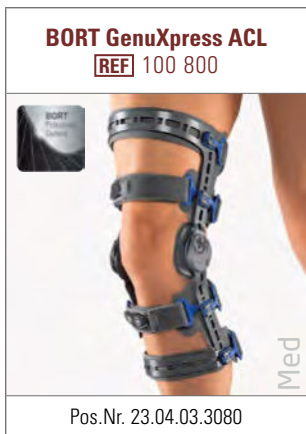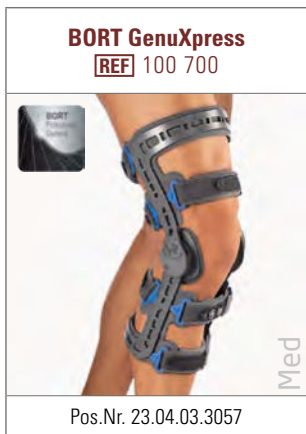

PRODUKTMERKMALE

- Knierahmenorthese nach 4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe
- **Einstellbares Polkurvengelenk**, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

INDIKATIONEN

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, Genu recurvatum, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

PRODUKTMERKMALE

- Knierahmenorthese nach 4-Punkt-Prinzip zur Führung und Stabilisierung des Kniegelenks
- Begrenzung der Extension: 0°, 5°, 10°, 15°, 20° und 25°
- Begrenzung der Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Hohe Rahmenfestigkeit bei geringem Eigengewicht
- **Einstellbares Polkurvengelenk**, angelehnt an die physiologische Roll-Gleit-Bewegung des Kniegelenks
- Selbstjustierende Tibia-Anlage
- **Werkzeugfreie Einstellung der Extension und Flexion**

INDIKATIONEN

Schwere und/oder komplexe Instabilität des Kniegelenks, Meniskusverletzungen, funktionelle prä- und/oder postoperative Versorgung von Bandrupturen (ACL, PCL, Seitenbänder)

GRÖSSEN




	f-Maß	Kniebreite
small	39-47	8,5-9,5 cm
small plus	47-54	8,5-9,5 cm
medium	47-54	9,5-10,5 cm
medium plus	54-61	9,5-10,5 cm
large	54-61	10,5-11,5 cm
large plus	61-68	10,5-11,5 cm
x-large	61-68	11,5-12,5 cm
x-large plus	68-75	11,5-12,5 cm

Nach Aufbereitung durch den Hersteller wieder einsatzfähig.

rechts oder links angeben

BORT
Kniebandage
[REF] 104 400

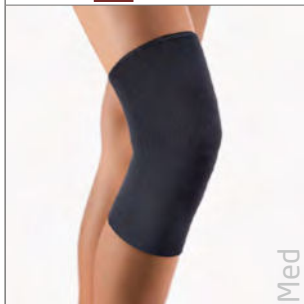

Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Einfache Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf
- Kurze Ausführung

BORT
Zweizug Kniestütze
[REF] 054 400



Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Einfache rundgestrickte Kniebandage zur leichten Stabilisierung
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Trägt nicht auf

INDIKATIONEN


Sportverletzungen, Gelenkerguss,
Verstauchungen, Prellungen

INDIKATIONEN

Sportverletzungen, Gelenkerguss,
Verstauchungen, Prellungen


GRÖSSEN

Knieumfang

	small _____	bis 32 cm
	medium _____	32 – 37 cm
	large _____	37 – 42 cm
	x-large _____	42 – 47 cm

GRÖSSEN

Knieumfang

	small _____	bis 31 cm
	medium _____	31 – 37 cm
	large _____	37 – 42 cm
	x-large _____	42 – 48 cm
	xx-large _____	48 – 54 cm

rechts und links gleich

rechts und links gleich

BORT Immob-Schiene mit Patella-Aussparung**REF** 145 000

Med

0°: Pos.Nr. 23.04.01.0036

20°: Pos.Nr. 23.04.01.1024

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar
- Auch für Kinder, s. Seite 33

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Körperformschlüssige Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE

Körpergröße

Kinder (38 cm)	80 – 145 cm
45 cm	145 – 155 cm
50 cm	155 – 165 cm
55 cm	165 – 180 cm
60 cm	über 180 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben


rechts und links gleich

BORT ImmoXpress**REF** 145 300**NEU**

Med

0°: Pos.Nr. 23.04.01.0xxx

20°: Pos.Nr. 23.04.01.1xxx

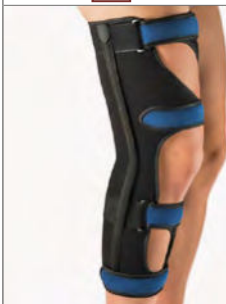**BORT Immob-Schiene
einstellbar****REF** 145 080

Med

Pos.Nr. 23.04.01.2004

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks in 0° bzw. 20° Beugung
- Mit offener Patella, 3-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen, frei positionierbar

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Variable Anpassung durch 3-teiligen Aufbau
- Innenseitig am Unterschenkel mit **großflächiger Antislip-Zone**
- Alu-Schienen können zum Waschen entnommen werden

PRODUKTMERKMALE

- Knieorthese zur Ruhigstellung des Kniegelenks
- **Einstellbar**, 0° oder 15° Beugung
- Mit offener Patella, 1-teilig
- Mediale und laterale Alu-Schienen
- Länge: 55 cm

FARBE: ■ blau/schwarz

DAS MED-PLUS

- Einfache Handhabung
- Innenseitig mit Frottee kaschiert, daher angenehmer Tragekomfort
- Alu-Schienen können zum Waschen entfernt werden

INDIKATIONEN

Präoperativ, postoperativ, posttraumatisch, Gelenk-, Muskel- oder Bandverletzungen

SCHIENENLÄNGE

Körpergröße

40 cm _____	155 – 165 cm
50 cm _____	165 – 180 cm
60 cm _____	über 180 cm

GRÖSSE

Nur eine Länge, 55 cm

0°- oder 20°-Beugung angeben

rechts und links gleich

rechts und links gleich

Gut zu Fuß: mit Rundum-
Schutz und Stabilität
auf Schritt und Tritt.



Anwendungsbereich	Oberes Sprunggelenk							USG	Fuß				
Indikationsübersicht für ausgewählte Produkte	select* TaloStabil® 054.700	select* Achillo-Stabil® Plus 053.100	TaloStabil® Sport 054.600 SP TaloStabil® Plus Sport 054.100 SP	Achillo Stabil® Plus Sport 053.100 SP	Generation Knöchelbandage 215.600	TaloStabil® Eco 054.600 TaloStabil® Eco Plus 054.650	Achillo Stabil® Eco 054.900	Stabilo® Knöchelstütze 114.100	TaloFX® 054.800 Talo Xpress 053.900	Helix S Spiraldynamik 053.200	Malleo Stabil®-Orthese 100.500 Malleo Xpress 100.560	Fußheber-orthese 054.300	
Seite	S. 158/159		S. 160/159	S. 160	S. 161	S. 162/163		S. 163	S. 167	S. 167/170	S. 166	S. 169	S. 168 S. 170
Bandverletzungen	●		●		●	●			●				●
OSG-Distorsion	●		●		●	●			●				●
Achillodynie		●		●			●						
Arthrose	●		●		●	●							
Supinations-/Pronationstrauma										●			
Tendinitiden													
Schlaaffe Peroneusparese													●
Fußheber- und Zehenheberparese													●
Fehlstatistische Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG, z. B. Knick-, Senk und Spreizfuß											●		



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz


DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur für höchsten Tragekomfort
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Tendomyopathien

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____ bis 21 cm
	medium _____ 21 – 23 cm
	large _____ 23 – 25 cm
	x-large _____ 25 – 27 cm
	xx-large _____ 27 – 29 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts oder links angeben



PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige **Aktiv-Achillessehnenbandage** zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im Fußrückenbereich
- Großflächige, strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage von Achillessehne und Muskelsehnenübergang zur Wadenmuskulatur

FARBEN: ■ silber ■ schwarz


DAS SELECT-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch halboffene Bauweise
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über drei Klettverschlüsse
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN Fesselumfang

	small _____ bis 21 cm
	medium _____ 21 – 23 cm
	large _____ 23 – 25 cm
	x-large _____ 25 – 27 cm
	xx-large _____ 27 – 29 cm

rechts und links gleich

BORT select®
TaloStabil® Plus
REF 054 100


select®

Pos.Nr. 05.02.01.2005

BREEZE

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBEN: ■ silber ■ schwarz

DAS SELECT-PLUS

- **SOFTflex Plus-Funktionsgestrick:**
 - BREEZE: Kühlende Komfort-Faser
 - Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Separat beigelegte Schlupfhilfe

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN

		Fesselumfang
	small	bis 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm
	xx-large	27 – 29 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts oder links angeben

BORT
TaloStabil® Plus Sport
REF 054 100 SP


Sport

Pos.Nr. 05.02.01.2012

COOLMAX®

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression, mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®:** Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- **Latexfreies Gestrick**

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN

		Fesselumfang
	small	bis 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm

rechts und links gleich



PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Ideale Passform bei sportlichen Aktivitäten
- **Latexfreies Gestrick**
- Modernes Sport-Design (mit reflektierendem Label)

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Arthrose

GRÖSSEN Fesselumfang

	small	bis 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm
	xx-large	27 – 29 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Achillessehnenbandage
- **SOFTflex 3D-Gestrick** mit samtig-weicher Oberflächenstruktur für hohen Tragekomfort
- Großflächig strukturierte Silikonpelotte zur intermittierenden Massage der Achillessehne
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS SPORT-PLUS

- **COOLMAX®**: Leitet Feuchtigkeit vom Körper weg, trockenes und angenehmes Tragegefühl
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne, speziell in der Akutphase
- Eingearbeitete Komfortzone aus Dynamic-Flex-Funktionsgestrick
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- **Latexfreies Gestrick**

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, z.B. bei Haglundferse, Achillodynie, nach Operationen, z.B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN Fesselumfang

	small	bis 21 cm
	medium	21 – 23 cm
	large	23 – 25 cm
	x-large	25 – 27 cm
	xx-large	27 – 29 cm

rechts und links gleich

BORT Generation Knöchelbandage

REF 215 600

NEUES
DESIGN

Generation



Pos.Nr. 05.02.01.0084

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Hochelastische Dehnungszone im empfindlichen Fußrückenbereich erleichtert das An- und Ablegen
- Funktionsgestrick für hohen Tragekomfort
- Zwei strukturierte Silikonpelotten zur intermittierenden Massage

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Einfaches An- und Ablegen durch geöffnete Bauweise, auch bei eingeschränkter Beweglichkeit
- Einfaches und leichtes Fixieren der Bandage über zwei Klettverschlüsse
- Ansprechendes, funktionelles Design



BORT Generation:
Für mehr Mobilität im Alter
Produktsortiment mit besonderen
Handlingvorteilen

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

GRÖSSEN

Fesselumfang



small	_____	bis 21 cm
medium	_____	21 – 23 cm
large	_____	23 – 25 cm
x-large	_____	25 – 27 cm
xx-large	_____	27 – 29 cm

rechts und links gleich

BORT TaloStabil® Eco

REF 054 600



Med

Pos.Nr. 05.02.01.0007

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II
- **Auch für Kinder**, s. Seite 34

DAS ECO-PLUS


- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckminderung im Fesselabschluss
- **NEU: Plus-Größen-System**, dadurch sehr gute Passform

FARBEN: beige silber schwarz

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

GRÖSSEN

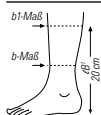

Kinder (blau)

- small
- medium
- large
- x-large
- xx-large
- xx-large plus*
- xxx-large*
- xxx-large plus*

b-Maß b1-Maß**

17 – 19 cm	
bis 21cm	
21 – 23 cm	
23 – 25 cm	
25 – 27 cm	
27 – 29 cm	32 – 34 cm
27 – 29 cm	34 – 36 cm
29 – 31 cm	36 – 38 cm
29 – 31 cm	38 – 40 cm

rechts und links gleich

*nur in Farbe silber

**b1-Maß wird zur Differenzierung der Plus-Größe benötigt

BORT
TaloStabil® Eco Plus
REF 054 650

NEU



Pos.Nr. 05.02.01.2xxx

PRODUKTMERKMALE

- Aktiv-Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ silber

DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN

		Fesselumfang
	small	_____ bis 21 cm
	medium	_____ 21 – 23 cm
	large	_____ 23 – 25 cm
	x-large	_____ 25 – 27 cm
	xx-large	_____ 27 – 29 cm
	xxx-large	_____ 29 – 31 cm

rechts und links gleich

BORT
AchilloStabil® Eco
REF 054 900


Pos.Nr. 05.02.01.1005

PRODUKTMERKMALE

- Achillessehnenbandage
- **SOFTflex-Gestrick** für mehr Elastizität, Stabilität und hohen Tragekomfort
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ silber ■ schwarz

DAS ECO-PLUS

- Samtig-weiche Oberflächenstruktur
- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z. B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

GRÖSSEN

		Fesselumfang
	small	_____ bis 21 cm
	medium	_____ 21 – 23 cm
	large	_____ 23 – 25 cm
	x-large	_____ 25 – 27 cm
	xx-large	_____ 27 – 29 cm

Maßanfertigung möglich.

rechts und links gleich

**BORT activemed
Knöchelbandage**

REF 220 600



Pos.Nr. 05.02.01.0072

PRODUKTMERKMALE

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage zur Weichteilkompression
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II

DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

FARBEN: beige mineralgrau
 graphit

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Distorsion, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, Arthrose

GRÖSSEN

Fesselumfang

	small	_____	bis 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

**BORT activemed
Knöchelbandage Plus****REF** 220 650**NEU**

Pos.Nr. 05.02.01.2xxx

PRODUKTMERKMALE

- Formgestrickte Sprunggelenkbandage mit Stabilo®-Band, teilelastisch, frei positionierbar
- Therapieunterstützende Positionierung des Fußes in Pronations-/Supinations- oder Neutralstellung
- Zwei Silikonpelotten zur intermittierenden Massage
- Mikrofasergestrick, weicher Griff
- Kompressions-Klasse II

FARBE: ■ graphit

DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des Sprunggelenks, Arthrose, Bänderschwäche, nach Gipsverband, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Supinationsprophylaxe

GRÖSSEN



Größe	Fesselumfang
small	bis 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts und links gleich

**BORT activemed
Achillessehnenbandage****REF** 220 900

Pos.Nr. 05.02.01.1021

PRODUKTMERKMALE

- Achillessehnenbandage
- Viscoelastische Pelotte im paraachillären Bereich zur intermittierenden Massage
- Fersenkeile zur Entlastung der Achillessehne in der Akutphase
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ mineralgrau
■ graphit

DAS MED-PLUS

- Druckverminderter Abschluss im Fesselbereich
- Formgestrickte Ferse mit guter Passform

INDIKATIONEN

Chronische oder posttraumatische Reizzustände oder Druckempfindlichkeit im Bereich der Achillessehne, Reizzustände bei Haglundferse, Achillodynie, Reizungen und Schmerzen der Achillessehne und der angrenzenden Gebiete, nach Operationen, z.B. Achillessehnenriss, Bursitis subachillea

BORT Helix S Spiraldynamik® USG-Bandage

REF 053 200



Pos.Nr. 05.02.01.2008

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkbandage zur Unterstützung der Rückfuß-Torsion und Aufrichtung des Fußgewölbes
- Auffächerung der Bänder durch Längsschnitte für eine körperschlüssige Anlage und optimierte Funktion
- Dünne, elastische Bänder
- 3-D formgestrickt
- Zwei Silikonpelotten
- Abgekettelter Abschlussrand an der Wade, extra weich
- Auch für Kinder, s. Seite 33

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Stabilisierung des Sprunggelenks und Aktivierung der Fußmuskulatur durch Kompressionswirkung
- Funktionell unterstützende Zügelung bei klassischen Fußdeformitäten (z. B. Senk-Spreiz-Fuß)
- Angenehmer Tragekomfort auch bei hoher Aktivität
- Intermittierende Massage
- Vereinfachte Handhabung
- Separat beigelegte Schlupfhilfe
- Verpackung: 1 Stück

INDIKATIONEN

Chronische, posttraumatische oder postoperative Weichteilreizzustände im Bereich des unteren Sprunggelenks und der Fußwurzel, z. B. bei Arthrose, Bandschwäche, fehlstatische Fußbeschwerden und Fußfehlformen aufgrund von Dysfunktion des USG z. B. Knick-, Senk- und Spreizfuß

GRÖSSEN

Fesselumfang



x-small/Kinder	17 – 19 cm
small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm
xx-large	27 – 29 cm

rechts oder links angeben

**BORT Stabilo®
Knöchelstütze****REF** 114 100

Pos.Nr. 23.02.02.1016

BORT TaloFX®**REF** 054 800

Pos.Nr. 23.02.02.1017

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkorthese **mit Schnürung** zur Stabilisierung von USG/OSG
- Sichere Handhabung durch variable Haken-Ösen-Elemente
- Stabilisierungsgrad individuell einstellbar
- U-förmiges Stabilisierungselement aus Kunststoff
- Unelastisches, atmungsaktives Material

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Stabilo®-Klettband zur zusätzlichen Stabilisierung und Begrenzung des Talus-Vorschubes
- Im Sport- und Straßenschuh tragbar

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen

GRÖSSEN

Fesselumfang

	x-small	_____	bis 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung von USG/OSG
- Bilaterale Schalen, mit Memoryschaum weich abgepolstert
- Kreuzzügelung mit Dynamic-Force-Control-Technologie (DFC)
- Elastisches, feuchtigkeitsableitendes Material
- **Auch für Kinder**, s. Seite 35

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- **Schlankes Design**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Begrenzung des Talus-Vorschubs mit hoher Stabilität
- Positionierung des Sprunggelenks in Pronation oder Supination

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN

Fesselumfang

	Kinder	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

rechts oder links angeben

BORT MalleoXpress

REF 100 560



Pos.Nr. 23.02.04.0006

BORT MalleoXpress Active

REF 100 580



Pos.Nr. 23.02.01.0006

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Mobilisierung und sicheren Stabilisierung des Sprunggelenks
- Modularer Aufbau, im Therapieverlauf abrüstbar
- Reduzierung des Talusvorschubs
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum
- **Zusätzliche Stabilisierung durch abrüstbares Sohlenmodul in der Akutphase**

FARBE: ■ schwarz/bordeaux


DAS MED-PLUS

- **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Einfache Handhabung und stufenlose Stabilisierung mit BOA® Fit System

INDIKATIONEN

Postoperativ, posttraumatisch, z. B. konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen (Grad II-III) und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, chronische Instabilitäten des OSG und USG, akute und chronische Kapselbandinstabilitäten

GRÖSSEN

	Fesselumfang
 small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenk-Soft-Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks
- Reduzierung des Talusvorschubs durch intelligente Zügführung
- Bilaterale Schalen, weich abgepolstert mit Memoryschaum

FARBE: ■ schwarz


DAS MED-PLUS

- **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen**
- Problemlos im Sport- und Straßenschuh tragbar
- Einfache und sichere Handhabung
- Stufenlose Stabilisierung mit BOA® Fit System

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von Sprunggelenkdistorsionen und Bandrupturen, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Arthritis, Bandverletzungen, Supinations-/Pronationstrauma

GRÖSSEN

	Fesselumfang
 small	19 – 21 cm
medium	21 – 23 cm
large	23 – 25 cm
x-large	25 – 27 cm

rechts oder links angeben

BORT MalleoStabil®-Orthese**REF** 100 500

Med

Pos.Nr. 23.02.02.0024

PRODUKTMERKMALE

- Kombi-Sprunggelenkorthese Air/Gel- und Schaumstoffpolster zur Stabilisierung des Sprunggelenks mit Begrenzung von Pro- und Supination
- Anatomisch geformte Kunststoff-Schalen
- Zwei Polster-Varianten als Set:
- Vorkühlbare Air/Gel-Polster zum Einsatz in der Akut-Phase
- Memoryschaum-Polster für angenehmen Tragekomfort in der Reha-Phase
- **Auch für Kinder**, s. Seite 34

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Keine Beeinträchtigung beim Gehen
- Leichtes Anlegen durch zirkuläre Klettverschlüsse

**BORT MalleoStabil®
SOFT-Orthese****REF** 100 520

- Nur mit Memoryschaum-Polster

**BORT MalleoStabil®
Air/Gel-Orthese****REF** 100 540

- Nur mit Air/Gel-Polster

INDIKATIONEN

Postoperative Protektion nach Bandnaht, konservative Therapie von SPGL-Distorsionen aller Schweregrade, funktionelle Therapie von Bandrupturen, SPGL-Frakturen (Weber A), chronische Bandinstabilitäten, Abkürzung der Gipsphase, Bandverletzungen, OSG-Distorsion, Pronations- und/oder Supinationstrauma, fibuläre Bandruptur

GRÖSSEN

Körpergröße

Größe 1/**Kinder** _____ bis 155 cm
 Größe 2 _____ über 155 cm


rechts und links gleich

BORT TaloXpress
REF 053 900



Pos.Nr. 23.02.02.1044

BORT Fußheberorthese
REF 054 300



Pos.Nr. 23.03.02.0006

PRODUKTMERKMALE

- Sprunggelenkorthese zur Stabilisierung des oberen und unteren Sprunggelenks
- Stabilisierungsgrad mittels Zügelung einstellbar
- Sehr dünne und schlanke Konstruktion
- Problemlos im Schuh tragbar
- Effektive Stabilisierung des Sprunggelenks bei hohem Tragekomfort

FARBE: ■ grau


DAS MED-PLUS

- **Komplett zu öffnen, dadurch leichtes Anlegen und einfachste Handhabung**
- Hohe Stabilisierung bei geringem Eigengewicht durch modernste Werkstoffe

INDIKATIONEN

Konservative Therapie von Sprunggelenkdistorstionen und Bandrupturen, postoperative Protektion nach Bandnaht/-rekonstruktion, Ruhigstellung bei entzündlichen Reizzuständen, Rheuma, Arthritis, Tendinitiden, Supinations-/Pronationstrauma

GROSSEN h-Maß

	small	_____	27 – 31 cm
	medium	_____	31 – 34 cm
	large	_____	34 – 40 cm

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Dynamische textile Fußheberorthese
- 8er-Zügelung
- Unelastischer, lateraler Zügel
- Unterstützung der Fußhebung im oberen Sprunggelenk
- Stabilisierung des unteren Sprunggelenks
- Pronierende Wirkung

FARBE: ■ schwarz


DAS MED-PLUS

- Einfache Anlage durch Zügelkennzeichnung
- Einhändig anlegbar
- Zwei Bandagenlängen im Vorfuß für optimale Hebelwirkung

INDIKATIONEN

Peroneus-Parese, besonders für leichtbetis mittlere Fuß- und Zehenheberpareren (Kraftgrad 2-4)

GROSSEN Fesselumfang

	x-small	_____	17 – 19 cm
	small	_____	19 – 21 cm
	medium	_____	21 – 23 cm
	large	_____	23 – 25 cm
	x-large	_____	25 – 27 cm

kurz ___ bis Schuhgröße 40
 lang ___ über Schuhgröße 40

rechts/links, kurz/lang angeben

**BORT
Peroneus-Schiene**

REF 470 620



SCHLAGANFALL

Med

Pos.Nr. 23.03.02.5022

**BORT Peroneus-Schiene
langsohlig**

REF 470 630



SCHLAGANFALL

Med

Pos.Nr. 23.03.02.5023

PRODUKTMERKMALE

- Fußheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fußes während der Schwungphase
- $\frac{3}{4}$ -Sohle bis zu den Zehengrundgelenken

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Hochflexible Halbschale im Wadenbereich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fußhebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	36 – 39
medium	40 – 43
large	44 – 48

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Fußheberorthese aus Polypropylen zur Anhebung des Fußes während der Schwungphase
- Langsohlige Ausführung

FARBE: weiß

DAS MED-PLUS

- Thermoplastische Nachbearbeitung
- Verwendung in geschlossenen Schuhen möglich
- Klettverschluss zur individuellen Anpassung unterschiedlicher Wadenumfänge
- Geringes Gewicht
- Leicht zu reinigen

INDIKATIONEN

Schlaffe Lähmung der Fußhebermuskulatur, geringe Mobilität des Patienten durch z. B. Peroneusparese, lumbaler Nervenwurzelschaden, Poliomyelitis, Schlaganfall

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	35 – 37
medium	37 – 39
large	39 – 41
x-large	41 – 44
xx-large	44 – 47

rechts oder links angeben

BORT
X-Walker kurz
REF 101 350

NEU

Mit
Vaku-
um-
System



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0080

BORT
X-Walker lang
REF 101 300

NEU

Mit
Vaku-
um-
System



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0081

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

Lieferbar 2. Quartal 2024

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion, Metatarsalfaktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	35 – 40
medium _____	40 – 45
large _____	45 – 50

rechts und links gleich

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

Lieferbar 2. Quartal 2024

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkelrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	35 – 40
medium _____	40 – 45
large _____	45 – 50

rechts und links gleich

BORT X-Walker Achillo

REF 101 320

NEU

Mit
Vakuum-
System



Med

Pos.Nr. 23.06.01.1023

PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Gelenkpositionen
- Lange Ausführung mit geringem Eigengewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit sowie Nachpassung des integrierten, großflächigen Vakuumkissens
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbare Fußlänge durch justierbaren Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfußstellung
- Stufenlose Weitenjustierung im Bereich der Wade
- Großflächiges Vakuum-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT X-Walker:

REF 100 370
BORT Unterziehstrumpf

REF 100 380
BORT Nässeschutzhülle

REF 100 390
BORT Schutzhülle für die Nacht

Lieferbar 2. Quartal 2024

INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, postoperativ bei Achillessehnennaht

GRÖSSEN

Schuhgrößen

small	_____	35 – 40
medium	_____	40 – 45
large	_____	45 – 50

rechts oder links angeben

BORT
Air Walker kurz
REF 100 350



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0058

BORT
Air Walker lang
REF 100 300



Med

Pos.Nr. 23.06.01.0059

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Kurze Ausführung
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Kurze Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Sprunggelenk
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

PRODUKTMERKMALE

- Orthese zur Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region in vorgegebener Position
- Lange Ausführung mit geringem Gewicht
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft
- Einstellbarer Zehenschutzbügel

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Lange Ausführung am Unterschenkel
- 2-Kammer-Air-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Vorfuß- und Mittelfußregion, Metatarsalfaktur, Weichteilverletzungen, Distorsionen

INDIKATIONEN

Prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung, stabile Fuß- und/oder Knöchelfrakturen, stabile distale Unterschenkelrakturen, schwere Sprunggelenksdistorsionen

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Schuhgrößen
x-small	bis 35
small	35 – 39
medium	39 – 43
large	43 – 46
x-large	über 46

rechts und links gleich

BORT Air Walker Achillo

REF 100 320



Med

Pos.Nr. 23.06.01.1014

PRODUKTMERKMALE

- Unterschenkel-Fuß-Orthese zur Immobilisierung in definierten, einstellbaren Gelenkpositionen
- Ergonomisches Design und komfortable Bedienbarkeit der beiden integrierten und einzeln regulierbaren Luftpolster
- Therapieunterstützende Laufsohle mit sehr guter Abrolleigenschaft

FARBE: ■ grau

DAS MED-PLUS

- Fünfstufiges Fersenkeil-Set zur Justierung der therapeutischen Spitzfußstellung
- 2-Kammer-Air-System zur formschlüssigen Einbettung und Stabilisierung von Fuß und Unterschenkel
- Inkl. 2x Unterziehstrümpfe

ZUBEHÖR FÜR ALLE BORT Air Walker:

REF 100 370

BORT Unterziehstrumpf Walker

REF 100 380

BORT Nässeschutzhülle

REF 100 390

BORT Schutzhülle für die Nacht

INDIKATIONEN

Achillessehnenruptur, prä- oder postoperative/posttraumatische Ruhigstellung der Unterschenkel-Fuß-Region, postoperativ bei Achillessehnennaht

GRÖSSEN

Schuhgrößen

x-small	_____	bis 35
small	_____	35 – 39
medium	_____	39 – 43
large	_____	43 – 46
x-large	_____	über 46

rechts oder links angeben

BORT Verbandschuh geschlossene Form

REF 930 300



Med

Pos.Nr. 31.03.03.4092

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, geschlossen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fußbettung und EVA-Laufsohle
- Kompletz zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

BORT Verbandschuh offene Form

REF 930 180



Med

Pos.Nr. 31.03.03.4091

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, offen
- Rutschfeste Laufsohle
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Individuelle An- und Nachpassungsmöglichkeiten der Fußbettung und Laufsohle
- Kompletz zu öffnen
- Leichtes Anziehen
- Hoher Tragekomfort

ZUBEHÖR:

REF 990 970 BORT Zehenkappe

INDIKATIONEN

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Keine zusätzliche Bettung erforderlich.

Schuhgrößen

34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

rechts und links gleich

Schuhgrößen

34 – 35
36 – 37
38 – 39
40 – 41
42 – 43
44 – 45
46 – 47

rechts und links gleich

**BORT
Verbandschuh Comfort****REF** 930 320

Med

Pos.Nr. 31.03.03.4093

**BORT Diabetiker-
Verbandschuh****REF** 930 400 R/930 400 L

Med

Pos.Nr. 31.03.03.4130

Polstereinlage
mit Waben-
elementen

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh
- Extra weit geschnittener Vorfuß- und Zehenbereich
- Reißverschluss im Bereich der Ferse
- Rutschfeste und flexible Laufsohle
- Verpackung: Paar oder Stück
(REF 930 320 R oder 930 320 L)

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Sicherer Halt und Komfort für empfindliche Füße
- Weite durch Klettverschluss individuell anpassbar
- Kompletz zu öffnen, komfortables Gehen

INDIKATIONEN

Postoperative oder sonstige Wunden, auch versorgt mit ausgedehnten, evtl. gepolsterten Verbänden, deren Heilungsvorgang über einen längeren Zeitraum verläuft und zumindest eine Teilbelastung des Fußes beim Gehen, auch außer Haus, zulässt. Eine zusätzliche Bettung ist nicht erforderlich.

Schuhgrößen

36	42
37	43
38	44
39	45
40	46
41	47

Lieferung paarweise oder einzeln

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Verbandschuh, offen mit abnehmbarer Vorfuß-Zehenkappe
- Herausnehmbare Weichpolstereinlage in Wabenstruktur
- Versteifte, rutschfeste Sohle mit Abroll-Hilfe
- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Weiche Polstereinlage mit einzeln herausnehmbaren Wabenelementen zur lokalen Druckentlastung
- Zusätzlicher Schutz durch abnehmbare Vorfuß-Zehenkappe
- Keine Nähte auf der Innenseite

INDIKATIONEN

Wunden im Fuß- und Knöchelbereich aufgrund von Diabetes mellitus, periphere arterielle Verschlusskrankheiten (PAVK), sonstige Wunden im Fuß- und Knöchelbereich, posttraumatisch, postoperativ

Schuhgrößen

35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48

rechts oder links angeben

BORT
Vorfußentlastungsschuh
REF 930 140



Med

Pos.Nr. 31.03.03.5063

PRODUKTMERKMALE

- Vorfußentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Mit zusätzlicher Zehenschutzkappe
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Rückfuß (Ferse)
- Individuelle An- und Nachpassung der Fußbettung und EVA-Laufsohle

INDIKATIONEN

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Vorfußbereich an der Fußsohle, postoperativ nach Korrekturosteotomien im Vorfußbereich

Schuhgrößen	
33 – 35	
36 – 38	
39 – 41	
42 – 44	
45 – 47	

rechts und links gleich

BORT
Fersenentlastungsschuh
REF 930 160



Med

Pos.Nr. 31.03.03.5064

PRODUKTMERKMALE

- Fersenentlastungsschuh
- Rutschfeste Laufsohle
- Flanke des Absatzes konkav gewölbt
- Atmungsaktive Materialien

- Verpackung: Stück

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Druckumverteilung auf den Mittel- bzw. Vorfuß
- Bessere Standsicherheit während des Auftretens
- Individuelle An- und Nachpassung der Fußbettung und EVA-Laufsohle

INDIKATIONEN

Postoperativ, Wunden/Verletzungen im Rückfußbereich und der Ferse

Schuhgrößen	
35 – 37	
38 – 40	
41 – 43	
44 – 46	

rechts und links gleich

BORT Metatarsal-Bandage mit Pelotte**REF** 112 070

Med

Pos.Nr. 05.01.01.2006

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Spreizfußbandage mit Pelotte
- Pelotte in Schlitztasche eingesetzt
- Unterstützung und Aufrichtung des Quergewölbes der Mittelfußknochen

- Verpackung: Paar

FARBE: ■ beige

DAS MED-PLUS

- Einfachste Handhabung
- Entnehmbare Pelotte

BORT Zweizug Knöchelstütze**REF** 054 500

Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Einfache Knöchelbandage
- Anatomische Form
- Geschlossene Ferse
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: ■ beige ■ blau

DAS MED-PLUS

- Sehr dünn, angenehm zu tragen
- Nahtloses Rundgestrick

INDIKATIONEN

Chronische Spreizfußbeschwerden, Senk- und Spreizfuß, Metatarsalgie

INDIKATIONEN

Sprunggelenkverletzung, nach Gipsverband, Sehnenreizungen

Umfang in cm um Vorfuß



_____ 16, 17, 18, 19, 20,
 _____ 21, 22, 23, 24, 25, 26

GRÖSSEN

Fesselumfang



small _____ bis 21 cm
 medium _____ 21 – 23 cm
 large _____ 23 – 25 cm
 x-large _____ 25 – 27 cm

Lieferung paarweise

rechts und links gleich

BORT Valco® SOFT
Hallux-Valgus-Schiene
REF 930 030

NEUES DESIGN



Pos.Nr. 23.01.01.0017

BORT Valco®
Hallux-Valgus-Schiene
REF 930 010



Pos.Nr. 23.01.01.0011

PRODUKTMERKMALE

- Textile Hallux-Valgus-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Großzehe und des Großzehengrundgelenks
- Seitliche Verstärkungsschiene aus Aluminium kann im Therapieverlauf durch einen Spiralfederstab ersetzt werden
- Plantare Spreizfußpelotte
- Fersenband zur Positionssicherung
- Mittels Klettverschluss komplett zu öffnen
- Zusätzliche Zehenschlaufen zur Redression der 2. – 5. Zehe

FARBE: ■ schwarz

DAS MED-PLUS

- Leicht anpassbar, auch auf Verbänden
- Hoher Tragekomfort durch weich gepolstertes Material
- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen

PRODUKTMERKMALE

- Hallux-Valgus-Orthese zur physiologischen Korrektur des Großzehengrundgelenks
- Anatomische Passform
- Drei verstellbare Verschlussbänder
- Einsatz in Ruhephasen
- Verpackung: Stück

FARBE: □ weiß/grau


DAS MED-PLUS

- Einfache und exakte Einstellung der Hebelkräfte
- Vollflächige Kaschierung der Schieneninnenseite mit Schaumstoff
- Lüftungsfenster im Zehenbereich

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

GRÖSSEN Umfang in cm um Vorfuß

	small	_____	16 – 19 cm
	medium	_____	19 – 22 cm
	large	_____	22 – 25 cm

rechts oder links angeben

GRÖSSEN Schuhgrößen

small	_____	bis 38
medium	_____	38 – 41
large	_____	über 41

rechts oder links angeben

**BORT Generation
Hallux-Valgus-Schiene****REF** 215 930Pelotte zur Entlastung des
Großzehengrundgelenkes

Generation



Pos.Nr. 23.01.01.0018

BORT Silikon-Fersenpolster**REF** 930 050

Med

Pos.Nr. 08.03.06.0049

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Orthese zur korrigierenden oder postoperativen Stabilisierung der Großzehe und des Großzehengrundgelenkes
- Stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes mittels seitlich positioniertem Korrekturband
- Entlastungspelotte auf Höhe des Großzehengrundgelenkes

FARBE: ■ blau

DAS GENERATION-PLUS

- Geringe Materialstärke und individuelle Einstellmöglichkeiten
- Tag und Nacht zu tragen
- Hoher Tragekomfort durch dünnes, weiches Material
- Einfach und leicht anzulegen
- Ansprechendes, funktionelles Design

INDIKATIONEN

Hallux valgus, nach Hallux-OP zur Sicherung des Behandlungserfolgs, postoperative Kapselentlastung

GRÖSSEN	Schuhgröße
Größe 0	35 – 37
Größe 1	38 – 40
Größe 2	41 – 43

rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenpolster zur Stoßabsorption
- Reduzierung der Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Höhe: 6 mm
- Verpackung: Paar

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

INDIKATIONEN

Achillodynie, Haglundferse, Rückfußbeschwerden, Stoßdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small	bis 38
medium	39 – 41
large	42 – 44
x-large	45 – 47

Lieferung paarweise

BORT
Fersenspornpolster
[REF] 950 220



Med

Pos.Nr. 08.03.06.0012

BORT Silikon-Fersensporn-
polster mit SoftSpot
[REF] 930 070



Med

Pos.Nr. 08.03.06.0009

PRODUKTMERKMALE

- Viscoelastisches Fersenspornpolster mit herausnehmbarem Polstermodul
- Reduzierung der Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Fußseite beschichtet, selbsthaftend
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenspornpolster mit weicher SoftSpot-Einlage
- Reduzierung der Stoßbelastung auf Sprung-, Knie- und Hüftgelenke sowie auf die Wirbelsäule
- Schalenförmige Fassung der Ferse
- Anatomische Weichbettung des Fersenspornes
- Höhe: 6 mm

- Verpackung: Paar

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

INDIKATIONEN

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, axiale Stoßdämpfung bei Beingelenkarthrose

INDIKATIONEN

Fersensporn, Achillodynie, Haglundferse, Stoßdämpfung bei Arthrose von Sprung-, Knie-, Hüftgelenk

GRÖSSEN	Schuhgröße
A _____	32 – 35
B _____	36 – 40
C _____	41 – 44
D _____	45 – 48

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	bis 38
medium _____	39 – 41
large _____	42 – 44
x-large _____	45 – 47

Lieferung paarweise

Lieferung paarweise

**BORT
Verkürzungsausgleich****[REF]** 950 240

Med

Pos.Nr. 08.03.06.1001

PRODUKTMERKMALE

- Viscoelastisches Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Fußseite beschichtet, selbsthaftend
- Höhen: 5 mm, 10 mm

- Verpackung: Stück

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

**BORT Verkürzungsausgleich
aus Silikon****[REF]** 930 200

Med

Pos.Nr. 08.03.06.1010

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Fersenkissen zum Beinlängenausgleich
- Aus dauerhaftem Silikon
- Höhen: 3 mm, 5 mm, 8 mm, 10 mm
- **Auch für Kinder**, s. Seite 35

- Verpackung: Stück

DAS MED-PLUS

- Rutschfest
- Für alle Schuharten geeignet
- Abwaschbar
- Hygienisch

INDIKATIONEN

Ausgleich von Beinlängendifferenzen, Achillessehnenbeschwerden (Achillodynie)

GRÖSSEN	Schuhgrößen
small _____	bis 40
large _____	über 40
Höhen _____ 5 mm / 10 mm	
rechts und links gleich	

GRÖSSEN	Schuhgrößen
Kinder _____	33 – 35
small _____	36 – 39
medium _____	40 – 43
large _____	44 – 47
Höhen _3 mm / 5 mm / 8 mm / 10 mm	
rechts und links gleich	

Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung

REHA-Produkte

BORT AktiVen® Anziehhilfe für medizinische Kompressionsstrümpfe

REF 599 010



AktiVen®

Pos.Nr. 02.40.01.3059

PRODUKTMERKMALE

- Erleichtert das Anziehen von medizinischen Kompressionsstrümpfen
- Sichere und selbstständige Handhabung
- Auch bei reduzierter Kraft und eingeschränkter Beweglichkeit

FARBE: weiß/grau

DAS AKTIVEN®-PLUS


- Kein Verrutschen durch sichere Befestigung
- Höchste Produktqualität
- Ansprechendes funktionelles Design

INDIKATIONEN

Krankheitsbilder oder Behinderungen mit erheblichen Funktionsstörungen der Finger-, Hand- bzw. Armgelenke, v.a. der Greiffunktion, die das sachgerechte Anziehen von ärztlich verordneten Kompressionsstrümpfen ohne Hilfsmittel unmöglich machen, z. B. bei hochgradig entzündlichen oder erheblich verschleißenden Gelenkerkrankungen, Lähmungsbildern, deformierenden Erkrankungen im Handbereich, Verletzungsfolgen, Amputationen, Fehlbildungen; Spezielle Strumpf- bzw. Strumpfhosenanziehhilfen für Kompressionsstrümpfe mit Griffverlängerung sind indiziert wegen der Unmöglichkeit, die Arme an die Strümpfe heranzuführen, z. B. bei weitgehenden Wirbelsäulen-, Hüft-, Kniegelenkversteifungen, Adipositas per magna

GRÖSSEN

Wadenumfang

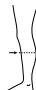	Größe 1	< 40 cm
	Größe 2	> 40 cm

BORT Therapieknet Standard**REF** 951 500 (80 g)**REF** 951 600 (440 g)

Med

Pos.Nr. 32.07.01.1001 (80 g)

PRODUKTMERKMALE

- Therapieknet aus 100 % Silikon
- 6 verschiedene Festigkeiten
- Latexfrei
- Dosengrößen: 80 g (**REF** 951 500), 440 g (**REF** 951 600)
- Angegebene Pos.Nr. nur für 80 g Dose

DAS MED-PLUS

- Stärkung der Muskulatur an Fingern, Hand und Unterarm
- Durchführung umfangreicher therapeutischer Finger- und Handübungen
- Übungsanleitung mit vielen Beispielen liegt jeder Dose bei

INDIKATIONEN

Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit der Hand

FESTIGKEIT

FESTIGKEIT	Farbe
extra-weich _____	hellblau
weich _____	pink
mittel-weich _____	hellgrün
mittel _____	dunkelblau
mittel-fest _____	violett
fest _____	dunkelgrün

BORT Codyn® Sitzkissen**REF** 190 530

Med

Pos.Nr. 20.39.01.0017

PRODUKTMERKMALE

- Spezielles Ringkissen mit Aussparung im Steißbeinbereich
- **Aufblasbar**, mit Ventil
- Lieferung inkl. Handluftpumpe
- Maße: ca. 45 cm × 45 cm, Innendurchmesser ca. 16 cm

FARBE: ■ blau

DAS MED-PLUS

- Geeignet für jede Sitzgelegenheit
- Aufblasbar, daher einfache Mitnahme und überall einsetzbar

INDIKATIONEN

Coccygodynie, Zustand nach Steißbeinprellung und -fraktur, perianale Entlastung bei Hämorrhoiden, nach Enddarmoperationen, periproktitischer Abszess, Zustand nach Episiotomie

GRÖSSE

Nur eine Größe

**BORT EasyLife®
Greifhilfen**



Med

REF und Pos.Nr. je nach Ausführung
(siehe unten)

**BORT Greiflippe
aus Aluminium**
REF 117 170



Med

Pos.Nr. 02.40.04.1000

PRODUKTMERKMALE

- Hochwertige Greifhilfe zum Greifen von großen und kleinen Gegenständen (Flaschen, Nadeln, etc.)
- Spezielle Gummilippen erlauben ein dosiertes und gezieltes Greifen von Gegenständen
- Arretierung: Gegriffene Gegenstände werden auch nach Loslassen des Griffhebels gehalten
- Auch als zusammenklappbare Variante erhältlich: **REF** 118 100 mit Länge 75 cm, eingeklappt 45 cm

DAS MED-PLUS

- Zwei Einstellmöglichkeiten:
 - Kurzer Hebelweg: normaler Kraftaufwand bei uneingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
 - Langer Hebelweg: Geringerer Kraftaufwand bei eingeschränkter Greiffähigkeit der Hand
- Zusammenklappbare Variante ideal für unterwegs und im Rollstuhl

PRODUKTMERKMALE

- Standard-Greiflippe aus Aluminium
- Spezielle Gummilippen mit anatomischem Griff
- Länge: 75 cm

DAS MED-PLUS

- Zum Greifen selbst kleinster Gegenstände (Nadeln, etc.)

INDIKATIONEN

Z. B. Paraplegie, Bewegungseinschränkung

Pos.Nr.	Längen
Pos. Nr. 02.40.04.1000	75 cm (REF 117 170)
Pos. Nr. 02.40.04.1001	50 cm (REF 118 150)
Pos. Nr. 02.40.04.1001	75 cm (REF 118 170)
Pos. Nr. 02.40.04.1001	90 cm (REF 118 190)
Pos. Nr. 02.40.04.1002	klappbar 75/45 cm (REF 118 100)

**BORT Polster
für Unterarmgehstützen****REF** 190 800

Med

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Selbstklebende Polster für Unterarmgehstützen
- Textilbeschichtete Oberfläche, problemlos zuschneidbar
- Zuschneidbar, daher individuell einzusetzen
- Maße: 11 × 7,5 cm
- Verpackung: Paar

FARBEN: ■ blau ■ schwarz

**BORT Griffpolster
für Unterarmgehstützen****REF** 190 820

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Innenseite, strapazierfähiges Neopren
- Außenseite, hautfreundliche Textilkaschierung
- Einfaches Fixieren durch Klettverschluss
- Hohe Formstabilität
- Maße: 10 × 10 cm
- Verpackung: Paar

FARBE: ■ schwarz

ANWENDUNGEN

Druckbeschwerden durch außergewöhnliche Belastungen der Hand oder der Ellenbogenregion

GRÖSSE

Nur eine Größe

**BORT
Spezial-Waschmittel****REF** 599 070

OTC

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Speziell für medizinische Kompressionsgestricke
- Volle Waschkraft ab 30 °C
- Einfache Anwendung für den täglichen Gebrauch

INHALT: 250 ml

DAS OTC-PLUS

- Löst Hautfette bereits bei niedrigen Temperaturen
- Biologisch abbaubar
- Transparente Flasche zeigt den Füllstand
- pH-neutral

ANWENDUNGEN

Zum Waschen medizinischer Kompressionsgestricke, umweltschonendes Waschen, hohe Ergiebigkeit

Qualitätsmarken zur individuellen Rundum-Versorgung. OTC-Markenprodukte



Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung.



Stabilisierende Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.



Stabilisierende Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.



Das Wärme-Programm zum Wohlfühlen.



Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel.



Schützt empfindliche Füße - mit Textilbezug.



Bunte Vielfalt für Therapie und Sport. Elastische Binden und Kinesiotapes.

Praktische Helfer zur täglichen Unterstützung.



**EasyLife®
7-Tage-Tabletten-Box**
[REF] 108 090



OTC

PRODUKTMERKMALE

- Übersichtlicher 7-Tage-Planer
- Blindenschrift
- Maße: 16 × 3 × 2 cm

FARBEN: transparent blau

**EasyLife®
Tabletenteiler**
[REF] 108 040



OTC

PRODUKTMERKMALE

- Rostfreie, scharfe Klinge

FARBEN: transparent blau

DAS EASYLIFE®-PLUS

- Kontrollierte und sichere Einnahme von Medikamenten
- Einfach zu öffnen

DAS EASYLIFE®-PLUS

- Einfaches und sicheres Zerteilen von Tabletten und Medikamenten
- Leichte Reinigung

Die Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.

active
COLOR®



DAS ACTIVECOLOR®-PLUS

- ⊕ Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- ⊕ Effektive Stabilisierung
- ⊕ Made in Germany

**ActiveColor®
Handgelenkbandage**
REF 1410



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Handgelenkbandage mit variablem Klettverschluss
- Kompression individuell regulierbar

FARBEN: weiß beige blau
 schwarz


DAS ACTIVECOLOR®-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN Umfang Handgelenk


	medium bis 19 cm large 19–21 cm
-------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

rechts und links gleich

active
COLOR®

**ActiveColor®
Daumen-Hand-Bandage**


REF 1470

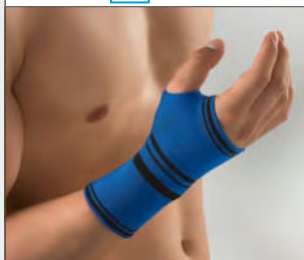

Keine Kassenleistung

**ActiveColor®
Ellenbogenbandage**

REF 1420

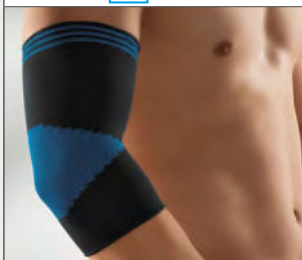

Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenausparung

FARBEN: beige blau schwarz

PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II


FARBEN: beige blau schwarz

- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick
- Bei der Arbeit oder in der Freizeit

INDIKATIONEN


Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small	_____	bis 15 cm
	medium	_____	15–17 cm
	large	_____	17–19 cm
	x-large	_____	19–21 cm

rechts und links gleich


GRÖSSEN Umfang Ellenbogen

	small	_____	bis 26 cm
	medium	_____	26–28 cm
	large	_____	28–30 cm
	x-large	_____	30–32 cm

rechts und links gleich

Die Gelenkbandagen für Arbeit und Freizeit.

**ActiveColor®
Rückenbandage**
REF 1490




Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Leichte Aktivbandage zur muskulären Stabilisierung der LWS
- Zwei Stäbe im dorsalen Bereich
- Höhe: ventral 17 cm, dorsal 22 cm

FARBEN: ■ beige ■ schwarz

**ActiveColor®
Oberschenkelstütze**
REF 1430



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Oberschenkel-Aktivbandage
- Anatomisch flachgestrickt
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 21 cm

FARBEN: ■ beige ■ blau


DAS ACTIVECOLOR®-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick

INDIKATIONEN

Rückenschmerzen, Hexenschuss, Überlastung

GRÖSSEN

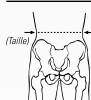

	Umfang Taille
small	65–80 cm
medium	80–95 cm
large	95–110 cm
x-large	110–125 cm

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN Umfang Oberschenkelmitte




small	bis 43 cm
medium	43–50 cm
large	50–56 cm
x-large	56–61 cm

rechts und links gleich

active
COLOR®

**ActiveColor®
Kniebandage**
REF 1440

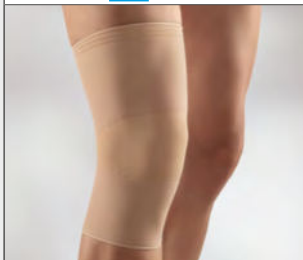

Keine Kassenleistung

**ActiveColor®
Knöchelbandage**
REF 1450



Keine Kassenleistung

PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte Kniebandage zur Vorbeugung bei Überbelastung
- Stützeffekt
- Rutschsicherer Sitz
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: beige blau schwarz

PRODUKTMERKMALE


- Rundgestrickte Knöchelbandage zur Unterstützung des Sprunggelenks
- Anatomische Form, ausgestellte Pendelferse
- Tragbar im Sport- oder Straßenschuh
- Kompressions-Klasse II

FARBEN: beige blau schwarz


- Bei der Arbeit, oder in der Freizeit

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN	Knieumfang
 small	bis 32 cm
medium	32–37 cm
large	37–42 cm
x-large	42–47 cm
xx-large	47–52 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Fesselumfang
 small	bis 21 cm
medium	21–23 cm
large	23–25 cm
x-large	25–27 cm
xx-large	27–29 cm

rechts und links gleich

Die Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.

active
COLOR® SPORT




DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- ⊕ Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: **AQUARIUS**
- ⊕ Unterstützung von bestimmten Muskelgruppen bei starker Beanspruchung
- ⊕ Made in Germany

ActiveColor® Sport Daumen-Hand-Bandage

REF 1470 SP

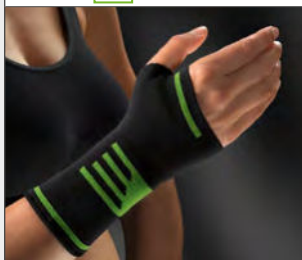

Keine Kassenleistung

AQUARIUS

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Handgelenkbandage zur leichten Stabilisierung
- Anatomisch formgestrickt
- Eingefasste Daumenausparung
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: **AQUARIUS**

FARBE: ■ schwarz/grün


DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN Umfang Handgelenk


	small	_____	bis 15 cm
	medium	_____	15–17 cm
	large	_____	17–19 cm
	x-large	_____	19–21 cm

rechts und links gleich

active
COLOR® SPORT

**ActiveColor® Sport
Daumen-Schiene**

REF 1370 SP

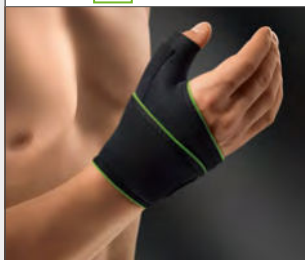


Keine Kassenleistung



**ActiveColor® Sport
Handgelenkbandage**

REF 1410 SP

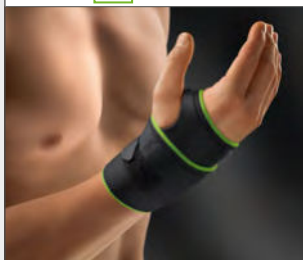

Keine Kassenleistung



PRODUKTMERKMALE

- Leichte Neoprenbandage zur Stabilisierung von Daumengrund- und Daumensattelgelenk
- Unterstützend bei Belastungssituationen
- Zusätzliches Stabilisierungselement am Daumen
- Variabel einstellbar durch Klettverschluss


FARBE: ■ schwarz/grün

PRODUKTMERKMALE

- Leichte Neoprenbandage zur Stabilisierung des Handgelenks
- Unterstützend bei Belastungssituationen
- Variabel einstellbar durch Klettverschluss

FARBE: ■ schwarz/grün


DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Keine Beeinträchtigung der Greiffunktion
- Volle Unterstützung bei sportlicher Aktivität
- Auch im Wasser tragbar 

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN Umfang Handgelenk

	small/	
	medium	_____ 13 – 17 cm
	large/	
	x-large	_____ 17 – 21 cm

rechts oder links angeben


GRÖSSE

Nur eine Größe

rechts oder links angeben

Die Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.

ActiveColor® Sport Ellenbogenbandage REF 1420 SP

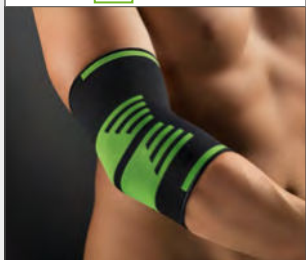

Keine Kassenleistung


AQUARIUS

PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte, komprimierende Ellenbogenbandage
- Längs- und querelastisch
- Kompressions-Klasse II
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: **AQUARIUS**

FARBE: ■ schwarz/grün

ActiveColor® Sport Epi-Spange REF 1460 SP

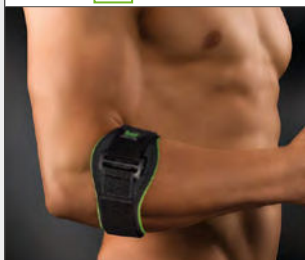

Keine Kassenleistung



PRODUKTMERKMALE


- Leichte Neopren-Spange zur Entlastung der Muskelansätze am Ellenbogen
- Spangendruck individuell einstellbar über zirkuläres Band

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick

DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Volle Unterstützung bei sportlicher Aktivität
- Auch im Wasser tragbar 


INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

INDIKATIONEN


Überlastungsprophylaxe, belastungsbedingte Reizzustände, sog. Tennis-/ Golfarm

GRÖSSEN Umfang Ellenbogen

	small	_____ bis 26 cm
	medium	_____ 26 – 28 cm
	large	_____ 28 – 30 cm
	x-large	_____ 30 – 32 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN Umfang Unterarm
(5 cm unter Ellenbogengelenk)


	Größe 1	_____ 23 – 25 cm
	Größe 2	_____ 25 – 27 cm
	Größe 3	_____ 27 – 30 cm
	Größe 4	_____ 30 – 34 cm

rechts und links gleich

active
COLOR® SPORT

**ActiveColor® Sport
Oberschenkelstütze**

REF 1430 SP

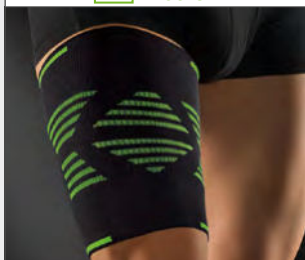

Keine Kassenleistung

AQUARIUS

**ActiveColor® Sport
Wadenstütze**

REF 1320 SP



Keine Kassenleistung

AQUARIUS

PRODUKTMERKMALE

- Oberschenkel-Aktivbandage
- Anatomisch flachgestrickt
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 21 cm
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: **AQUARIUS**

FARBE: ■ schwarz/grün

PRODUKTMERKMALE

- Komprimierende Wadenbandage
- Anatomisch formgestrickt
- Kompressions-Klasse II
- Länge: 23 cm
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: **AQUARIUS**

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS

- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick
- Bei der Arbeit, in der Freizeit oder beim Sport

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN Umfang Oberschenkelmitte

	small	_____	bis 43 cm
	medium	_____	43–50 cm
	large	_____	50–56 cm
	x-large	_____	56–61 cm

rechts und links gleich

INDIKATIONEN

Nach Verletzungen an der Wade, zur Nachbehandlung bei Sportverletzungen, z. B. Muskelfaserriss, Muskelzerrung

GRÖSSEN Wadenumfang


	small	_____	bis 33 cm
	medium	_____	33–38 cm
	large	_____	38–43 cm
	x-large	_____	43–47 cm

rechts und links gleich

Die Gelenkbandagen für Freizeit und Sport.

ActiveColor® Sport Kniebandage

REF 1440 SP

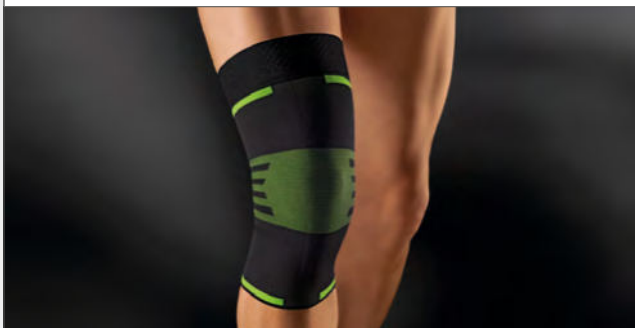

Keine Kassenleistung

AQUARIUS

PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte Kniebandage zur Vorbeugung bei Überbelastung
- **Mit zusätzlichem Silikonhaftband** in allen Größen, für rutschsicheren Sitz
- Optimale Haftung und Druckverteilung am Oberschenkel-Abschlussrand
- Kompressions-Klasse II
- Feuchtigkeitsregulierend mit Komfortfaser: **AQUARIUS**

FARBE: ■ schwarz/grün

DAS ACTIVECOLOR® SPORT-PLUS


- Vorbeugende Anwendung bei zu erwartender Überlastung
- Stabilisierung durch komprimierendes Gestrick

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN

Knieumfang

	small _____	bis 32 cm
	medium _____	32 – 37 cm
	large _____	37 – 42 cm
	x-large _____	42 – 47 cm
	xx-large _____	47 – 52 cm

rechts und links gleich

active
COLOR® SPORT

**ActiveColor® Sport
Knöchelbandage**

REF 1450 SP



Keine Kassenleistung

AQUARIUS

**ActiveColor®
Sportkompressionsstrumpf**

REF 1310 SP



Keine Kassenleistung

AQUARIUS

PRODUKTMERKMALE

- Rundgestrickte Knöchelbandage zur Unterstützung des Sprunggelenks
- Anatomische Form, ausgestellte Pendelferse
- Tragbar im Sport- oder Straßenschuh
- Kompressions-Klasse II
- Feuchtigkeitsregulierende mit Komfortfaser: **AQUARIUS**

PRODUKTMERKMALE

- Sportkompressionsstrumpf aus offenporigem Mesh-Gestrick
- Gutes Klimamanagement und hohe Atmungsaktivität
- Gleichmäßiger Kompressionsdruck erhöht die Blutzirkulation sowie die venöse Leistung unter Belastung
- Verkürzt die Muskelregenerationszeit
- Verpackung: Paar

FARBE: ■ schwarz/grün

FARBE: ■ schwarz/grün

- Bei der Arbeit, in der Freizeit oder beim Sport

INDIKATIONEN

Überlastungsprophylaxe, Zerrung, Verstauchungen, belastungsbedingte Reizzustände

GRÖSSEN	Fesselumfang
small	_____ bis 21 cm
medium	_____ 21–23 cm
large	_____ 23–25 cm
x-large	_____ 25–27 cm
xx-large	_____ 27–29 cm




rechts und links gleich

GRÖSSEN	Wadenumfang
Größe II	_____ 25–31 cm
Größe III	_____ 31–38 cm
Größe IV	_____ 38–44 cm
Größe V	_____ 44–50 cm



Das Wärme-Programm zum Wohlfühlen.

**CLIMACare®
Schulterwärmer**
REF 106 500

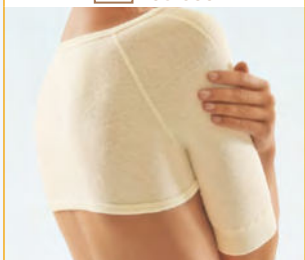


PRODUKTMERKMALE

- Schutz bei Kälte und Zugluft im Bereich Schulter-Nackenpartie
- Materialzusammensetzung: 80 % Baumwolle, 20 % Angora
- Verpackung: 1 Stück

FARBE: weiß

**CLIMACare®
Leibwärmer**
REF 106 600

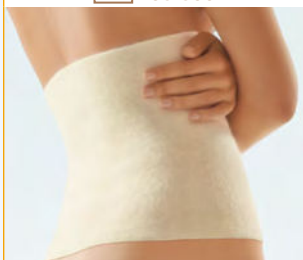

PRODUKTMERKMALE

- Sehr guter Schutz bei Kälte im Lendenwirbelbereich
- Materialzusammensetzung: 44 % Angora, 26 % Schurwolle, 26 % Polyamid, 4 % Elasthan
- Verpackung: 1 Stück

FARBEN: beige weiß silber
 anthrazit

DAS CLIMACARE®-PLUS

- Wohltuende Wärme
- Hoher Angoraanteil

GRÖSSEN	Konfektionsgröße	
	Damen	Herren
small	36/38	48
medium	40/42	50
large	44/46	52
x-large	48/50	54

GRÖSSEN	Umfang Hüfte	
	small	bis 98 cm
medium	98 – 108 cm	
large	108 – 118 cm	
x-large (beige, silber, anthrazit)	118 – 128 cm	





CLIMA Care®

CLIMACare® Gelenkwärmer

REF 106 700



PRODUKTMERKMALE

- Gelenkwärmer für Knie und Ellenbogen (nur Größe small)
- Elastisch gestrickt, keine Bewegungseinschränkung
- Materialzusammensetzung: 40 % Angora, 30 % Polyamid, 25 % Schurwolle, 5 % Elasthan
- Verpackung: Paar

FARBEN: beige weiß

CLIMACare® Fußwärmer

REF 106 800



PRODUKTMERKMALE

- Wärmt kalte Füße
- Antirutsch-Noppen, für Gehsicherheit im Hausbereich
- Materialzusammensetzung: 67 % Schurwolle, 25 % Angora, 8 % Polyamid
- Strapazierfähig
- Verpackung: Paar

FARBEN: weiß anthrazit

- Unauffällig unter der Kleidung tragbar
- Hoher Tragekomfort durch optimale Materialzusammensetzung

GRÖSSEN	Gelenkumfang
small	bis 32 cm
medium	32 – 38 cm
large	38 – 44 cm
x-large (beige)	44 – 50 cm

rechts und links gleich

GRÖSSEN	Schuhgröße
x-small (anthrazit)	31 – 35
small	36 – 38
medium	39 – 40
large	ab 41

Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel.

PediSoft® Zehenseparator
REF 107 020



Silikon

*Länge: small 3,5 cm, large 4,5 cm, x-large 5,0 cm

PRODUKTMERKMALE

- Schmäler Zehenseparator aus Silikon
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In drei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

*Länge = Länge Zehenseparator

PediSoft® Zehenseparator mit Ring
REF 107 650



Gel

*Länge: small 2,1 cm oder large 2,6 cm

PRODUKTMERKMALE

- Schmäler Zehenseparator aus Gel mit Ring zur sicheren Fixierung
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**

*Länge = Länge Zehenseparator

PediSoft® Silikonring
REF 107 060



Silikon

*Ø: small 12 mm oder large 15 mm

PRODUKTMERKMALE

- Silikonring zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

*Ø = Innendurchmesser Ring

PediSoft® Zehen-/Fingerhaube
REF 107 640



Gel

*Ø: small 20 mm oder large 30 mm

PRODUKTMERKMALE

- Haube aus Gel mit Lüftungsloch
- Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Inhalt: **2 Stück**

*Ø = Außendurchmesser Haube

DAS PEDISOFT®-PLUS

- Höchster Tragekomfort durch das weiche und glatte Silikon & Gel
- Optimale Anpassung an jede Fußkontur durch „Memory-Effekt“
- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück

PEDI SOFT®

Silikon & Gel

PediSoft® Zehenpolster

REF 107 100



Silikon

nur eine Größe, rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Zehenpolster aus Silikon
- Zur Entlastung der Zehen
- Fixierung durch Zehenschlauch
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

PediSoft® Vorfußeinlage

REF 107 120



Silikon

nur eine Größe

PRODUKTMERKMALE

- Vorfußeinlage aus Silikon
- Druckentlastung im Vorfußbereich
- Wird direkt in den Schuh eingelegt
- Dauerhaft strapazierfähig ohne zu verrutschen
- Inhalt: **1 Paar**, inkl. Pflegepulver

PediSoft® Vorfußschutz

REF 107 680



Gel

nur eine Größe

PRODUKTMERKMALE

- Vorfußschutz aus Gel
- Zur Druckentlastung am Ballen oder Fußgewölbe
- Mit einem **Gel-Ring** am Zeh fixiert
- Inhalt: **1 Paar**

PediSoft® Vorfußpolster

REF 107 080



Silikon

nur eine Größe

PRODUKTMERKMALE

- Vorfußpolster aus Silikon
- Druckentlastung im Vorfußbereich
- Wie bei einem Zehenspreizer wird das Vorfußpolster am Zeh fixiert
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

- Für den häufigen Gebrauch konzipiert, da strapazierfähig
- Hygienisch und langlebig
- Einfache Reinigung mit Seife, bei Bedarf zu desinfizieren

Sanfter Fußschutz aus Silikon & Gel.

**PediSoft®
Zehenspreizer**
REF 107 010



Silikon

*Länge: small 2,5 cm oder large 3,0 cm

**PediSoft®
Zehenspreizer mit Ring**
REF 107 630



Gel

*Länge: small 2,5 cm oder large 3,0 cm

PRODUKTMERKMALE

- Breiter ergonomischer Zehenspreizer aus Silikon
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**, inkl. Pflegepulver

*Länge = Länge Zehenspreizer

PRODUKTMERKMALE

- Breiter ergonomischer Zehenspreizer aus Gel mit Ring zur sicheren Fixierung
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**

*Länge = Länge Zehenspreizer

**PediSoft® Zehen-
spreizer mit Doppel-Ring**
REF 107 150



Gel

*Länge: small 1,5 cm oder large 3,5 cm

PRODUKTMERKMALE

- Doppelter Zehenspreizer aus Gel zur sicheren Fixierung
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- In zwei Längen verfügbar
- Inhalt: **2 Stück**

*Länge = Länge Zehenspreizer

**PediSoft® Zehenspreizer
mit Ballenschutz**
REF 107 140



Gel

nur eine Größe

PRODUKTMERKMALE

- Ergonomischer Zehenspreizer mit Ballenschutz aus Gel
- Trennt verlagerte und eng anliegende Zehen
- Inhalt: **1 Stück**

DAS PEDISOFT®-PLUS

- Höchster Tragekomfort durch das weiche und glatte Silikon & Gel
- Optimale Anpassung an jede Fußkontur durch „Memory-Effekt“
- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück

PEDI SOFT®

Silikon & Gel

PediSoft® Ballenschutz

REF 107 030



Silikon

nur eine Größe

PediSoft® Kleinzehenschutz

REF 107 130



Silikon

nur eine Größe

PRODUKTMERKMALE

- Silikon-Ballenschutz zum Schutz vor Druckstellen, z. B. im Schuh
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

PRODUKTMERKMALE

- Kleinzehenschutz aus Silikon zum Schutz der Kleinzeh
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

PediSoft® Fersenkissen mit SoftSpot

REF 107 070



Silikon

small (bis Schuhgr. 40), large (ab Schuhgr. 41)

PRODUKTMERKMALE

- Zur Dämpfung und Entlastung bei Fersensporn
- Bei Beschwerden im Sprung-, Knie- und Hüftgelenk, im Fersenbereich und im Spann
- Höhe: 6 mm
- Inhalt: **1 Paar**

- Für den häufigen Gebrauch konzipiert, da strapazierfähig
- Hygienisch und langlebig
- Einfache Reinigung mit Seife, bei Bedarf zu desinfizieren

Mit Textilbezug für empfindliche Füße.

PediSoft® TexLine

Vorfuß-Pad

REF 137 080



small (bis Schuhgr. 40) oder large (ab Schuhgr. 41)

PRODUKTMERKMALE

- Zur Druckentlastung im Vorfußbereich
- Dank dem Memory-Effekt kehrt das Material in die Ursprungsform zurück
- Inhalt: **1 Paar**

PediSoft® TexLine

Hallux-Pad

REF 137 030



small (bis Schuhgr. 40) oder large (ab Schuhgr. 41)

PRODUKTMERKMALE

- Zur Druckentlastung am Grundgelenk im Schuh
- Hautfreundlich im Schuh
- Kein Verrutschen im Schuh
- Inhalt: **1 Stück**

PediSoft® TexLine Vorfuß-/Hallux-Pad

REF 137 040



small (bis Schuhgr. 40) oder large (ab Schuhgr. 41)

PRODUKTMERKMALE

- Zur gleichzeitigen Druckentlastung im Vorfuß- und Ballenbereich
- Umschließt weich den Ballen und das Grundgelenk
- Inhalt: **1 Paar**

PediSoft® TexLine Mittelfuß-Ballen-Pad

REF 137 090



small (bis Schuhgr. 40) oder large (ab Schuhgr. 41)

PRODUKTMERKMALE

- Zur Druckentlastung an Ballen und Kleinzehe, sowie im Vorfußbereich
- Inhalt: **1 Paar**

DAS PEDISOFT®-TEXLINE-PLUS

- Polster verteilen optimal den Druck
- Schutz vor zusätzlichem Druck von außen
- Angenehmes Tragegefühl durch Textilbezug
- Optimale Anpassung an jede Fußkontur durch „Memory-Effekt“

PEDI SOFT®

Textline

PediSoft® TexLine Hallux-Valgus-Schiene

REF 137 160



Gr. 0 (Schuhgr. 35–37), Gr. 1 (Schuhgr. 38–40),
Gr. 2 (Schuhgr. 41–43)
rechts oder links angeben

PediSoft® TexLine Vorfußkappe

REF 137 130



small (bis Schuhgr. 40), large (ab Schuhgr. 41)

PRODUKTMERKMALE

- Soft-Schiene mit Pelotte zur Druckentlastung des Großzehengrundgelenks bei Hallux valgus
- Stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes mittels seitlich positioniertem Korrekturband
- Inhalt: **1 Stück**

PRODUKTMERKMALE

- Zur Druckentlastung des Zehen-/Vorfußbereichs
- Dünne Ausführung zur problemlosen Anwendung im Schuh
- Hautfreundliches Material
- Inhalt: **1 Paar**

PediSoft® TexLine Hammerzeh-Korrektur-Pad

REF 137 120



small (bis Schuhgr. 39) oder large (ab Schuhgr. 40)

PediSoft® TexLine Zehen-Pad

REF 137 100



nur eine Größe, rechts oder links angeben

PRODUKTMERKMALE

- Zehenkorrektur-Pad mit verstellbaren, elastischen Zehenschlaufen
- Korrigiert die Fehlstellung von Hammerzehen
- Bis zu drei Zehen gleichzeitig korrigierbar
- Inhalt: **1 Stück**

PRODUKTMERKMALE

- Zehenpolster aus Silikon
- Zur Entlastung der Zehen
- Fixierung durch Zehenschlauch
- Inhalt: **1 Stück**

- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- Sehr hygienisch
- Maschinenwaschbar bei 30 °C (außer Hammerzeh-Korrektur-Pad und Druckschutz)

Mit Textilbezug für empfindliche Füße.



PediSoft® TexLine Druckschutz
REF 137 110



s (Ø 18 mm), m (Ø 21 mm), l (Ø 25 mm)

PediSoft® TexLine Zehen-/Fingerschutz-Pad
REF 137 010



s (Ø 11 mm), m (Ø 14 mm), l (Ø 17 mm)

PRODUKTMERKMALE

- Schaumstoffschlauch zur Abpolsterung von Druckstellen
- Kann individuell mit einer Schere auf die passende Länge zugeschnitten werden
- Länge: **12 cm**
- Verpackungseinheit: **3 bzw. 2 (Größe large) Stück**

PRODUKTMERKMALE

- Schlauchverband mit innenliegendem, kreisförmigen Gel-Polster
- Partielle Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Länge: ca. 3,5 cm
- Inhalt: **2 Stück**

PediSoft® TexLine Schlauchverband
REF 137 060



small (Ø 12 mm) oder large (Ø 15 mm)

PediSoft® TexLine Zehen-/Fingerkappe
REF 137 050



s (Ø 15 mm), m (Ø 20 mm), l (Ø 25 mm)

PRODUKTMERKMALE

- Schlauchverband mit Gelüberzug, zuschneidbar, individuell anpassbar
- Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Länge: 15 cm
- Inhalt: **1 Stück**

PRODUKTMERKMALE

- Geschlossene Zehenkappe vollflächig mit Gel beschichtet
- Zur Druckentlastung an Fingern und Zehen
- Inhalt: **1 Stück**, inkl. Pflegepulver

DAS PEDISOFT®-TEXLINE-PLUS

- Polster: Schutz und Druckverteilung
- Nach dem Tragen kehrt das Material sofort wieder in seine ursprüngliche Form zurück
- Angenehmes Tragegefühl durch Textilbezug
- Maschinenwaschbar bei 30 °C
- Sehr hygienisch

Bunte Vielfalt für Therapie und Sport.

StabiloColor®

StabiloColor®

REF 520 000



Breiten: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

StabiloColor® Tape

REF 520 010



Breite: 5 cm

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Binden
- Materialzusammensetzung:
Baumwolle, Polyamid, Polyurethan
- Waschfest, ohne Verlust von Elastizität und Farbe

FARBEN: ■ grün ■ rot ■ blau
■ schwarz

PRODUKTMERKMALE

- Adhäsives, elastisches Kinesiotape
- Länge: 5 m
- Materialzusammensetzung:
95 % Baumwolle, 5 % Elasthan
- Hautfreundlicher Acrylatkleber
- Latexfrei

FARBEN: ■ pink ■ blau ■ schwarz

StabiloColor® haft

REF 521 000



Breiten: 4 cm, 6 cm, 8 cm, 10 cm

PRODUKTMERKMALE

- Elastische Binden, kohäsive Ausführung, mikropunktuellem Latexhaftauftrag
- Materialzusammensetzung:
Baumwolle, Polyamid, Polyurethan

FARBEN: ■ grün ■ rot ■ blau
■ schwarz

DAS STABILOCOLOR®-PLUS

- Auch als Sprechstundenbedarf
- Länge: 5 m, 80 % dehnbar, Webkante
- Strapazierfähiges Material
- Mehrfach einsetzbar, behält Elastizität

DAS STABILOCOLOR®-PLUS

- Frische Farben für eine positive, psychologische Wirkung
- Strapazierfähiges Material, bis zu 130 % dehnbar

Was ist erstattungsfähig und was nicht?

Gemäß § 139 SGB V erstellt der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen ein systematisch strukturiertes Hilfsmittelverzeichnis. Demnach werden alle Hilfsmittel in verschiedene Produktgruppen eingeteilt und mit einer Positionsnummer versehen, sodass unsere Produkte wie folgt eingeordnet werden können:

Pos. Nr. 05.07.02.0004

Erstattungsfähiges Produkt einer bereits verabschiedeten Produktgruppe.

Pos.Nr. 05.04.01.2xxx

Nach den vorliegenden Qualitäts-Standards erstattungsfähiges Produkt, dessen Produktgruppe noch nicht aktualisiert worden ist.

Pos.Nr. 23.14.03.1037
Zuzahlungsfrei für Schwangere

Zuzahlungsfrei für Schwangere, wenn die Versorgung Aufgrund der Schwangerschaft erfolgt.

Pos.Nr. 05.04.01.098
Zuzahlungsfrei für Kinder

Zuzahlungsfrei für Versicherte bis zu 18 Jahren.

Keine Kassenleistung

Nicht zu Lasten der Krankenkassen verordnungsfähiges Hilfsmittel. Bitte Privatrezept ausstellen.

Unsere BORT Medical-Produkte

Alle Artikel sind pflegeleicht, mit Feinwaschmittel per Hand waschbar und für den längeren Gebrauch konzipiert.

Im Gegensatz zu Medikamenten sind bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Zeichnungen, auch solche mit Maßangaben und deren Bezeichnungen, sind urheberrechtlich geschützt.

Mit [®] versehene Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen.

**Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand November 2023.**

Hinweise für Ärzte

Stand: November 2023

Für Hilfsmittelverordnungen gilt auch **weiterhin**:

- keine Budgetierung
- keine Richtgrößen

10 %ige Zuzahlung des Patienten.
Minimum € 5, Maximum € 10.

Da die Höhe der Erstattungspreise (für die Hilfsmittel) unter den verschiedenen Krankenkassen durchaus differiert, können keine genauen Angaben über die jeweiligen Zuzahlungsbeträge gemacht werden. Darüber hinaus sehen einige Kassenerstattungsverträge neben der gesetzlichen Zuzahlung auch die Möglichkeit einer Aufzahlung (Mehrkostenregelung) durch den Versicherten vor.

Zum Sprechstundenbedarf gelten die jeweiligen Vereinbarungen der einzelnen Landesregelungen.

Bitte wenden Sie sich bei weiteren Fragen gerne an uns:
Telefon 0 71 51/ 992 00-0

Wie rezeptieren?

Unsere Empfehlung:

Im Bedarfsfall schreiben Sie auf Ihr Rezept neben der Diagnose, auch die Artikelbezeichnung, die Artikelnummer und die Positionsnummer des Hilfsmittels. So können Sie ganz sicher sein, dass Ihre Patienten exakt das von Ihnen verordnete Produkt erhalten.

<input type="checkbox"/> Suchen <input type="checkbox"/> Überprüfen <input type="checkbox"/> Drucken <input type="checkbox"/> Archivieren <input type="checkbox"/> Löschen <input type="checkbox"/> Zurücksetzen	Krankenkasse bzw. Kostenträger <input type="text"/>	Arzt <input type="checkbox"/> E <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/>	Apparatnummer <input type="text"/>
	Name, Vorname des Versicherten <input type="text"/>	Apparat <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>
Kassennr. <input type="text"/>	Versicherungs-Nr. <input type="text"/>	Status <input type="text"/>	Rezeptnummer <input type="text"/>
Vertrags-Nr. <input type="text"/>	Ist gültig bis <input type="text"/>	Datum <input type="text"/>	Vertragszeitraum <input type="text"/>
Rp. (Bitte Leertäume durchstreichen)			Vertragszeitstempel <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Bei einem <input type="checkbox"/> Bei einem <input type="checkbox"/> Bei einem <input type="checkbox"/> Bei einem	Diagnose Handwurzelarthrose rechts Handgelenkbandage z. B. BORT Handgelenkstütze, REF 103 300 Pos. Nr. 05.07.02.3013, wg. erhöhter Patientencompliance		Unterschrift des Arztes <input type="text"/>
Bei Arbeitsunfall auszufüllen	Abgabedatum in der Apotheke <input type="text"/>	Muster 16 (1.2004)	
Unfalltag <input type="text"/>	Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer <input type="text"/>	<input type="text"/>	



BORT GmbH
Postfach 1330 | D-71367 Weinstadt
Am Schweizerbach 1 | D-71384 Weinstadt
Telefon (07151) 99200-0
Telefax (07151) 99200-50
www.bort.com | medical@bort.com

Art. Nr. 50|2023-11|006 DE | Rev. 01



4 0 5 8 6 2 0 5 6 0 7 9

